

CARTON HOSPITALIER

50 L Haut – Liens coulissants

830539 – Paquet de 10 cartons

AVANTAGES

PRACTICITÉ

- Caisse à fond automatique - montage facile et rapide
- Encoches facilitant le pliage intuitif du carton
- Dessin de montage présent sur le carton et représentation des conseils d'utilisation
- Nouveau design épuré facilitant la lecture d'information et l'identification des cartons

SÉCURITÉ ET PERFORMANCES


- Nouveau système de fermeture plus intuitif et sécurisant par rabats crantés colorés (témoin de fermeture)
- Fermeture par double poignées pour une grande facilité de manipulation et plus de sécurité
- Nouveau design général et bords renforcés pour un stockage optimisé des cartons et un empilage en toute sécurité **1**
- Carton DASRI conforme à la nouvelle version de la norme NFX30-507 de Juillet 2018 et issu de sources responsables

HYGIÈNE

- Fermeture du sac par liens coulissants évitant tout risque de contamination



Réf. 830539 – Jaune et blanc – paquet de 10

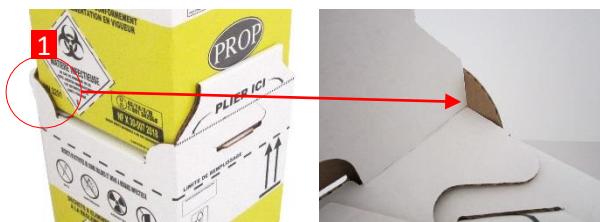

CARACTÉRISTIQUES

Matières : carton de 410 g/m² + sac PEMD 55 µm
Capacité nominale : 50 L
Capacité réelle : 51,20 L
Capacité utile : 47,60 L
Hauteur limite de remplissage : 605 mm
Poids : 575 g
Résistance en charge : 13,5 kg
Dimensions : 290x290x650 mm
Épaisseur de sac intérieur : 55 µm

CONDITIONNEMENT

- Paquet de 10 cartons

DOMAINE D'APPLICATION

La gamme DASRI est destinée à la collecte des déchets à risques infectieux en milieu hospitalier.

Utilisable pour tous types de déchets mous liés à l'administration des soins.

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATION




BVT 342356


CONSEIL D'UTILISATION

MONTAGE DU CARTON


OUVRIR LÉGEREMENT LA BOÎTE EN INTRODUISANT L'AVANT-BRAS À L'INTÉRIEUR DU SAC

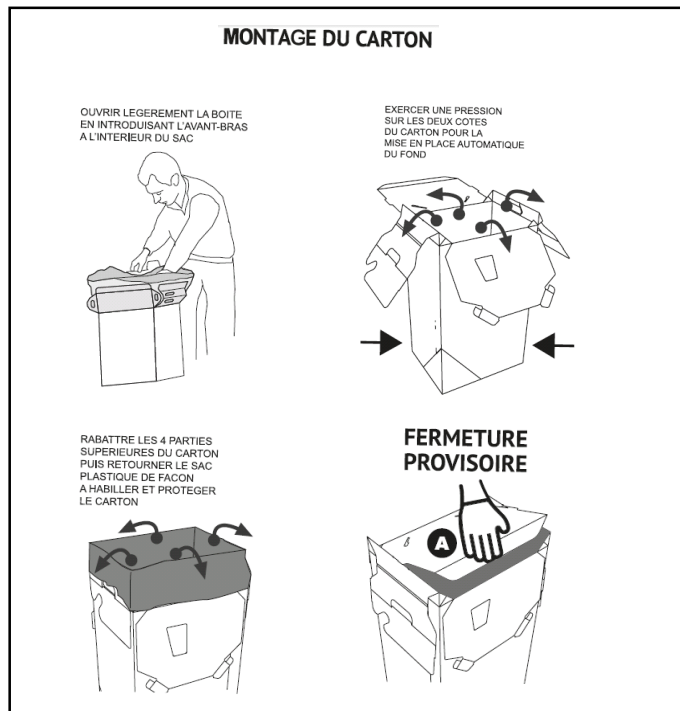


EXERCER UNE PRESSION SUR LES DEUX CÔTÉS DU CARTON POUR LA MISE EN PLACE AUTOMATIQUE DU FOND

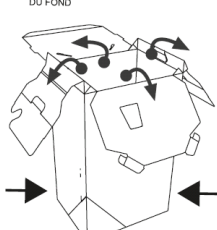

RABATTRE LES 4 PARTIES SUPÉRIEURES DU CARTON PUIS RETOURNER LE SAC PLASTIQUE DE FAÇON À HABILLER ET PROTÉGER LE CARTON

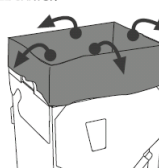


FERMETURE PROVISOIRE

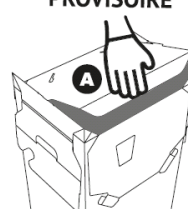


FERMETURE DU CARTON


FAIRE UN PREMIER NOEUD
PLIER EN COL DE CYGNE
FAIRE UN SECOND NOEUD




REPLIER LA PARTIE "A" VERS L'INTÉRIEUR







REPLIER LES 2 PARTIES LATÉRALES "B" VERS L'INTÉRIEUR COMME INDIQUE SUR LE DESSIN

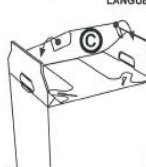

REPLIER LA PARTIE "C" VERS L'INTÉRIEUR ET INSÉRER LES 2 LANGUETTES DANS LES FENTES



PRODUITS DE LA GAMME DASRI

	DECHETS PCT *	DECHETS MOUS	DECHETS LIQUIDES	PIECES ANATOMIQUES	LITRAGES
Collecteurs DASRI 	✓	✗	✗	✗	de 0,6 L (mini-collecteur) à 60 L (Fûts)
Sacs et cartons DASRI 	✗	✓	✗	✗	de 12 L à 110 L
Jericanes DASRI 	✗	✗	✓	✗	de 10 L à 20 L
Caisses anatomiques 	✗	✗	✗	✓	de 1,5 kg à 30 kg (charge utile)

* Piquants, Coupants, Tranchants