

# Medi-Prop Surf AG+

Détergent Désinfectant concentré



Solutions d'hygiène et de protection professionnelles

232729 / 232728

## AVANTAGES

- Détergent désinfectant Idéal pour une utilisation sur les sols, les surfaces, les mobiliers et les dispositifs médicaux de classe I (lits médicaux, fauteuils roulants, etc...),
- Idéal également en collectivité, hôpitaux, centre de soins, maison de retraite, écoles, cantines, réfectoires...
- Peut s'utiliser sur les surfaces et matériels pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Formule à pH doux une fois dilué permettant un usage polyvalent.
- Sans EDTA et sans Aldéhyde
- Agréablement parfumé.



Réf. 232728 Colis de 6 flacons doseurs de 1L  
Réf. 232729 Colis de 2 bidons de 5L

## COMPOSITION

Chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n°7173-51-5 (3% m/m), de laurylamine dipropylenediamine CAS n°2372-82-9 (5.1% m/m), parfum.

## PROPRIÉTÉS BIOCIDES

## APPLICATIONS

- Utilisation en milieux hospitaliers, agroalimentaires, restaurations, collectivités et industriels.

## CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore  
Odeur : Citron  
pH (pur) : 13 – 14  
pH dilué à 0,25% : 8 ± 0,2  
Densité : ~1

Actif sur	Normes	Concentration	Temps de contact
<b>Bactéricidie*</b>	• EN 1276 sur Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogène		5 min
	• EN 13697 sur Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogène	0,25%	15 min
	• EN 13727+A1 sur Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa		5 min
<b>Levuricidie*</b>	• EN 1650+A1 sur Candida Albicans		30 min
	• EN 13697 sur Candida Albicans	0,25%	30 min
	• EN 13624 sur Candida Albicans		min
<b>Virucidie*</b>	• EN 14476 +A1 sur Norovirus, Adénovirus, Poliovirus	0,25%	15 min
	• EN 14476 +A2 sur Norovirus, Adénovirus	1%	5 min
	• EN 14476 +A2 sur vaccine (MVA)	0,75%	5 min

\*Norme réalisée en conditions de saleté

# Medi-Prop Surf AG+

Détergent Désinfectant concentré

232729 / 232728



## MODE D'EMPLOI

En balayage ou essuyage humide, lavage mouillé, bio nettoyage. Diluer le produit à 0,25% (soit une dose de 20 mL pour un seau de 8 L) et appliquer à raison de +/- 30 mL/m<sup>2</sup>.

Ne pas rincer, sauf sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Compatible en utilisation auto laveuse à des concentrations  $\leq$  0,5%. Nettoyer le matériel utilisé à l'eau.

Le produit dilué se conserve 24h à 48h maximum.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Craint le gel. Ne pas avaler.

Ne pas utiliser avec d'autres produits. Utilisation exclusivement professionnelle.

Produit biocide : TP2 et TP4. Utilisez les biocides avec précautions. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts ou les cours d'eau. Produit conforme à la législation française relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

## CONSERVATION

Dans son emballage d'origine fermé entre 4°C et 40°C et dans des conditions normales de stockage à température ambiante. Se conserve pendant 3 ans.