

PURELL® Lingettes Antimicrobiennes Plus PURELL Antimicrobial Wipes Plus







Lingettes antiseptiques pour les surfaces

Marchés cibles : milieux médical et paramédical, hôpitaux, centres de soins, laboratoires, services d'urgences, loisirs

- **Produit actif sur Coronavirus selon EN 14476**
- **Large spectre d'action (bactéries, levures, sélection de virus)**
- **Facile à utiliser**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Substances actives	Ethanol CAS 64-17-5 (48 g/kg), Chlorure de benzalkonium CAS 85409-22-9 (3 g/kg), Chlorhexidine digluconate CAS 18472-51-0 (1,2 g/kg)			
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Non-tissé : spunbonded blanc, 22g/m² • Parfum : mentholé 			
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • Durée de conservation : 24 mois avant ouverture, conserver à l'abri de la chaleur dans des conditions normales de stockage • Conserver à température ambiante dans son emballage d'origine fermé • Eviter les températures supérieures à 40°C 			
Mode d'emploi	<p>1. Pour amorcer la première lingette, retirer le couvercle de la boîte et tirer la première lingette par le centre du rouleau, avec les mains propres. Remettre le couvercle en faisant passer la lingette par l'ouverture dans le couvercle.</p> 	<p>2. Appliquer la lingette de manière à humidifier la surface à désinfecter. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire. Bien refermer le conditionnement après usage.</p> 	<p>3. Laisser agir selon l'efficacité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer.</p> 	<p>4. Jeter les lingettes usagées dans un container à déchets.</p> 
Réglementation	<ul style="list-style-type: none"> • Produit biocide TP2 • Usage exclusivement professionnel 			
Environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Emballage recyclable • Eliminer le contenu et le récipient dans un conteneur à déchets • Ne pas jeter le produit dans l'environnement 			
Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas avaler • Ne pas utiliser avec d'autres produits • Réservé à un usage sur des surfaces, des objets et des petits matériels ne présentant pas de rugosité • L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage (préalable à toute désinfection) • En cas de réutilisation, risque de contamination • Ne pas utiliser une lingette si elle est sèche • Pour plus de renseignements, se référer à la fiche de données de sécurité du produit • En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche 			

ACTIVITE MICROBIOLOGIQUE DE LA SOLUTION

Actif sur	Norme	Temps de contact
Bactéries	EN 1276* (v.2019)	30s
	EN 13727* (v.2015)	30s
	EN 13727* (v.2015), <i>Staphylococcus aureus</i> SARM, <i>Enterococcus faecium</i> résistant à la Vancomycine (VRE), <i>Escherichia coli</i> BLSE	30s
	EN 13697** (v.2015)	1 min
	EN 16615* (v. 2015), <i>P.aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i>	15 min
Levures	EN 13624* (v.2013), <i>Candida albicans</i> + <i>Candida auris</i>	1 min
	EN 13697* (v.2015), <i>Candida albicans</i>	5 min
	EN 13697* (v. 2019), <i>Candida auris</i>	5 min
	EN 1650* (v.2019), <i>Candida albicans</i>	1 min
	EN 16615* (v. 2015), <i>Candida albicans</i>	15 min
Virus	Actif sur :	
	EN 14476* (v.2019), Coronavirus BCoV (virus modèle)	30s
	EN 14476* (v.2015), Rotavirus	1 min
	EN 14476* (v.2015), Virus de la Vaccine (MVA) Spectre d'activité couvrant les virus enveloppés incluant notamment Hépatites B et C, Influenza H1N1, VIH...	30s

*Etude réalisée en conditions de propreté

**Etude réalisée en conditions de saleté

CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS DE LA LINGETTE	CODE PRODUIT
PURELL Lingettes Antimicrobiennes Plus – Boite de 100 lingettes x 12	130 x 210 mm	9202-12-EEU00
PURELL Lingettes Antimicrobiennes Plus – Boite de 270 lingettes x 6	150 x 170 mm	9213-06-EEU00
PURELL Lingettes Antimicrobiennes Plus – Recharge de 1200 lingettes x 2	150 x 200 mm	9218-02-EEU00

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et la notice d'information avant d'utiliser le produit.



GOJO Industries - Europe, Ltd.*
Units 5 & 6
Stratus Park
Brinklow
Milton Keynes
MK10 0DE UK
Tel: +44 (0) 1908 588444
Fax: +44 (0) 1908 588445

Laboratoires Prodene Klint
– a GOJO Family Company
8 Rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg –
France
Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00
Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49

GOJO Iberia España, S.L.
Paseo de la Castellana, 90, 1ª planta,
28046 Madrid, Espagne
Tel: +351 218 988 230
Fax: +351 21 898 82 39

GOJO Switzerland Sàrl
Chemin du Faubourg-de-Cruseilles 11,
c/o RSM (Gva) SA,
1227 Carouge
GE +41 225706057

Prodene GmbH –
a GOJO Family Company
Im Trutz Frankfurt 55
60322 Frankfurt, Allemagne
Tel.: +49 (0) 6074 9196057
Fax: +49 (0) 6074 9196685