

## **AQUA MARIS® BABY**

100% PRIRODAN SPREJ ZA NOS

SPREJ ZA NOS 50 I 150 ML

Izotonična morska voda bogata solima i oligoelementima ispire bakterije, viruse i nečistoće iz bebinog nosa.

## **SASTAV**

Otopina sadrži morsku vodu iz Jadrana bogatu solima i oligoelementima. Oligoelementi prisutni u otopini imaju važnu ulogu u održavanju normalne funkcije sluznice nosa što omogućava prohodnost gornjih dišnih putova.

## **BEZ KONZERVANSA.**

## **PAKIRANJE**

50 ml otopine u bočici s mikroraspršivačem posebno prilagođenim bebinom nosiću.

150 ml otopine u bočici s mikroraspršivačem posebno prilagođenim bebinom nosiću.

## **NAMJENA**

Disanje kroz nos jedini je ispravan način disanja, što je važno za rast i razvoj djeteta, stoga na higijenu nosa treba paziti od rođenja. Suh nos, nakupljena nečistoća, sekret ili otečena sluznica smanjit će prohodnost nosa i u djeteta izazvati nemir, plačljivost i razdražljivost te omesti miran san i hranjenje. Začepljen nos tijekom prehlade ili alergije može se odraziti i na zdravlje ukupnog dišnog sustava.

Morska voda bogata solima i oligoelementima blagotvorno djeluje na sluznicu nosa, potpomažući prirodne mehanizme njezina čišćenja.

## **KADA I KAKO KORISTITI AQUA MARIS® BABY SPREJ ZA NOS?**

Aqua Maris® Baby s aplikatorom posebno prilagođenim nosnici novorođenčadi, olakšava uklanjanje nakupljenog sekreta, eliminira infektivne čestice, prašinu, alergene i nečistoću. Time se odčepljuje nosić uz istodobno ovlaživanje i obnavljanje sluznice nosa. Aqua Maris®. Osnažite osjete.

Aqua Maris® Baby sprej za nos preporučuje se:

- za svakodnevnu higijenu nosa,
- prije dojenja ili hranjenja na bočicu,
- tijekom prehlade i alergije,
- kao pomoć kod upale uha, uz ostalu terapiju preporučenu od liječnika,
- kod suhoće nosa uslijed boravka u klimatiziranim ili jako zagrijanim prostorijama te
- prije uporabe lijekova (kapi ili sprejeva) za nos.

Raspršiti Aqua Maris® Baby sprej za nos u svaku nosnicu 2–6 puta dnevno, prema potrebi i češće.

Nakon primjene, isprati aplikator i osušiti ga.

Za omekšavanje i odstranjenje većih količina nečistoće i sekreta iz nosne šupljine, Aqua Maris® Baby sprej za nos treba obilnije raspršiti u svaku nosnicu. Postupak se može ponavljati dok sadržaj dovoljno ne omekša tako da se može lako ukloniti iz nosa.

Budući da Aqua Maris® Baby podržava fiziološko stanje sluznice i nema sistemskih učinaka, prikladan je od najranije dobi. Pogodan je za svakodnevnu uporabu.

Zbog higijenskih razloga svaki bi proizvod trebala koristiti samo jedna osoba.

Isprobajte i ostale proizvode iz Aqua Maris® linije.

Aqua Maris®. Osnajte osjete.

NAZIV PROIZVODA	NAMJENA	SASTAV
<b>Aqua Maris® Bebe</b> kapi za nos	vlaže i čiste nosiće; pogodne od prvog dana života	izotonična morska voda
<b>Aqua Maris® Classic</b> sprej za nos	vlaži i čisti nos	izotonična morska voda
<b>Aqua Maris® Clean</b> sprej za nos	uklanja nečistoće, bakterije i viruse iz nosa	izotonična morska voda
<b>Aqua Maris® Refresh</b> sprej za nos	osvježava, štiti i čisti nos	morska voda + hidrolati smilja i lavande
<b>Aqua Maris® Plus</b> sprej za nos	regenerira nosnu sluznicu	morska voda + d-pantenol
<b>Aqua Maris® 4Allergy</b> sprej za nos	ublažava simptome alergije	morska sol + Ectoin® 2%
<b>Aqua Maris® Strong</b> sprej za nos	prirodno odčepkuje nos	hipertonična morska voda

<b>Aqua Maris® Talasoterapija</b> sustav za ispiranje nosa i sinusa	ispire nosnu šupljinu i sinuse uz blagotvorno djelovanje prirodne morske soli i mediteranskog ljekovitog bilja	posuda za ispiranje + 30 vrećica prirodne morske soli bez aditiva, obogaćene eteričnim uljima mirte i smilja
<b>Aqua Maris® Talasoterapija</b> morska sol s eteričnim uljima smilja i mirte	morska sol iz Jadrana namijenjena za korištenje uz Aqua Maris® Talasoterapija, sustav za ispiranje nosa i sinusa	30 vrećica prirodne morske soli bez aditiva, obogaćene eteričnim uljima mirte i smilja
<b>Aqua Maris® Grlo</b> sprej za grlo i usta, 30 ml	ublažava iritaciju sluznice grla i usne šupljine	hipertonična morska voda
<b>Aqua Maris® Propolis</b> sprej za grlo i usta	pomaže umirivanju nadraženog i upaljenog grla i smanjuje iritaciju usne šupljine.	morska voda + ekstrakt propolisa

## UPOZORENJE

Vanjski spremnik napunjen je inertnim potisnim plinom (dušikom) koji ne dolazi u dodir s morskom vodom. Spremnik je pod pritiskom: može puknuti pod djelovanjem topline. Ne bušiti ni paliti čak niti nakon uporabe. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskre, otvorenog plamena ili bilo kojeg drugog izvora plamena. Ne pušiti. Zaštititi ga od sunčevog svjetla i ne izlagati temperaturama višim od 50°C/122°F.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.

## PROIZVOĐAČ

JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

**CE** 0373

## DATUM REVIZIJE UPUTE

Studeni 2016.

## OBJAŠNENJE SIMBOLA NA PROIZVODU



Proizvođač



CE oznaka



Rok valjanosti



Pogledati upute za uporabu



Broj serije