

Vizol S 0,21%

Vizol S 0,4%

KAPI ZA SUHO OKO

1. SASTAV

Natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat, natrijev hidrogenfosfat bezvodni, natrijev hijaluronat, voda pročišćena.

2. PAKIRANJE

10 ml

Bez konzervansa.

3. NAMJENA

Vizol S 0,21% kapi za suho oko namijenjene su za ublažavanje blažih smetnji suhog oka.

Vizol S 0,4% kapi za suho oko namijenjene su za ublažavanje težih smetnji suhog oka.

Kapi za oko služe za zaštitu, vlaženje i podmazivanje oka. Primjena kapi omogućuje brzo olakšavanje tegoba. Smetnje suhog oka mogu se ublažiti i tako spriječiti komplikacije.

Suhoća oka može nastati zbog:

- poremećaja suznog filma uzrokovanog nedostatkom suza ili njihovim obilnim hlapljenjem koje može dovesti do oštećenja površine oka i simptoma neugode
- okruženja (centralno grijanje, klimatizacijski uređaji, fluorescentno svjetlo, dim i vjetar)
- dugotrajnog rada za računalom
- korištenja dekongestivnih kapi za oko
- starenja (75% stanovništva starijeg od 65 godina pati od sindroma suhog oka)
- nošenja kontaktnih leća
- operativnih zahvata ili ozljeda na oku
- spola (hormonske promjene u žena tijekom trudnoće, dojenja, menstruacije ili menopauze)
- lijekova (antidepresivi, povišeni tlak, kontracepcija)
- bolesti (reumatoidni artritis, šećerna bolest, astma, bolesti štitnjače, glaukom).

Vizol S 0,21% kapi za suho oko mogu se koristiti i tijekom nošenja kontaktnih leća.

Vizol S 0,4% viskozne su kapi, čime osiguravaju dulje zadržavanje natrijeva hijaluronata na površini oka, što rezultira produljenim ovlaživanjem te boljom zaštitom. Prilikom korištenja Vizol S 0,4% kapi za suho oko preporučuje se skinuti leće na 15 minuta tijekom ukapavanja.

Natrijev hijaluronat sastavni je dio naše očne vodice i staklovine.

U Vizol S kapima za suho oko natrijev hijaluronat svakim treptajem stvara zaštitni film preko površine oka. Na taj način uklanja osjećaj suhoće, pijeska i nadraženosti oka.

Tehnologija aplikatora bočice sadržava filter koji proizvod čini sigurnim za primjenu jer sprečava onečišćenje otopine i nakon otvaranja.

Koriste se i nakon operativnih zahvata te kod suhog oka kao posljedice korištenja protuupalnih lijekova u oku (nakon savjetovanja s liječnikom).

4. UPUTE ZA UPORABU

Kapi koristiti više puta dnevno, prema potrebi. Pravilnim korištenjem jedna bočica dostatna je za 30 dana.

Ukapati 1 – 2 kapi u oko, trepnuti nekoliko puta kako bi se otopina ravnomjerno rasporedila po površini oka. Ne sadržavaju konzervanse te stoga nisu štetne za primjenu u oku.

5. PROIZVOĐAČ

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

6. NAPOMENA

Rok valjanosti nakon otvaranja: 180 dana.

7. ČUVANJE

Proizvod čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnoj ambalaži.

Isprobajte i ostale kapi za suho oko iz Vizol S linije:

Proizvod	Namjena	Sastav	Uzrok smetnji	Način primjene	Korištenje s kontaktnim lećama	Osjećaj nakon nanošenja
Vizol S 0,21	Ublažavanje blažih smetnji suhog oka	Natrijev hijaluronat 0,21%	Nošenje leća, alergija, strano tijelo, vanjski čimbenici (suhi zrak, dim).	Ukapat 1 – 2 kapi u oko, više puta na dan, odnosno prema potrebi.	Da	Trenutno osvježenje i dugotrajan osjećaj vlaženja.
Vizol S 0,4	Ublažavanje težih smetnji suhog oka	Natrijev hijaluronat 0,4%	Starenje, terapija lijekovima, agresivni vanjski čimbenici (vjetar, sunce, suhi zrak).	Ukapat 1 – 2 kapi u oko, više puta na dan, odnosno prema potrebi.	Ne	Trenutno olakšanje i dugotrajan osjećaj ugone i podmazivanja. Proizvod može trenutno zamagliti vid.
Vizol S INTENSIVE	Ublažavanje smetnji suhog oka i obnavljanje površine oka	Natrijev hijaluronat 0,15% deksantanol 2%	Mehanički iritansi oka: nošenje leća, operativni ili dijagnostički zahvati, lijekovi.	Ukapat 1 – 2 kapi u oko, više puta na dan, odnosno prema potrebi.	Da	Trenutno osvježenje i dugotrajan osjećaj vlaženja.

8. VERZIJA/DATUM REVIZIJE UPUTE

JGL-HR/T3

Studenj, 2014.

9. OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU



Pogledati upute za uporabu



Proizvođač



Rok valjanosti



30°C gornja granica temperature



Broj serije



CE oznaka

 Sterilno, aseptična tehnika obrade