

# АКВА МАРИС®



## ИНСТРУКЦИЯ-ВКЛАДЫШ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

### СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ АКВА МАРИС® КЛАССИЧЕСКИЙ

Регистрационное удостоверение: № РЗН  
2018/7965 от 21.12.2018 г.

### Стерильный изотонический раствор морской воды.

Содержание NaCl не менее 9 г/л.

### СОСТАВ НА 100 МЛ:

30 мл воды Адриатического моря  
с натуральными микроэлементами;  
70 мл воды очищенной.

Натуральная вода Адриатического моря,  
входящая в состав раствора, содержит  
ионы Cl<sup>-</sup>, Na<sup>+</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, K<sup>+</sup>,  
HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, Br<sup>-</sup>, а также микроэлементы,  
такие как: цинк, селен, йод, железо,  
марганец и др.

Не содержит консервантов и химических  
добавок.

### ВНЕШНИЙ ВИД:

Бесцветный прозрачный раствор без  
запаха.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Спрей назальный Аква Марис®  
Классический предназначен для  
нанесения на слизистую оболочку носа  
для увлажнения слизистой оболочки и  
удаления выделений.

### ПРИМЕНЯЕТСЯ:

- для **орошения**;
- для **удаления вирусов, бактерий и  
инокородных частиц**;
- для **восстановления и увлажнения**  
слизистой оболочки носа;
- для **уменьшения раздражения и  
воспаления** локальных участков  
слизистой оболочки.

### ОПИСАНИЕ:

Стерильная изотоническая морская вода  
увлажняет слизистую оболочку носа и  
способствует поддержанию ее  
нормального физиологического состояния,  
способствует разжижению слизи и  
нормализации ее выработки в бокало-

видных клетках слизистой оболочки  
носовой полости.

Микроэлементы воды Адриатического  
моря улучшают функцию мерцательного  
эпителия, оказывают стимулирующее,  
восстановительное, очищающее, противо-  
воспалительное действие на слизистую  
оболочку полости носа, повышают ее  
устойчивость к внедрению патогенных  
микроорганизмов.

**Ионы кальция и магния** стимулируют  
движение «реснитчатых клеток»  
слизистой оболочки, способствующих  
удалению из полости носа микро-  
организмов и инородных частиц, и  
нормализуют реологические свойства  
слизи.

**Йод, ионы натрия и хлорид-ионы**  
оказывают антисептический эффект, а  
также активизируют выработку  
защитной слизи.

**Ионы цинка и селена** стимулируют  
местный иммунитет слизистой оболочки  
носа и околоносовых пазух.

**Ионы кальция** обладают противо-  
аллергическим действием.

**Карбонаты, сульфаты, хлориды**  
нормализуют выработку назальной  
слизи.

Спрей назальный Аква Марис®  
Классический способствует смыванию и  
удалению вирусов, бактерий,  
аллергенов и инородных частиц со  
слизистой носа, уменьшению местного  
воспалительного процесса.

Спрей назальный Аква Марис®  
Классический, применяемый с гигие-  
ническими целями, способствует  
очищению слизистой от осевшей на ней  
уличной и комнатной пыли.

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- профилактика острых респираторных  
инфекций (ОРВИ);
- профилактика ринита;
- сухость слизистой оболочки полости  
носа;
- подготовка слизистой оболочки к  
применению назальных препаратов;
- сохранение физиологических

характеристик слизистой оболочки  
полости носа в измененных микро-  
климатических условиях у лиц,  
живущих и работающих в  
помещениях с кондиционированным  
воздухом и/или центральным  
отоплением; у людей, носоглотка  
которых постоянно подвергается  
вредным воздействиям (курильщики,  
водители автотранспорта, люди,  
работающие в горячих и запыленных  
цехах, а также находящиеся в  
регионах с суровыми климатическими  
условиями).

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для профилактики ОРВИ и ринита и  
ежедневной гигиены носовой полости:  
детям с 1 года и взрослым по  
1-2 впрыскивания несколько раз в день,  
при необходимости возможно более  
частое применение.

Для устранения сухости и раздражения  
в носовой полости: детям с 1 года и  
взрослым по 3-4 впрыскивания несколько  
раз в день, при необходимости возможно  
более частое применение.

Длительность применения не ограничена.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед первым использованием следует  
снять защитную крышку и нажать  
на распылитель 2-3 раза для того,  
чтобы выпустить воздух.

Спрей назальный Аква Марис®  
Классический совместим со всеми  
средствами, используемыми для лечения  
насморка.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не выявлены.

### СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ РАБОТЕ С ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ:

Не влияет на скорость реакции при  
управлении автотранспортом и работе  
с другими механизмами.

### ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ:

Может применяться при беременности и  
лактации.

### ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Не выявлены.

### СРОК ГОДНОСТИ:

3 года. Не использовать по истечении  
срока годности.

### ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА:

По 30 мл раствора в стеклянном флаконе  
темного цвета (200 доз), снабженном  
распылительным устройством и защитной  
крышкой. Один флакон вместе  
с инструкцией по применению помещают  
в картонную пачку.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ (ЭКСПЛУАТАЦИИ):

Хранить в недоступном для детей месте  
при температуре + 25±10°C, влажности  
45–80 %, давлении 84–106.7 кПа.

### УТИЛИЗАЦИЯ:

Спрей назальный Аква Марис®  
Классический не оказывает негативного  
воздействия на окружающую среду,  
поэтому специальные меры для  
утилизации раствора не требуются.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.,  
Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia  
(ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ а.о.,  
Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия).

### Место производства:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.,  
Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia  
(ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ  
а.о., Свилно 20, 51000 Риека,  
Хорватия).


### ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКТА СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯДРАН»:

119330, г. Москва, Ломоносовский  
пр-т, д.38, офис VII, тел./факс:  
+7(499)143-33-71.

[www.aquamaris.ru](http://www.aquamaris.ru)



Внимание! В данном документе  
представлены только основные  
сведения, все дополнительные  
параметры содержатся в Инструкции  
по применению для специалистов  
с медицинским образованием и также  
могут быть предоставлены по запросу.

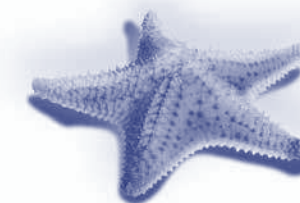

130002722/01 (RU)