

ИНСТРУКЦИЯ-ВКЛАДЫШ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

КАПЛИ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ПОЛОСТИ НОСА АКВА МАРИС ДЛЯ ДЕТЕЙ

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2018/7964 от 21.12.2018 г.

**Стерильный изотонический
рствор морской воды.**

Содержание NaCl не менее 9 г/л.

СОСТАВ НА 100 МЛ:

30 мл воды Адриатического моря
с натуральными микроэлементами;
70 мл воды очищенной.

Натуральная вода Адриатического
моря, входящая в состав,
содержит ионы Cl^- , Na^+ , SO_4^{2-} , Mg^{2+} ,
 Ca^{2+} , K^+ , HCO_3^- , Br^- , также микро-
элементы, такие как: цинк, селен, йод,
железо, марганец и др.

Не содержит консервантов и
химических добавок.

ВНЕШНИЙ ВИД:

Бесцветный прозрачный раствор
без запаха.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Капли для орошения полости носа
Аква Марис для детей предназначены
для увлажнения слизистой оболочки
носа для увлажнения слизистой
оболочки и удаления выделений.

ПРИМЕНЯЕТСЯ:

- для орошения и увлажнения;
- для удаления вирусов, бактерий и
иных чужеродных веществ;
- для уменьшения раздражения и
воспаления слизистых участков
слизистой оболочки носа;
- для восстановления слизистой
оболочки носа.

ОПИСАНИЕ:

Стерильная изотоническая морская
вода увлажняет слизистую оболочку
носа и способствует поддержанию
ее нормального физиологического
состояния, способствует увлажнению
слизи и нормализации ее выработки
в бокаловидных клетках слизистой

оболочки носовой полости.

Микроэлементы воды Адриатического
моря улучшают функцию мерцатель-
ного эпителия, оказывают стимулиру-
ющее, восстановительное, очища-
ющее, противовоспалительное
действие на слизистую оболочку
полости носа, повышают ее
устойчивость к внедрению патогенных
микроорганизмов.

Ионы кальция и магния
стимулируют движение «ресничатых
клеток» слизистой оболочки,
способствующих удалению из
полости носа микроорганизмов и
иных чужеродных веществ, и нормализуют
реологические свойства слизи.

**Йод, ионы натрия и хлорид-
ионы** оказывают антисептический
эффект, также активизируют
выработку защитной слизи.

Ионы цинка и селена стимулируют
местный иммунитет слизистой
оболочки носа и околоносовых пазух.

Ионы кальция обладают противо-
аллергическим действием.

Кальций, сульфат, хлориды
нормализуют выработку слизи.

Капли для орошения полости носа
Аква Марис для детей способствуют
смягчению и удалению вирусов,
бактерий, аллергенов и иных чужеродных
веществ со слизистой оболочки носа,
уменьшению местного воспали-
тельного процесса.

Капли для орошения полости носа
Аква Марис для детей,
применяемые с гигиеническими
целями, способствуют очищению
слизистой от осевшей на ней
уличной и комнатной пыли.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- ежедневный уход за полостью
носа (увлажнение, удаление
«корочек»);
- профилактика острых респираторных
инфекций (ОРВИ);
- профилактика ринита;
- сухость слизистой оболочки
полости носа;

- подготовка слизистой оболочки
к применению назальных
препаратов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для профилактики ОРВИ и ринита и
ежедневной гигиены носовой
полости: детям с первых дней жизни
по 1 – 2 капли в каждый носовой ход
несколько раз в день, при
необходимости возможно более
частое применение.

Для устранения сухости и
раздражения в носовой полости:
детям с первых дней жизни по
3-4 капли в каждый носовой ход
несколько раз в день, при
необходимости возможно более
частое применение.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Капли для орошения полости носа
Аква Марис для детей совместимы со
всеми средствами, используемыми
для лечения насморка.

Продолжительность применения
не ограничена.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не выявлены.

СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ РАБОТЕ С ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ:

Не влияет на скорость реакции при
управлении автомобилем и
работе с другими механизмами.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ:

Может применяться при беременности
и лактации.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Не выявлены.

СРОК ГОДНОСТИ:

2 года. Не использовать по истечении
срока годности.

Использовать в течение 45 дней
после вскрытия флакона.

ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА:

По 10 мл раствор в полиэтиленовом
флаконе-пельнице с защитной
крышкой. По одному флакону-

пельнице вместе с инструкцией по
применению помещают в картонную
упаковку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ (ЭКСПЛУАТАЦИИ):

Хранить в сухом, недоступном для
детей месте при температуре от 2 до
25°C, влажности 45-80%, давлении
84-106.7 кПа.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Капли для орошения полости носа
Аква Марис для детей не оказывают
негативного воздействия на
окружающую среду, поэтому
специальные меры для утилизации
раствора не требуются.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ
d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia
(ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИИ
.о., Свилно 20, 51000 Риека,
Хорватия).

Место производства:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ
d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia
(ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИИ
.о., Свилно 20, 51000 Риека,
Хорватия).

ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКТА СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯДРАН»:


119330, г. Москва, Ломоносовский
пр-т, д.38, офис VII, тел./факс:
+7(499)143-33-71.

www.aquamaris.ru



*Внимание! В данном документе
представлены только основные
сведения, все дополнительные
параметры содержатся в
Инструкции*

*по применению для специалистов
с медицинским образованием и
также могут быть предоставлены
по запросу.*

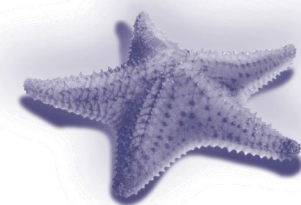

130002718/01