	UPUTA	Travanj 2021.
	Vizol S 0,21% FAST RELIEF Vizol S 0,4% LONG EFFECT kapi za oko, 10 ml	str: 1/4

Vizol S 0,21% FAST RELIEF
Vizol S 0,4% LONG EFFECT
kapi za oko

Upute za uporabu-pažljivo pročitajte

SASTAV

Natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat bezvodni, natrijev hijaluronat, pročišćena voda.

Bez konzervansa.

NAMJENA

Vizol S 0,21% FAST RELIEF kapi za suho oko namijenjene su za ublažavanje **blažih smetnji** suhog oka.

Vizol S 0,4% LONG EFFECT kapi za suho oko namijenjene su za ublažavanje **težih smetnji** suhog oka.

Kapi za oko služe za zaštitu, vlaženje i podmazivanje oka. Primjena kapi omogućuje brzo olakšavanje tegoba.

Simptomi suhog oka mogu se ublažiti i tako spriječiti komplikacije.

Suhoća oka može nastati zbog:

- poremećaja suznog filma uzrokovanog nedostatkom suza ili njihovim obilnim hlapljenjem koje može dovesti do oštećenja površine oka i simptoma neugode
- okruženja (centralno grijanje, klimatizacijski uređaji, fluorescentno svjetlo, dim i vjetar)
- dugotrajnog rada za računalom
- korištenja dekongestivnih kapi za oko
- starenja (75% stanovništva starijeg od 65 godina pati od sindroma suhog oka)
- nošenja kontaktnih leća
- operativnih zahvata ili ozljeda na oku
- spola (hormonske promjene u žena tijekom trudnoće, dojenja, menstruacije ili menopauze)
- lijekova (antidepresivi, lijekovi za povišeni tlak, kontracepcija)
- bolesti (reumatoidni artritis, šećerna bolest, astma, bolesti štitnjače, glaukom).

Vizol S 0,21% FAST RELIEF kapi za suho oko mogu se koristiti i tijekom nošenja kontaktnih leća.


Vizol S 0,4% LONG EFFECT viskozne su kapi, čime osiguravaju dulje zadržavanje natrijeva hijaluronata na površini oka, što rezultira produljenim ovlaživanjem te boljom zaštitom. Prilikom korištenja **Vizol S 0,4%** kapi za suho oko preporučuje se skinuti leće na 15 minuta tijekom ukapavanja.

Natrijev hijaluronat sastavni je dio naše očne vodice i staklovine.

U **Vizol S** kapima za suho oko natrijev hijaluronat svakim treptajem stvara zaštitni film preko površine oka. Na taj način uklanja osjećaj suhoće, pijeska i nadraženosti oka.

Koriste se i nakon operativnih zahvata te kod suhog oka kao posljedice korištenja protuupalnih lijekova u oku (nakon savjetovanja s liječnikom).

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

	UPUTA	Travanj 2021.
	Vizol S 0,21% FAST RELIEF Vizol S 0,4% LONG EFFECT kapi za oko, 10 ml	str: 2/4

Nemojte koristiti Vizol S:

- u slučaju preosjetljivosti (alergije) na natrijev hijaluronat ili bilo koji drugi sastojak Vizol S kapi za oko.
U slučaju alergijske reakcije potrebno je odmah prekinuti korištenje proizvoda i javiti se liječniku.

Ostala upozorenja:

- Ako primijetite da su Vizol S bočica ili aplikator oštećeni nemojte koristiti proizvod.
- Kako bi se osigurala sigurna primjena i higijena, svaku bočicu proizvoda trebala bi koristiti samo jedna osoba.
- Nisu poznate interakcije između Vizol S kapi za oko i otopina za kontaktne leće, drugih kapi za oko ili masti za primjenu u oku. Ako koristite još neki proizvod za primjenu u oku, pričekajte najmanje 15 minuta između primjena.

Napomena:

Vizol S 0,4% može trenutno zamagliti vid, stoga za to kratko vrijeme ne vozite automobil i ne upravljajte vozilima i strojevima, već pričekajte da vam slika postane jasna.

SIGURNOST PROIZVODA


Tehnologija aplikatora bočice sadržava filter koji proizvod čini **sigurnim za primjenu** jer sprečava onečišćenje otopine i nakon otvaranja.


Proizvod ne sadrži konzervanse te je time smanjena njegova mogućnost iritacije i oštećenja površine oka. Proizvod se općenito dobro podnosi. Međutim, ako primijetite bilo koju nuspojavu, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

UPUTE ZA UPORABU

Kapi koristiti više puta dnevno, prema potrebi. Pravilnim korištenjem jedna bočica dostatna je za 30 dana. Za dulju primjenu, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Ukapati 1-2 kapi u oko, trepnuti nekoliko puta kako bi se otopina ravnomjerno rasporedila po površini oka. Ne sadržavaju konzervanse te stoga nisu štetne za primjenu u oku.

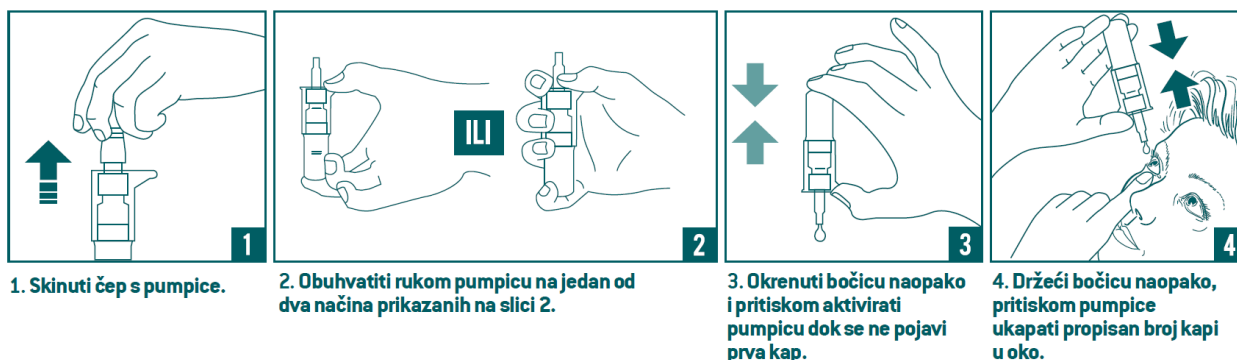

	UPUTA	Travanj 2021.
	Vizol S 0,21% FAST RELIEF Vizol S 0,4% LONG EFFECT kapi za oko, 10 ml	str: 3/4

Isprobajte i ostale kapi za suho oko iz Vizol S linije:

PROIZVOD	NAMJENA	SASTAV	UZROK SMETNJI	NAČIN PRIMJENE	KORIŠTENJE S KONTAKTNIM LEĆAMA	OSJEĆAJ NAKON NANOŠENJA
Vizol S 0,21% FAST RELIEF	Ublažavanje blažih smetnji suhog oka	Natrijev hijaluronat 0,21%	Dugotrajan rad za računalom, umor očiju u vožnji i putovanju, nošenje leća, alergija, strano tijelo, vanjski čimbenici (suhi zrak, dim)	Ukupati 1 – 2 kapi u oko, više puta na dan, odnosno prema potrebi.	Da	Trenutno olakšanje i osvježenje. Dugotrajan osjećaj vlaženja.
Vizol S 0,4% LONG EFFECT	Ublažavanje težih smetnji suhog oka	Natrijev hijaluronat 0,4%	Agresivni vanjski čimbenici (vjetar, sunce, suhi zrak), centralno grijani i klimatizirani prostori, starenje, terapija lijekovima		Ne	Trenutno olakšanje i dugi učinak vlaženja. Dugotrajan osjećaj ugone i podmazivanja. Proizvod može trenutno zamagliti vid.
Vizol S INTENSIVE	Ublažavanje smetnji suhog oka i obnavljanje površine oka	Natrijev hijaluronat 0,15% dekspantenol 2%	Mehanički iritansi oka: nošenje leća, operativni ili dijagnostički zahvati, lijekovi.		Da	Trenutno osvježenje i dugotrajan osjećaj ugone i vlaženja.

PROIZVOĐAČ

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

ROK VALJANOSTI

Otisnut je na pakiranju.

Rok valjanosti nakon otvaranja je 180 dana.

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.

ČUVANJE

Proizvod čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnoj ambalaži.

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

PAKIRANJE

10 ml




DATUM REVIZIJE UPUTE

Travanj, 2021.

Objašnjenje simbola na proizvodu



Pogledati Upute za uporabu

	UPUTA	Travanj 2021.
	Vizol S 0,21% FAST RELIEF Vizol S 0,4% LONG EFFECT kapi za oko, 10 ml	str: 4/4



Proizvođač



Broj serije



Rok valjanosti



CE oznaka



Sterilno, aseptična tehnika obrade



30°C Gornja granica temperature



Upozorenje, pogledajte Upute za uporabu (za važna upozorenja/mjere opreza)

Dodatni simboli na kutiji:

Vizol S 0,21% FAST RELIEF



Trenutno olakšanje simptoma suhog oka kod dugog gledanja u ekrane



Vlaženje i ublažavanje umora očiju u vožnji i putovanju



Ublažavanje nelagode i iritacije oka kod nošenja kontaktnih leća



Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 mjeseci

Vizol S 0,4% LONG EFFECT



Vlaženje i zaštita kod težih smetnji suhog oka



Trenutno olakšanje tegoba iritacije i produljeno djelovanje



Vlaženje i zaštita oka u suhim i klimatiziranim prostorima



Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 mjeseci