	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Travanj, 2021.
	Vizol S ALLERGY kapi za oko, 10 ml	2% Ectoin®

Vizol S ALLERGY
KAPI ZA OKO

Upute za uporabu-pažljivo pročitajte

Pažljivo pročitajte ove informacije prije nego počnete primjenjivati Vizol S ALLERGY. NEMOJTE BACITI OVU UPUTU! Sadrži važne informacije. Ako imate bilo kakvih pitanja o Vizol S ALLERGY kapima za oko, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

SASTAV

Ectoin®, hidrosietil celuloza, natrijev klorid, voda, citratni pufer.

BEZ KONZERVANSA.

NAMJENA

Vizol S ALLERGY izotonične kapi za oko su medicinski proizvod koji se koristi za sprječavanje i ublažavanje simptoma alergijskog konjunktivitisa. Simptomi poput svrbeža, crvenila ili pretjeranog suzenja oka mogu se učinkovito ublažiti.

Unutar 30 sekundi dogodit će se brzo smanjenje simptoma poput svrbeža, suzenja i iritacije oka.

Vizol S ALLERGY kapi za oko štite od štetnog djelovanja alergena i pomažu u procesu obnavljanja nadražene i osjetljive sluznice oka.

Pogodne su za osobe koje nose kontaktne leće, djecu i za osobe koje imaju osjetljive oči.

ŠTO VIZOL S ALLERGY KAPI ZA OKO SADRŽE?

Vizol S ALLERGY kapi za oko sadrže Ectoin®, prirodnu molekulu dobivenu iz mikroorganizama otpornih na ekstremne uvjete. Da bi preživjeli, ti mikroorganizmi proizvode ekstremolite. Ectoin® je dobro istražen ekstremolit koji se danas može upotrijebiti za zaštitu stanica sluznice.


UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Nemojte koristiti Vizol S ALLERGY:

- u slučaju preosjetljivosti (alergije) na Ectoin® ili na bilo koji drugi sastojak Vizol S ALLERGY kapi za oko.
U slučaju alergijske reakcije potrebno je odmah prekinuti korištenje proizvoda.
- ako je proizvod oštećen ili probušen.
- više od 3 mjeseca nakon otvaranja.

Ostale napomene:

- Kako bi se osigurala sigurna primjena i higijena, svaku bočicu proizvoda trebala bi koristiti samo jedna osoba.
- Nema dostupnih podataka o interakcijama između Vizol S ALLERGY kapi za oko i drugih kapi ili masti za primjenu u oku, stoga se ne preporučuje primjena s drugim terapijama za primjenu u oko.

	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Travanj, 2021.
	Vizol S ALLERGY kapi za oko, 10 ml	2% Ectoin®

- Vizol S ALLERGY kapi za oko moraju se čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

SIGURNOST PROIZVODA

Tehnologija aplikatora bočice sadržava filter koji proizvod čini **sigurnim za primjenu** jer sprečava onečišćenje otopine i nakon otvaranja.

Proizvod ne sadrži konzervanse te je time smanjena njegova mogućnost iritacije i oštećenja površine oka.

Proizvod se općenito dobro podnosi. Do sada nisu poznate nuspojave koje se redovito pojavljuju ili koje uporno traju. U izoliranim slučajevima može doći do kratkotrajne iritacije, crvenila oka ili konjunktivitisa. Ako primijetite bilo koju nuspojavu povezanu s primjenom Vizol S ALLERGY kapi za oko, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ako stanje potraje ili se pogorša, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

DODATNE INFORMACIJE

Ako Vam je preporučio Vaš liječnik, Vizol S ALLERGY se može koristiti nakon operacije oka ili traume oka.

Trenutno nema dostupnih podataka o primjeni Vizol S ALLERGY kapi za oko tijekom trudnoće i dojenja. Prije primjene Vizol S ALLERGY kapi za oko posavjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako:

- ste trudni ili dojite
- niste sigurni jeste li trudni ili ne.


Djeci u dobi od 10 godina i mlađoj te bolesnicima koji ne mogu samostalno koristiti Vizol S ALLERGY mora se pomoći prilikom primjene Vizol S ALLERGY kapi za oko.

UPUTE ZA UPORABU


Primijenite Vizol S ALLERGY kako je opisano u ovoj uputi. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije primjene ako niste sigurni. Kapi se mogu koristiti više puta dnevno, prema potrebi. Ukapati 1 – 2 kapi u oko i trepnuti nekoliko puta kako bi se otopina ravnomjerno rasporedila po površini oka.

Ako je potrebno, Vizol S ALLERGY se može koristiti više puta u satu.

Kod prve uporabe potrebna je aktivacija bočice te stoga pritisnite prsten za doziranje nekoliko puta dok držite bočicu okrenutu prema dolje.

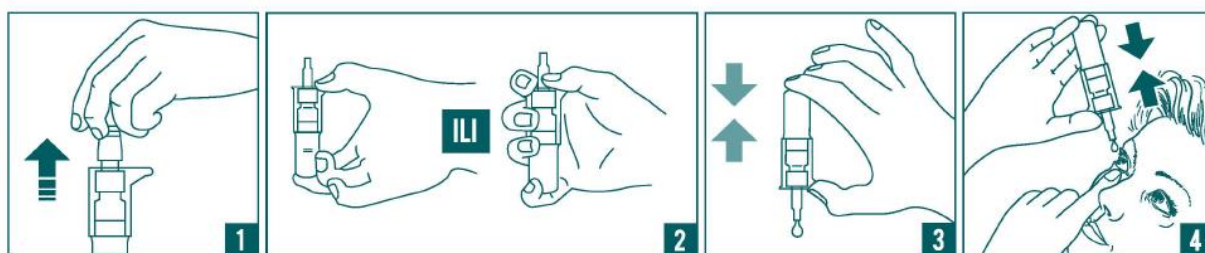

1. Skinuti zaštitnu kavicu s pumpice. Pazite da ništa ne dodirujete vrhom kapaljke.
2. Obuhvatiti rukom pumpicu kao na slici 2.
3. Okrenuti bočicu naopako i pritiskom aktivirati pumpicu dok se ne pojavi prva kap. Nemojte rezati vrh kapaljke.

	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Travanj, 2021.
	Vizol S ALLERGY kapi za oko, 10 ml	2% Ectoin®

4. Držeći bočicu naopako pritiskom pumpice ukapati propisan broj kapi u oko. Izbjegavajte izravan kontakt vrha kapaljke s prstima, očima i kontaktnim lećama. Nakon svake uporabe osušite vrh kapaljke i zatvorite ga zaštitnom kapicom.

NAČIN ČUVANJA

Proizvod čuvati na temperaturi 2°C - 25°C.

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici.

PAKIRANJE

10 ml

ISPROBAJTE I OSTALE KAPI ZA OKO IZ VIZOL S LINIJE:

PROIZVOD	NAMJENA	SASTAV	UZROK SMETNJI	NAČIN PRIMJENE	KORIŠTENJE S KONTAKTNIM LEĆAMA	OSJEĆAJ NAKON NANOŠENJA
Vizol S 0,21% FAST RELIEF	Ublažavanje blažih smetnji suhog oka	Natrijev hijaluronat 0,21 %	Dugotrajan rad za računalom, umor očiju u vožnji i putovanju, nošenje leća, alergija, strano tijelo, vanjski čimbenici (suhi zrak, dim)	Ukupati 1 – 2 kapi u oko, više puta na dan, odnosno prema potrebi.	Da	Trenutno olakšanje i osvježenje. Dugotrajan osjećaj vlaženja.
Vizol S 0,4% LONG EFFECT	Ublažavanje težih smetnji suhog oka	Natrijev hijaluronat 0,4 %	Agresivni vanjski čimbenici (vjetar, sunce, suhi zrak), centralno grijani i klimatizirani prostori, starenje, terapija lijekovima		Ne	Trenutno olakšanje i dugi učinak vlaženja. Dugotrajan osjećaj ugone i podmazivanja. Proizvod može trenutno zamagliti vid.
Vizol S INTENSIVE	Ublažavanje smetnji suhog oka i obnavljanje površine oka	Natrijev hijaluronat 0,15 % dekspantenol 2 %	Mehanički iritansi oka: nošenje leća, operativni ili dijagnostički zahvati, lijekovi		Da	Trenutno osvježenje i dugotrajan osjećaj ugone i vlaženja.

PROIZVOĐAČ

bitop AG Stockumer Str. 28, 58453 Witten, Njemačka

DISTRIBUTER

JGL d.d., Svilno 20, 51000, Rijeka, Hrvatska

Tel: +385 51 546 399


Internetska stranica: www.jgl.hr



DATUM REVIZIJE UPUTE

Travanj, 2021.

Objašnjenje simbola na proizvodu

	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Travanj, 2021.
	Vizol S ALLERGY kapi za oko, 10 ml	2% Ectoin®



Proizvođač



Rok valjanosti



Broj serije



Sterilno, aseptična tehnika obrade



Čuvati na temperaturi od 2°C do 25°C



0197 CE oznaka s identifikacijskim brojem tijela



Pročitajte upute za uporabu



Nemojte primjenjivati oštećene ili probušene proizvode

Dodatni simboli na kutiji:



Štiti od utjecaja alergena



Trenutno olakšanje od tegoba iritacije



Ublažavanje prekomjernog suzenja, svrbeža i crvenila



Pogodan za osobe koje nose kontaktne leće