	UPUTSTVO	April, 2021.
	Vizol S ALLERGY kapi za oči, 10 ml	str: 1/4

**Vizol S ALLERGY
KAPI ZA OČI**

Uputstvo za upotrebu-pažljivo pročitajte

Pažljivo pročitajte ove informacije pre nego što počnete da primenjujete Vizol S ALLERGY. **NE BACAJTE OVO UPUTSTVO!** Sadrži važne informacije. Ako imate bilo kakvih pitanja o Vizol S ALLERGY kapima za oči, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu

SASTAV

Ectoin®, hidroksetil celuloza, natrijum hlorid, voda, citratni pufer.

BEZ KONZERVANSA.

NAMENA

Vizol S ALLERGY izotonične kapi za oči su medicinsko sredstvo koje se koristi za sprečavanje i ublažavanje simptoma alergijskog konjuktivitisa. Simptomi poput svraba, crvenila ili prekomernog suzenja oka mogu se efikasno ublažiti. U periodu od 30 sekundi brzo će se smanjiti simptomi kao što su svrab, suzenje i iritacija oka.

Vizol S ALLERGY kapi za oči štite od štetnog delovanja alergena i pomažu u procesu obnavljanja nadražene i osetljive sluzokože oka.

Pogodne su za osobe koje nose kontaktna sočiva, decu i za osobe koje imaju osetljive oči.

ŠTA SADRŽE VIZOL S ALLERGY KAPI ZA OČI?

Vizol S ALLERGY kapi za oči sadrže Ectoin®, prirodni molekul dobijen iz mikroorganizama otpornih na ekstremne uslove. Da bi preživeli, ovi mikroorganizmi proizvode ekstremolite. **Ectoin® je dobro istražen ekstremolit koji se danas može koristiti za zaštitu ćelija sluzokože.**

UPOZORENJA I MERE OPREZA

Ne koristite Vizol S ALLERGY:


- u slučaju preosetljivosti (alergije) na Ectoin® ili na bilo koji drugi sastojak Vizol S ALLERGY kapi za oči.

U slučaju alergijske reakcije potrebno je odmah prekinuti upotrebu proizvoda.

- ako je proizvod oštećen ili probušen.
- više od 3 meseca nakon otvaranja.

Ostale napomene:

- Kako bi se osigurala bezbedna primena i higijena, svaku bočicu proizvoda trebalo bi da koristi samo jedna osoba.

	UPUTSTVO	April, 2021.
	Vizol S ALLERGY kapi za oči, 10 ml	str: 2/4

- Nema dostupnih podataka o interakciji između Vizol S ALLERGY kapi za oči i drugih kapi ili masti za primenu u oči, zbog toga se ne preporučuje primena sa drugim terapijama za oči.
- Vizol S ALLERGY kapi za oči moraju se čuvati van vidokruga i domašaja dece.

BEZBEDNOST PROIZVODA

Tehnologija aplikatora bočice sadrži filter koji proizvod čini **bezbednim za primenu** jer sprečava onečišćenje rastvora i nakon otvaranja.

Proizvod ne sadrži konzervanse te je time smanjena njegova mogućnost iritacije i oštećenja površine oka. Proizvod se generalno dobro podnosi. Do sada nisu poznata neželjena dejstva koja se redovno pojavljuju ili koja uporno traju. U pojedinačnim slučajevima može se pojaviti kratkotrajna iritacija, crvenilo oka ili konjuktivitis. Ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo povezano sa upotrebom Vizol S ALLERGY kapi za oči, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ako stanje potraje ili se pogorša, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

DODATNE INFORMACIJE

Ako Vam je preporučio Vaš lekar, Vizol S ALLERGY se može koristiti posle operacije oka ili traume oka.

Trenutno nema dostupnih podataka o primeni Vizol S ALLERGY kapi za oči tokom trudnoće i dojenja. Pre primene Vizol S ALLERGY kapi za oči posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako:

- ste trudni ili dojite
- niste sigurni da li ste trudni ili ne.


Deci starosti od 10 godina i mlađoj deci, kao i pacijentima koji ne mogu samostalno da koriste Vizol S ALLERGY treba pružiti pomoć prilikom primene Vizol S ALLERGY kapi za oči.


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Primenite Vizol S ALLERGY kako je opisano u ovom uputstvu. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre primene ako niste sigurni. Kapi se mogu koristiti više puta dnevno, po potrebi. Ukapati 1 - 2 kapi u oko i trepnuti nekoliko puta kako bi se rastvor ravnomerno rasporedio po površini oka.

Ako je potrebno, Vizol S ALLERGY se može koristiti više puta u toku sata.

Kod prve upotrebe potrebna je aktivacija bočice zbog toga pritisnite prsten za doziranje nekoliko puta dok držite bočicu okrenutu prema dole.

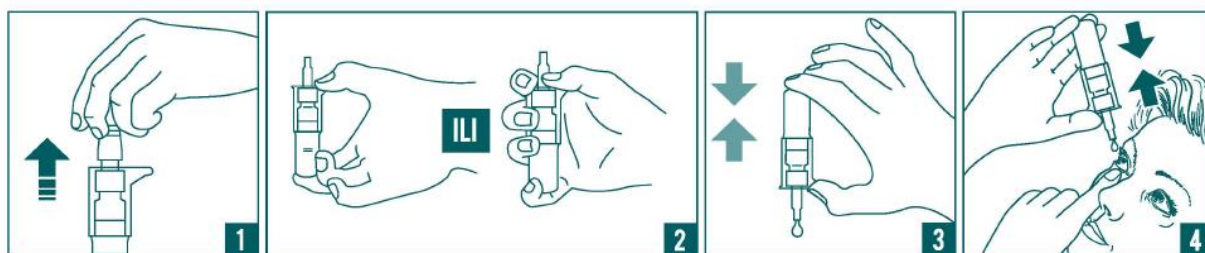

	UPUTSTVO	April, 2021.
	Vizol S ALLERGY kapi za oči, 10 ml	str: 3/4

1. Skinuti zaštitnu kavicu s pumpice. Pazite da ništa ne dodirujete vrhom kapaljke.
2. Obuhvatiti rukom pumpicu kao na slici 2.
3. Okrenuti bočicu naopako i pritiskom aktivirati pumpicu dok se ne pojavi prva kap. Nemojte rezati vrh kapaljke.
4. Držeći bočicu naopako pritiskom pumpice ukapati propisan broj kapi u oko. Izbegavajte direktan kontakt vrha kapaljke sa prstima, očima i kontaktnim sočivima. Nakon svake upotrebe osušite vrh kapaljke i zatvorite ga zaštitnom kavicom.

NAČIN ČUVANJA

Proizvod čuvati na temperaturi 2°C - 25°C.

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka upotrebe navedenog na kutiji i bočici.

PAKOVANJE

10 ml

ISPROBAJTE I OSTALE KAPI ZA OČI IZ VIZOL S LINIJE:

PROIZVOD	NAMENA	SASTAV	UZROK SMETNJI	NAČIN PRIMENE	UPOTREBA SA KONTAKTNIM SOČIVIMA	OSEĆAJ NAKON NANOŠENJA
Vizol S 0,21% FAST RELIEF	Ublažavanje blažih smetnji suvog oka	Natrijum hijaluronat 0,21 %	Dugotrajan rad za računarom, zamor očiju tokom vožnje i putovanja, nošenje sočiva, alergija, strano telo, spoljni faktori (suv vazduh, dim)	Ukapatu 1 – 2 kapi u oko, više puta na dan, odnosno prema potrebi.	DA	Trenutno olakšanje i osveženje. Dugotrajan osećaj vlaženja.
Vizol S 0,4% LONG EFFECT	Ublažavanje težih smetnji suvog oka	Natrijum hijaluronat 0,4 %	Agresivni spoljni faktori (vetar, sunce, suv vazduh), centralno grejani i klimatizovani prostori, starenje, terapija lekovima		NE	Trenutno olakšanje i dug efekat vlaženja. Dugotrajan osećaj prijatnosti i podmazivanja. Proizvod može trenutno zamagliti vid.
Vizol S INTENSIVE	Ublažavanje smetnji suvog oka i obnavljanje površine oka	Natrijum hijaluronat 0,15 % dekspantenol 2 %	Mehanički iritansi oka: nošenje sočiva, operativni ili dijagnostički zahvati, lekovi		DA	Trenutno osveženje i dugotrajan osećaj prijatnosti i vlaženja.

PROIZVOĐAČ

bitop AG Stockumer Str. 28, 58453 Witten, Nemačka


OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK PROIZVOĐAČA

JGL D.O.O. BEOGRAD-SOPOT, Sopot, Milosava Vlajića 110A

Broj rešenja:

515-02-01344-20-004



	UPUTSTVO	April, 2021.
	Vizol S ALLERGY kapi za oči, 10 ml	str: 4/4

DATUM REVIZIJE UPUTSTVA

April, 2021.

Objašnjenje simbola na proizvodu



Proizvođač




Rok upotrebe



Broj serije



Sterilno, aseptična tehnika obrade

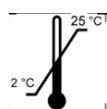

Čuvati na temperaturi od 2°C do 25°C



CE oznaka s identifikacijskim brojem tela



Pre upotrebe pročitati uputstvo



Nemojte primenjivati oštećene ili probušene proizvode

Dodatni simboli na kutiji:



Štiti od uticaja alergena




Trenutno olakšanje od tegoba iritacije



Ublažavanje prekomernog suzenja, svraba i crvenila



Pogodan za osobe koje nose kontaktna sočiva

	UPUTSTVO	April, 2021.
	Vizol S ALLERGY kapi za oči, 10 ml	str: 5/4