

Vizol S ALLERGY KAPLJICE ZA OKO

NAVODILO ZA UPORABO – NATANČNO PREBERITE!

Pred začetkom uporabe izdelka Vizol S ALLERGY natančno preberite navodilo za uporabo. **NAVODILA NE SMETE ZAVREČI!** Vsebuje pomembne podatke. Če imate dodatna vprašanja o Vizol S ALLERGY kapljicah za oko, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

SESTAVA

Ectoin®, hidrosietil celuloza, natrijev klorid, voda, citratni pufer.

BREZ KONZERVANSOV

NAMEN UPORABE:

Izdelek Vizol S ALLERGY izotonične kapljice za oko je medicinski pripomoček, ki se uporablja za preprečevanje in lajšanje simptomov alergijskega konjunktivitisa. Simptome, kot so srbečica, rdeče oči ali prekomerno solzenje oči, se lahko učinkovito lajša.

Znotraj 30 sekund se bodo simptomi, kot so srbečica, solzenje in draženje očesa hitro ublažili.

Vizol S ALLERGY kapljice za oko ščitijo oko pred škodljivim delovanjem alergenov ter pomagajo pri procesu obnove razdražene in občutljive očesne sluznice.

Primerne so za uporabnike kontaktnih leč, za otroke in za ljudi, ki imajo občutljive oči.

KAJ VSEBUJEJO VIZOL S ALLERGY KAPLJICE ZA OKO?

Vizol S ALLERGY kapljice za oko vsebujejo Ectoin®, naravno molekulo, pridobljeno iz mikroorganizmov odpornih na ekstremne pogoje. Da bi preživel, ti mikroorganizmi proizvajajo ekstremolite. **Ectoin® je dobro raziskan ekstremolit, ki ga danes lahko uporabljamo za zaščito celic sluznice.**

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI:

Ne uporabljajte izdelka Vizol S ALLERGY:

- v primeru preobčutljivosti (alergije) na Ectoin® ali katero koli drugo sestavino Vizol S ALLERGY kapljic za oko. V primeru alergijske reakcije je potrebno takoj prenehati z uporabo izdelka.
- če je izdelek poškodovan ali preluknjan.
- po poteku 3 mesecev po odprtju.

Ostala opozorila:

- Da bi zagotovili varno uporabo in ustrezno higieno, mora vsako plastenko izdelka uporabljati le ena oseba.
- Podatki o medsebojnem delovanju Vizol S ALLERGY kapljic za oko z drugimi kapljicami ali mazili za uporabo v očeh niso znani, zato sočasna uporaba z drugim izdelki za očesno uporabo ni priporočljiva.
- Vizol S ALLERGY kapljice za oko je treba shranjevati nedosegljivo otrokom.

VARNOST IZDELKA

Tehnologija aplikatorja plastenke vsebuje filter, ki zagotavlja **varnost uporabe** izdelka, saj preprečuje kontaminacijo raztopine po odprtju.

Izdelek ne vsebuje konzervansov, s čimer je zmanjšana možnost draženja in poškodb očesne površine.

Izdelek uporabniki dobro prenašajo. Podatki o pojavu pogostih neželenih učinkov ali neželenih učinkov, ki ne izzvenijo, niso znani. V redkih primerih lahko pride do kratkotrajnega draženja, rdečih oči ali konjunktivitisa. V kolikor opazite kateri koli neželeni učinek, ki je povezan z uporabo Vizol S ALLERGY kapljic za oko, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se vam stanje ne izboljša ali se poslabša, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

DODATNE INFORMACIJE

Vizol S ALLERGY kapljice za oko lahko uporabljate po operaciji očesa ali po očesni poškodbi, če vam je tako svetoval zdravnik.

Podatki o uporabi Vizol S ALLERGY kapljic za oko med nosečnostjo in dojenjem trenutno niso znani. Pred uporabo Vizol S ALLERGY kapljic za oko se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, če:

- ste noseči ali dojite,
- niste prepričani o nosečnosti.


Otrokom, starim 10 let in mlajšim, ter bolnikom, ki niso sposobni samostojno uporabljati izdelka Vizol S ALLERGY, je treba pri uporabi Vizol S ALLERGY kapljic za oko nuditi pomoč.

NAVODILA ZA UPORABO

Izdelek Vizol S ALLERGY uporabljajte skladno z navodili za uporabo. V kolikor niste prepričani o načinu uporabe, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Kapljice se lahko uporabljajo po potrebi, večkrat na dan. V oko vkapajte 1-2 kapljici ter nekajkrat pomežiknite, da se bo raztopina enakomerno porazdelila po površini očesa.

Če je potrebno, lahko izdelek Vizol S ALLERGY uporabljate tudi večkrat znotraj ene ure.

Pri prvi uporabi je potrebno platenko aktivirati tako, da dozirnik držite navzdol proti tlom ter nanj nekajkrat pritisnete.

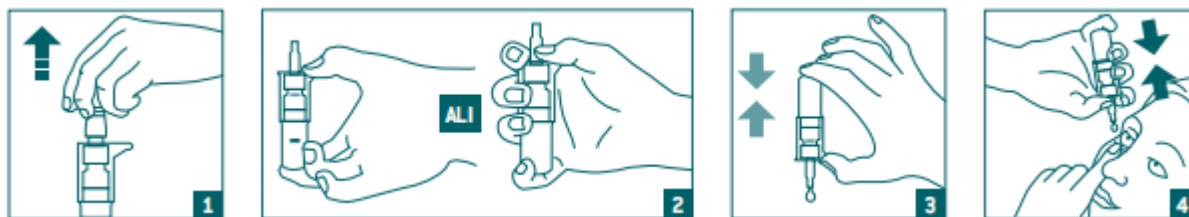

KAPLJICE SE LAHKO UPORABLJAJO NA DVA NAČINA:

1. Odstranite zaščitni pokrovček na dozirniku. Pazite, da se ne dotikate vrha kapalke.
2. Dozirnik primite z roko, kot je prikazano na sliki 2.
3. Obrnite platenko navzdol in s pritiskom aktivirajte dozirnik tako, da se pojavi prva kapljica. Ne režite vrha kapalke.
4. Platenko držite obrnjeno navzdol ter s pritiskom na dozirnik vkapajte predpisano število kapljic v oko. Izogibajte se dotikanju vrha kapalke s prsti, očmi in kontaktnimi lečami. Po vsaki uporabi posušite vrh kapalke in ga zaščitite z zaščitnim pokrovčkom.

POSKUSITE TUDI OSTALE KAPLJICE ZA OKO VIZOL S LINIJE:

IZDELEK	NAMEN UPORABE	SESTAVA	VZROK MOTNJE	NAČIN UPORABE	UPORABA S KONTAKTNI MI LEČAMI	OBČUTEK PO UPORABI
Vizol S 0,21 % FAST RELIEF	Lajšanje blagih težav suhega očesa	Natrijev hialuronat 0,21 %	Dolgotrajno delo za računalnikom, utrujenost oči med vožnjo in potovanjem,, nošenje leč, alergija, tujek, zunanji vzroki (suh zrak, dim).	V oko vkapajte 1–2 kapljici večkrat na dan oziroma po potrebi.	DA	Takojšnje olajšanje in takojšnja osvežitev Dolgotrajen občutek vlaženja.
Vizol S 0,4 % LONG EFFECT	Lajšanje večjih težav suhega očesa	Natrijev hialuronat 0,4 %	Agresivni zunanji vzroki (veter, sonce, suh zrak), centralno ogrevani in klimatizirani prostori, staranje, terapija z zdravili.		NE	Takojšnje olajšanje in dolgotrajen občutek ugodja in mazljivosti. Izdelek lahko prehodno zamegli vid.
Vizol S INTENSIVE	Lajšanje težav suhega očesa in obnavljanje površine očesa	Natrijev hialuronat 0,15 % dekspantenol 2 %	Mehanski dražljaji očesa: nošenje leč, operativni ali diagnostični posegi, zdravila.		DA	Takojšnja osvežitev in dolgotrajen občutek vlaženja.

SHRANJEVANJE

Izdelek shranjujte pri temperaturi 2 °C - 25 °C.

Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in platenki.

PAKIRANJE

10 ml

PROIZVAJALEC

bitop AG Stockumer Str. 28, 58453 Witten, Nemčija

DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO

Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Ljubljana, Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana, Slovenija

CE₀₁₉₇

DATUM REVIZIJE NAVODILA ZA UPORABO

april 2021

POJASNILO SIMBOLOV NA IZDELKU



Proizvajalec



Rok uporabnosti



Številka serije



Sterilno, obdelano z aseptično tehniko



Shranjujte pri temperaturi od 2 °C do 25 °C



CE oznaka z identifikacijsko številko



Preberite navodilo za uporabo



Ne uporabljajte poškodovanega ali preluknjanega izdelka

Dodatni simboli na škatli:



Ščiti pred vplivi alergenov



Trenutno lajšanje težav zaradi draženja



Blaži prekomerno solzenje, srbečico in redečico



Primeren za uporabnike kontaktnih leč