

ИНТИМДІК ГИГИЕНАҒА АРНАЛҒАН ЫЛҒАЛДАНДЫРУШЫ ГЕЛЬ

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік: RU.77.99.32.001.E.002531.06.16 16.06.2016 ж. берілген

Құрамы

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Potassium Sorbate, Lactic Acid.

Қолдану саласы

Қынап пен сарпайдың құрғап кетуі – барлық жастағы көптеген әйелдерді толғандырып отырған мәселе. Бұл мәселеге кезіккен әйелдердің саны тұрақты түрде артуда.

Шырышты қабықтың құрғауы жыныс аумағында микрожарықшақтардың пайда болуына, жайсыздыққа, қызуға және әсіресе жыныстық қатынастар кезінде, ауыру сезімінің пайда болуына әкеледі, бұл жыныстық өмірдің сапасын күрт төмендетеді.

Қынап ылғалдылығының жетіспеушілігі бірқатар себептерге байланысты болуы мүмкін:

- етеккір үзілісі кезеңі, бұл кезде аналық жыныс гормондарының саны төмендейді (жасы ұлғайған әйелдерде постклимактериялық кезеңде жиі кездесетін жағдай);
- кейбір медициналық препараттарды, соның ішінде гормондық контрацептивтерді үнемі қолдану;
- антибиотиктерді және қышымаға қарсы препараттарды қолдану;
- созылмалы аурулар (мысалы, гипотиреоз, қант диабеті);
- гинекологиялық операциялардан кейінгі жағдай;
- физикалық және психологиялық жүктемелер;
- күйзелістер;
- шаршаңқылық, қанағаттанбаушылық.

Вагилак® - интимдік гигиенаға арналған ылғалдандырушы гель шырышты қабықтың құрғақтығын тез және тиімді жоюға және жыныстық өмірдің сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Гель табиғи майланудың жетіспеушілігін жояды, құрғақтықтан пайда болатын жайсыздық сезімін кетіреді және жыныс жолдарын ұзақ және оңтайлы ылғалданумен қамтамасыз етеді. Шырышты қабыққа жұмсақ және қауіпсіз әсер етеді, оның зақымдануына кедергі болады және қайта қалпына келу үдерісіне ықпал етеді. Гельдің құрамына кіретін сүт қышқылы рН-тің оңтайлы деңгейін ұстауға және интимдік жерлердің табиғи микрофлорасын сақтауға көмектеседі.

Қасиеттері

- интимді аумақтағы құрғақтықты тез кетіреді;
- шырышты қабықты ұзақ уақытқа ылғалдандырады;
- құрамында қынаптың рН табиғи деңгейін және микрофлорасын қолдау үшін қажетті сүт қышқылы бар;
- тез сіңеді, киімде із қалдырмайды;
- латекспен үйлесімді, құрамында оны күйрететін заттар жоқ;
- құрамында хош иістендірілген және майлы қосындылары жоқ;
- күнделікті интимдік гигиена жасау үшін пайдалануға болады.

Қолданылуы

- әйелдердің жыныс жолдарының шырышты қабықтары құрғап кеткен жағдайларда, әсіресе пери- және етеккір үзілісі кезеңдерінде;
- гинекологиялық қабыну және дисбиотикалық ауруларды кешенді түзетуде қосымша құрал ретінде;
- антибактериялық, қышымаға қарсы препараттарды қабылдағаннан кейін;
- гормондық контрацептивтерді үнемі пайдалану фонында;
- күнделікті интимдік гигиена үшін;
- диагностикалық гинекологиялық қозғалыстар жасау кезінде шырышты қабықтың жарақаттануының алдын алу.

Қолдану тәсілі

Вагилак® гелінің аздаған мөлшерін таза саусағыңызға қысып шығарып алыңыз да, интимдік аумаққа жағыңыз.

Гельді қынапқа тереңдете енгізу үшін қоса берілген аппликаторды пайдаланыңыз. Аппликаторды толтырып алу үшін оны түтікшенің тесігіне жақындатып, гельдің шамалы аздаған мөлшерін шығарыңыз. Аппликаторды түтіктен ажыратып, оны қынапқа енгізіңіз де, гельді қысып шығарыңыз.

Аппликаторды шексіз көп рет пайдалануға болады. Пайдаланып болғаннан кейін аппликаторды жылы сумен тазалап жуып, жақсылап сүрту керек және құрғақ жерде сақтау керек.

Гельді сондай-ақ жұқа қабат етіп еркектің жыныстық мүшесіне немесе мүшеқаптың сыртына жағуға болады, сонымен бірге ректальдық термометрлер мен клизмаларды енгізуді жеңілдету үшін де пайдалануға болады.

Жағымсыз әсерлері

Гельдің қосындылары жергілікті пайдаланған кезде ағзаға жүйелі әсер көрсетпейді. Кейде аллергиялық әсер пайда болуы мүмкін.

Қолдануға болмайтын жағдайлар

Компоненттерге деген жеке төзімсіздік.

Айрықша нұсқаулар

Вагилак® ылғалдандырушы гелі контрацептив болып табылмайды!

Шығарылу түрі

Түтіктегі 50 г гель, аппликаторымен бірге.

Сақтау шарттары

25 °C-ден аспайтын температурада, тығыз жабылған түтікте, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.

Жарамдылық мерзімі

2 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін өнімді қолдануға болмайды.

Өндіруші

ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.қ., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.

Қазақстан Республикасында сапа бойынша шағымдарды қабылдайтын

ұйым: Алматы қ., Марков к-сі, 61/1 үй, №2 құрылым, №122 офис, тел.: +7 (727) 313 20 51