

АКВА МАРИС®



Инструкция-вкладыш по применению для пациентов

Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®»:

1. Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» в пластиковом футляре с четырьмя сменными насадками.
2. Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» в картонной коробке с тремя сменными насадками.

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ:

№ РЗН 2017/6327 от 21.02.2024 г.

КОМПОНЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

- **Центральный жесткий корпус** для удерживания аспиратора;
- **Гибкая трубка**, позволяющая облегчить движения при проведении процедуры;
- **Мундштук** для аспирации.

Сменная одноразовая насадка:

- **Сменная одноразовая насадка** с наконечником анатомической формы, который вставляется в носовой ход ребенка;
- **Абсорбирующий фильтр** для удерживания выделений из носа.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» предназначен для удаления слизистых выделений из носа у детей при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Медицинское изделие предназначено для удаления слизистых выделений из носа у детей. Его применение показано при гриппе, простуде, синусите и других инфекциях, которые вызывают насморк. Таким образом, назальный аспиратор позволяет обеспечить ребенку свободное дыхание.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицинское изделие используется каждый раз, когда у ребенка наблюдаются излишние слизистые выделения из носа. Перед использованием назального аспиратора рекомендуется промыть нос раствором морской воды.



1 Положить ребенка на спину на безопасную и удобную поверхность.



2 Присоединить сменную насадку к центральной части корпуса аспиратора (см. схему изделия).



3 Взять мундштук в рот, вставить наконечник в один из носовых ходов ребенка и осторожно втягивать ртом воздух через мундштук. Абсорбирующий фильтр насадки будет удерживать выделения, препятствуя их попаданию в аспирационную трубку, таким образом, любое проглатывание выделений исключено.

Повторить процедуру для другого носового хода.



4 Отсоединить использованную насадку и выбросить ее.

УСТРОЙСТВО НАЗАЛЬНОГО АСПИРАТОРА:



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Известные противопоказания отсутствуют.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

При применении в соответствии с инструкцией побочные действия не выявлены.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Транспортировать и хранить медицинское изделие в неповрежденных упаковочных коробках, с защитой от прямого солнечного света, при температуре от 0°C до 25°C, относительной влажности воздуха 35-85%, атмосферном давлении 70-160 кПа.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ:

После окончания срока эксплуатации медицинские изделия утилизируются в соответствии с действующим законодательством РФ (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»);

Использованные насадки могут быть биологически опасными. Их утилизация осуществляется по классу Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Утилизацию неиспользованных насадок и аспиратора назального следует осуществлять по классу А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 (аналогично бытовым отходам).

ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia, Tel./Fax +385 51 546 124
ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИИ а.о. Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия, Тел./Факс: +385 51 546 124

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

PHARMALINK, S.L. (ФАРМАЛИНК, С.Л.),
Avda. Universitat Autònoma 13 - Parc Tecnològic del Valles 08290 Cerdanyola del Valles (Barcelona), Spain.
Проспект Университат Аутонома, 13 - Технологический Парк дель Вальес 08290 Серданыола-дель-Вальес (Барселона), Испания.

Адрес места производства:

PHARMALINK, S.L., CTRA. DE VALLS TV-2034, KM 6 - 43886 VILABELLA (TARRAGONA), SPAIN.
ФАРМАЛИНК, С.Л., КТРА. ДЕ ВАЛЬС ТВ-2034, КМ 6 - 43886 ВИЛАБЕЛЬЯ (ТАРРАГОНА) ИСПАНИЯ.

Претензии к качеству следует направлять в адрес Общества с ограниченной ответственностью «ЯДРАН» (ООО «ЯДРАН»): 119330, г. Москва, Ломоносовский проспект, д.38, оф. 30. Тел.: +7 (495) 970-18-82.

Внимание! В данном документе представлены только ОСНОВНЫЕ сведения, все дополнительные параметры содержатся в Инструкции по применению для специалистов с медицинским образованием и также могут быть предоставлены по запросу.