

AQUA MARIS® Baby

100% naravno pršilo za nos

Izotonična morska voda iz Jadrana bogata s solmi in oligoelementi izpira bakterije, viruse ter nečistoče iz otrokovega nosu.

Sestava

Raztopina vsebuje morsko vodo iz jadranskega morja bogato s solmi in oligoelementi. V raztopini prisotni oligoelementi imajo pomembno vlogo pri vzdrževanju normalne funkcije nosne sluznice kar omogoča prehodnost zgornjih dihalnih poti.

Brez konzervansov.

Pakiranje

50 ml raztopine v vsebniku z mikro razpršilko, ki je posebno prilagojena otroškemu nosku.

150 ml raztopine v vsebniku z mikro razpršilko, ki je posebno prilagojena otroškemu nosku.

Namen uporabe

Dihanje skozi nos je edini pravilni način dihanja. Pravilno dihanje je pomembno za otrokovo rast in razvoj. Zato je potrebno paziti na otrokovo nosno higieno že od rojstva dalje. Suh nos, nakopičene nečistoče, izločki ali otečena sluznica zmanjšujejo prehodnost nosu in pri otroku izzovejo nemir, jokavost in razdražljivost ter s tem onemogočajo mirno spanje in hranjenje. Zamašen nos med prehladom ali alergijo lahko vpliva na zdravje celotnega dihalnega sistema.

Morska voda bogata s solmi in oligoelementi blagodejno deluje na nosno sluznico ter podpira naravne mehanizme njenega čiščenja.

Kdaj in kako uporabljati Aqua Maris® Baby pršilo za nos?

Aqua Maris® Baby s posebnim aplikatorjem, prilagojenim nosnicam novorojenčkov, olajša odstranjevanje nakopičenih nosnih izločkov, odstranjuje infektivne delce, prah, alergene in nečistoče. Na ta način odmaši otroški nasek, istočasno ga navlaži in obnovi nosno sluznico.

Aqua Maris® Baby pršilo za nos se priporoča:

- za vsakodnevno higieno nosu,
- pred dojenjem ali hranjenjem po steklenički,
- med prehladom in alergijami,
- kot pomoč pri vnetju ušes ob terapiji, ki jo predpiše zdravnik,
- pri suhosti nosne sluznice, ki je posledica bivanja v klimatiziranih ali ogrevanih prostorih,
- pred uporabo zdravil (kapljic ali pršil) za nos.

Aqua Maris® Baby pršilo za nos razpršite v vsako nosnico 2-6 krat dnevno, po potrebi tudi pogosteje.

Po uporabi aplikator izperite in ga osušite.

Za mehčanje in odstranjevanje večjih količin nečistoč in nosnih izločkov iz nosne votline, je potrebno Aqua Maris® Baby obilno razpršiti v vsako nosnico. Postopek lahko ponavljate dokler se vsebina dovolj ne zmehča, da jo lahko odstranite iz nosu.

Ker Aqua Maris® Baby podpira fiziološko stanje sluznice in nima sistemskih učinkov, je primeren od otrokovega rojstva dalje. Primeren je za vsakodnevno uporabo. Iz higienskih razlogov naj vsak izdelek uporablja le ena oseba.

Opozorilo

Zunanji vsebnik je napolnjen z inertnim plinom (dušikom), ki ne prihaja v stik z raztopino. Posoda je pod tlakom, lahko poči pri segrevanju: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Hraniti ločeno od vročine, isker, odprtega ognja, vročih površin. Kajenje prepovedano. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F.

Shranjujte nedosegljivo otrokom!

Ne uporabljajte izdelka po izteku roka uporabnosti.

Proizvajalec

JGL d.d, Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvaška

Distributer za Slovenijo:

Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Ljubljana, Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana, Slovenija

Datum revizije navodil za uporabo:

junij 2022

Pojasnilo simbolov na izdelku:



Preberite navodila za uporabo



Proizvajalec



Rok uporabnosti



Številka serije



CE oznaka

3

Skladnost s pravilnikom o aerosolnih razpršilnikih



morje

brez

Izdelki Aqua Maris dokazano ne vsebujejo mikroplastike

