

	BESEDILO NAVODILA ZA UPORABO	JUNIJ 2021
	LACTOGYN gel	str: 1/2

LACTOGYN gel

Sestava

Prečiščena voda, propilenglikol, hidroksietilceluloza, kalijev sorbat, mlečna kislina.

Pakiranje

50 g gela v tubi z nanašalnikom.

NAMEN IN NAČIN UPORABE

Vaginalni gel Lactogyn je sredstvo, ki pospeši vlaženje spolovila. Gel preprečuje nelagoden občutek, ki ga povzroča suha nožnica ter zagotavlja njeno dolgotrajno in optimalno vlažnost. Je nežen, njegova uporaba ni škodljiva.

Vzroki za suhost območja spolovil so različni. Suhost se običajno pojavlja v klimakteriju, ko se pri ženskah zmanjša količina ženskih hormonov v telesu, pojav je pogost tudi v obdobju po meniju in pri starejših ženskah. Vendar suhost nožnice in zunanega spolovila ni redek pojav niti pri mlajših ženskah, običajno se pojavi kot posledica različnih telesnih in duševnih pritiskov, nezadovoljstva in močnega stresa. Zaradi suhosti spolovila in morebitnih bolezenskih znakov, ki se ob tem pojavijo, imajo lahko ženske med spolnim odnosom neprijeten občutek. V nasprotju s tem pa lahko intimni odnosi spet postanejo prijetni in zadovoljivi, če nožnico namažemo z gelom.

Suhost nožnice in zunanega predela spolovila izgine takoj po nanosu gela Lactogyn, hkrati pa dobite občutek vlažnosti in gladkosti. Gel ne pušča madežev na oblačilih in ga zlahka izperete z vodo.

Na čist prst stisnite malo gela Lactogyn in ga nanesite po spolovilu.

Za nanašanje gela globlje v nožnico uporabite priloženi nanašalnik, katerega polnite tako, da ga pritrdite na odprtino tube in vanj iztisnete malo gela. Nanašalnik snamite s tube, ga vstavite v nožnico in iztisnite vanjo gel.

Namenjen je za večkratno uporabo. Po uporabi ga operite v mlačni vodi, dobro obrišite in hranite na suhem mestu.

Lactogyn gel lahko v tankem sloju nanesete tudi na moški ud ali na zunanjo stran kondoma, uporaben pa je tudi za lažje vstavljanje tamponov, rektalnih termometrov in klistirja.

OPOZORILO

Uporaba gela ne draži kože. V primeru preobčutljivosti za gel se posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

ROK UPORABNOSTI

Je natisnjen na ovojnini. Gela ne smete uporabljati po pretečenem roku uporabnosti.

SHRANJEVANJE

Izdelek shranjujte pri temperaturi do 25 °C, tubo dobro zaprite. Shranjujte nedosegljivo otrokom.

	BESEDILO NAVODILA ZA UPORABO	junij 2021
	LACTOGYN gel	str: 2/2

PROIZVAJALEC

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska.

DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO

Jadran - galenski laboratorij d.o.o. Ljubljana, Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana, Slovenija

DATUM REVIZIJE NAVODILA ZA UPORABO: november 2016



POJASNILO ZNAKOV NA IZDELKU:



25°C Shranjujte pri temperaturi do 25 °C



Preberite navodila za uporabo



Proizvajalec



Rok uporabnosti



Številka serije



CE oznaka