

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapi za oko su namijenjene za ublažavanje simptoma umjerenog do izrazito suhog oka zbog nedostatka lipidnog sloja suznog filma, što dovodi do isparavanja vodenog sloja suznog filma i suhoće oka.

SASTAV

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE su sterilne kapi za oko, emulzija koja sadrži natrijev hijaluronat 0,15%, ricinusovo ulje 0,25%, tokoferol (vitamin E TPGS), glicerol, polisorbit 80, makrogol glicerol hidroksistearat, trometamol, klorovodičnu kiselinu, dinatrijev edetat, natrijev klorid, pročišćena voda.

Ulje ricinusa, vitamin E TPGS i makrogol glicerol hidroksistearat formiraju kompleks dugolančanih triglicerida (LCT).

BEZ KONZERVANSA.

BEZ FOSFATA.

NAMJENA

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapi za oko namijenjene su ublažavanju simptoma umjerenog do izrazito suhog oka. Obnavljaju lipidni sloj suznog filma, stabiliziraju suzni film i optimalno vlaže površinu oka.

Bez obzira je li suhoća oka uzrokovana nedostatkom vodenog, ili lipidnog sloja suza, osušena površina oka uzrokuje neugodne simptome koji se s vremenom pogoršavaju, ako ih se ne liječi adekvatno. Suhoća oka se može manifestirati kao osjećaj pijeska ili stranog tijela u oku, kao iritacija, peckanje, svrbež, pretjerano suženje i crvenilo oka.

Suhoća oka povezana je sa starenjem, uporabom određenih lijekova, hormonalnim promjenama, naprezanjem oka (nošenje kontaktnih leća), raznim utjecajima okoline (suhi zrak, vjetar, klimatizacija) i brojnim rizicima modernog načina života kao što je dugotrajno gledanje ekrana (računala, mobilni telefoni, TV), kada se značajno smanjuje broj treptaja u minuti, a time i optimalno izlučivanje suza.

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapi za oko sadrže nano-kapljice **LCT kompleksa** (formirane od ricinusovog ulja, vitamina E i surfaktanta) **za obnavljanje i zaštitu lipidnog sloja suza, koji je prirodna barijera isparavanju vlage.**

Natrijev hijaluronat sadržan u Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapima za oko učinkovito vlaži i trenutno ublažava simptome suhoće oka.

Pogodno za sve vrste suhog oka.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Nemojte koristiti Vizol S HYDRO LIPID BALANCE:

- u slučaju preosjetljivosti (alergije) na bilo koji sastojak proizvoda.

U slučaju alergijske reakcije potrebno je odmah prekinuti korištenje proizvoda i javiti se liječniku.

Ostala upozorenja:

- Ako primijetite da su bočica proizvoda ili aplikator oštećeni nemojte koristiti proizvod.
- Kako bi se osigurala sigurna primjena i higijena, svaku bočicu proizvoda trebala bi koristiti samo jedna osoba.
- Nisu poznate interakcije između Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapi za oko i drugih kapi za oko ili masti za primjenu u oku. Ako koristite još neki proizvod za primjenu u oku, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja.

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapi za oko namijenjene su za primjenu u odraslih osoba starijih od 18 godina.

Za pedijatrijsku primjenu, konzultirajte se sa zdravstvenim radnikom prije primjene ovih kapi za oko, kako biste bili sigurni da su prikladne za Vaše dijete.

Napomena:

Proizvod može uzrokovati blago zamućenje vida. U tom slučaju, preporučuje se da tijekom kratkog perioda vremena izbjegavate vožnju automobila ili rukovanje strojevima dok Vam vid ponovno ne postane jasan.

SIGURNOST PROIZVODA

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapi za oko su **bez konzervansa i bez fosfata**, što smanjuje mogućnost iritacije i oštećenja površine oka.

Tehnologija aplikatora bočice sadržava filter koji proizvod čini sigurnim za primjenu jer sprječava onečišćenje otopine i **čuva sterilnost sadržaja čak 6 mjeseci nakon otvaranja**.

Proizvod se općenito dobro podnosi. Međutim, ako primijetite bilo koju nuspojavu, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

UPUTE ZA UPORABU

Uvijek koristite Vizol S HYDRO LIPID BALANCE prema ovim uputama za uporabu. Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uporabe ako niste sigurni.

Ako liječnik nije drugačije propisao, ukapajte 1-2 kapi u oči, više puta dnevno, prema potrebi.

Trepnuti nekoliko puta kako bi se otopina ravnomjerno rasporedila po površini oka.

Izbjegavajte kontakt vrha kapaljke s površinom oka ili bilo kojom drugom površinom.


Prije prve uporabe potrebno je aktivirati bočicu. U tu svrhu uklonite čep s pumpe, okrenite bočicu naopako i **pritisnite aplikator nekoliko puta dok se ne pojavi prva kap**.

Informacije za korisnike kontaktnih leća


Proizvod je kompatibilan s kontaktnim lećama.

Upute za uporabu:


1. Temeljito operite ruke.
2. Uklonite čep s pumpice (slika 1).
3. Držite pumpicu rukom kao što je prikazano na slici 2.
4. Okrenite bočicu naopako i pritišćite aplikator dok se ne pojavi prva kap (slika 3).
5. S nagnutom glavom prema nazad, pažljivo ukapajte 1 kap u oko (slika 4).
6. Vratite čep na pumpicu.

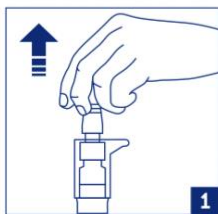


1. Skinuti čep s pumpice.

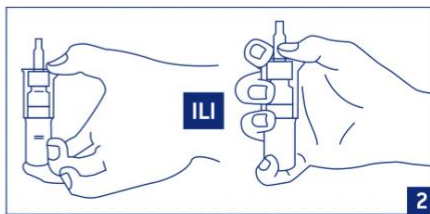

2. Obuhvatiti pumpicu sa palcem na čepu i kažiprstom ili malim prstom na dnu bočice.

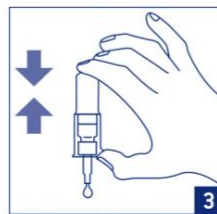

3. Okrenuti bočicu naopako i pumpicu aktivirati dok se ne pojavi prva kap.

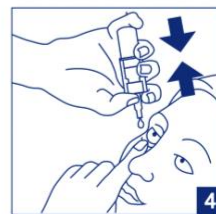

4. Držeći bočicu naopako, pritiskom pumpice ukapati propisan broj kapi u oko.

PROIZVOĐAČ

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

ROK VALJANOSTI

Otisnut je na pakiranju.
Rok valjanosti nakon otvaranja je 6 mjeseci.
Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.

ČUVANJE

Proizvod čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnoj ambalaži.
Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

PAKIRANJE

10 ml

DATUM REVIZIJE UPUTE

Lipanj, 2024.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU

SIMBOL	OBJAŠNJENJE
	Pogledajte Upute za uporabu
	Medicinski proizvod
	Proizvođač
	Rok valjanosti
	Broj serije
	Sterilno, aseptična tehnika obrade
	Čuvati na temperaturi do 30°C
	Jedan pacijent, višekratna upotreba
	Ne koristiti oštećeni ili probušeni proizvod
	Upozorenje, pogledajte Upute za uporabu (za važna upozorenja/mjere opreza)
	CE oznaka

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE	
Dodatni simboli na kutiji:	 Vlaženje i zaštita umjerenog do izrazito suhog oka
	 Obnavljanje i stabilizacija lipidnog i vodenog sloja suznog filma
	 Obnavljanje lipidnog sloja suza, koji je prirodna barijera protiv isparavanja vlage
	 Rok valjanosti nakon otvaranja je 6 mjeseci