

LACTOGYN[®] gel

RS

Sastav

Voda, prečišćena; propilenglikol; hidroksietilceluloza; kalijum sorbat; mlečna kiselina.

Pakovanje

50 g gela u tubi sa aplikatorom.

Namena i način upotrebe

Lactogyn vaginalni gel je medicinsko sredstvo kojim se poboljšava vlaženje intimnog područja. Gel sprečava neprijatan osećaj uzrokovan suvoćom i osigurava dugotrajnu i optimalnu vlažnost vagine. Nežan je i nije štetan pri primeni.

Uzroci suvoće intimnog područja mogu biti različiti. Obično se javlja u periodu klimakterijuma kada se smanjuje količina ženskih polnih hormona, a česta je u postmenopauzi i kod starijih žena. Međutim, suvoća nije retka ni kod mladih žena, a nastaje uglavnom kao posledica raznih telesnih i psihičkih pritisaka, nezadovoljstva i intenzivnog stresa. Zbog suvoće i simptoma koji se javljaju, mogu nastati neugodnosti prilikom polnog odnosa. Nasuprot tome, ukoliko je područje vagine podmazano gelom, olakšava se intimni kontakt i postiže zadovoljstvo.

Odmah nakon nanošenja Lactogyn gela, suvoća vagine i intimnog područja nestaje, a ostaje osećaj vlažnosti i glatkoće. Gel ne ostavlja tragove na odeći i lako se ispira vodom.

Istisnite malo Lactogyn gela na čisti prst i nanesite ga na intimno područje.

Za nanošenje gela dublje u vaginu koristi se priloženi aplikator. Za punjenje aplikatora potrebno ga je pričvrstiti na otvor tube i istisnuti malo gela. Aplikator skinuti s tube i nakon što se umetne u vaginu, istisnuti gel. Može se koristiti neograničeni broj puta, prema potrebi. Nakon primene aplikator treba oprati u mlakoj vodi, dobro obrisati i čuvati na suvom mestu.

Lactogyn gel se može naneti i na muški polni organ, ili na spoljašnju površinu kondoma, ili koristiti za olakšavanje umetanja tampona, rektalnih termometara i klistira.

Napomena

Gel ne izaziva iritaciju tokom primene, ali u slučaju pojačane osetljivosti, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Proizvođač

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska

Ovlašćeni predstavnik proizvođača

JGL D.O.O. BEOGRAD-SOPOT, Milosava Vlajića 110A, Sopot.

Broj rešenja o registraciji:

515-02-01998-22-004

Rok upotrebe

Otisnut je na pakovanju. Proizvod ne koristiti nakon isteka roka upotrebe.

Način čuvanja

Proizvod čuvati na temperaturi do 25°C u dobro zatvorenoj tubi.

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Datum revizije uputstva

Jul 2017.

Objašnjenje simbola na proizvodu

 25°C Čuvati na temperaturi do 25°C

 Pre upotrebe pročitati uputstvo

 Proizvođač

 Broj serije

 Rok upotrebe

 CE oznaka

