

KAPI ZA OČI

UPUTSTVO ZA UPOTREBU – PAŽLJIVO PROČITAJTE

Pažljivo pročitajte ove informacije pre nego što počnete da primenjujete Vizol S ALLERGY. NE BACAJTE OVO UPUTSTVO! Sadrži važne informacije. Ako imate bilo kakvih pitanja o Vizol S ALLERGY kapima za oči, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

SASTAV

Ectoin®, hidroksietil celuloza, natrijum hlorid, voda, citratni pufer.

BEZ KONZERVANSJA

NAMENA

Vizol S ALLERGY izotonične kapi za oči su medicinsko sredstvo koje se koristi za sprečavanje i ublažavanje simptoma alergijskog konjunktivitisa. Simptomi poput svraba, crvenila ili prekomernog suzenja oka mogu se efikasno ublažiti. U periodu od 30 sekundi brzo će se smanjiti simptomi kao što su svrab, suzenje i iritacija oka.

Vizol S ALLERGY kapi za oči štite od štetnog delovanja alergena i pomažu u procesu obnavljanja nadražene i osetljive sluzokože oka.

Pogodne su za osobe koje nose kontaktna sočiva, decu i za osobe koje imaju osetljive oči.

ŠTA SADRŽE VIZOL S ALLERGY KAPI ZA OČI?

Vizol S ALLERGY kapi za oči sadrže Ectoin®, prirodni molekul dobijen iz mikroorganizama otpornih na ekstremne uslove. Da bi preživeli, ovi mikroorganizmi proizvode ekstremolite. Ectoin® je dobro istražen ekstremoliti koji se danas može koristiti za zaštitu ćelija sluzokože.

UPOZORENJA I MERE OPREZA

Ne koristite Vizol S ALLERGY:

- u slučaju preosetljivosti (alerije) na Ectoin® ili na bilo koji drugi sastojak Vizol S ALLERGY kapi za oči.
- U slučaju alergijske reakcije potrebno je odmah prekinuti upotrebu proizvoda.
- ako je proizvod oštećen ili probušen.
- više od 3 meseca nakon otvaranja.


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Primenite Vizol S ALLERGY kako je opisano u ovom uputstvu. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre primene ako niste sigurni. Kapi se mogu koristiti više puta dnevno, po potrebi.


Ukapati 1 - 2 kapi u oko i trepnuti nekoliko puta kako bi se rastvor ravnomerno rasporedio po površini oka.

Ako je potrebno, Vizol S ALLERGY se može koristiti više puta u toku sata.

Kod prve upotrebe potrebna je aktivacija bočice zbog toga pritisnite prsten za doziranje nekoliko puta dok držite bočicu okrenutu prema dole.

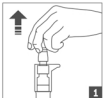

1. Skinite zaštitnu kapicu sa pumpe. Pažite da ništa ne dodirujete vrhom kapaljke.

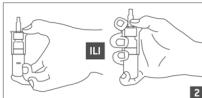

2. Obuhvatiti rukom pumpicu kao na slici 2.



3. Okrenuti bočicu naopako i pritisnuti pumpicu dok se ne pojavi prva kap. Nemojte rezati vrh kapaljke.



4. Držeci bočicu naopako pritisnuti pumpicu ukapati propisan broj kapi u oko. Izbegavajte direktan kontakt vrha kapaljke sa prstima, očima i kontaktnim sočivima. Nakon svake upotrebe osušite vrh kapaljke i zatvorite ga zaštitnom kapicom.

ISPROBAJTE I OSTALE KAPI ZA OČI IZ VIZOL S LINIJE:

PROIZVOD	NAMENA	SASTAV	UZROK SMETNJI	NAČIN PRIMENE	UPOTREBA SA KONTAKTNIM SOČIVIMA	OSEĆAJ NAKON NANOŠENJA
Vizol S 0,21% FAST RELIEF	Ublažavanje blažih smetnji suvog oka	Natrijum hijaluronat 0,21%	Dugotrajna rad za računarom, zamor očiju tokom vožnje i putovanja, nošenje sočiva, alergija, strano telo, spoljni faktori (suvi vazduh, dim)		Da	Trenutno olakšanje i osveženje. Dugotrajna osećaj vlaženja.
Vizol S 0,4% LONG EFFECT	Ublažavanje težih smetnji suvog oka	Natrijum hijaluronat 0,4%	Agresivni spoljni faktori (vetar, sunce, suvi vazduh), centralno grejani i klimatizovani prostori, starenje, terapija lekovima	Ukapati 1 - 2 kapi u oko, više puta dnevno, odnosno po potrebi.	Ne	Trenutno olakšanje i dug efekat vlaženja. Dugotrajna osećaj prijetnosti i podmazivanja. Proizvod može trenutno zamaglit vid.
Vizol S INTENSIVE	Ublažavanje smetnji suvog oka i obnavljanje površine oka	Natrijum hijaluronat 0,15% dekspanatenol 2%	Mehanički iritansi oka: nošenje sočiva, operativni ili dijagnostički zahvati, lekovi.		Da	Trenutno osveženje i dugotrajna osećaj prijetnosti i vlaženja.

NAČIN ČUVANJA

Proizvod čuvati na temperaturi 2°C - 25°C. Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka upotrebe navedenog na kutiji i bočici.

PAKOVANJE

10 ml



PROIZVOBAČ

bitop AG Stockumer Str. 28, 58453 Witten, Nemačka

OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK PROIZVOBAČA



JGL D.O.O. BEOGRAD-SOPOT,
Milosava Vlajića 110A, Sopot

DATUM REVIZIJE UPUTSTVA: Novembar, 2024.

Objašnjenje simbola na proizvodu



Pre upotrebe pročitati uputstvo



Proizvođač



Rok upotrebe



Sterilno, aseptična tehnika obrade



Čuvati na temperaturi od 2°C do 25°C



Broj serije



CE oznaka sa identifikacijskim brojem tela

Nemojte primenjavati oštećene ili probušene proizvode



Dodatni simboli na kutiji:



Štiti od uticaja alergena



Trenutno olakšanje od tegoba iritacije



Ublažavanje prekomernog suzenja, svraba i crvenila



Pogodan za osobe koje nose kontaktna sočiva