

АКВА МАРИС® СТРОНГ



ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

Раствор для орошения слизистой носа, спрей **АКВА МАРИС СТРОНГ (AQUA MARIS STRONG)**

ОПИСАНИЕ:

Стерильный гипертонический раствор.
Прозрачный бесцветный раствор со слабым специфическим запахом.

ФОРМА ВЫПУСКА:

По 30 мл спрея в стеклянном флаконе темного цвета, снабженном распылительным устройством и защитной крышкой из пропилена. Один флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

СОСТАВ:

Вода Адриатического моря – 100 %.
Не содержит консервантов и химических добавок.

Присутствие ионов:

Натрий (Na ⁺)	–	мин. 7,50 мг/мл;
Кальций (Ca ²⁺)	–	мин. 0,25 мг/мл;
Калий (K ⁺)	–	мин. 0,20 мг/мл;
Магний (Mg ²⁺)	–	мин. 1,00 мг/мл;
Хлориды (Cl ⁻)	–	мин. 16,50 мг/мл;
Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	–	мин. 1,80 мг/мл;
Гидрокарбонаты (HCO ₃ ⁻)	–	мин. 0,10 мг/мл;
Бромиды (Br ⁻)	–	мин. 0,04 мг/мл.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

АКВА МАРИС СТРОНГ представляет собой гипертонический стерильный раствор морской воды.

Гипертонический раствор обеспечивает уменьшение отека слизистой оболочки полости носа благодаря удалению избыточной жидкости из межклеточного пространства за счет разности осмотического давления.

Применяется при воспалительных заболеваниях носа, носовых пазух и носоглотки для устранения отека слизистой оболочки, в качестве «природного деконгестанта».

Оказывает антибактериальный эффект.

АКВА МАРИС СТРОНГ смывает вирусы и бактерии со слизистой оболочки полости носа, способствует повышению местного иммунитета, оказывает местное противовоспалительное действие.

Микроэлементы, входящие в состав АКВА МАРИС СТРОНГ, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает сопротивляемость слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух к внедрению болезнетворных бактерий и вирусов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: АКВА МАРИС СТРОНГ ПОКАЗАН:

- для устранения отека слизистой оболочки полости носа, особенно лицам, страдающим повышенной чувствительностью к химическим лекарственным средствам, в том числе беременным женщинам и в период лактации.
- для лечения острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, придаточных пазух и носоглотки - таких как: носоглотки – таких как:
- острые и хронические риниты;

- острые и хронические синуситы;
- назофарингиты;
- острые и хронические гаймориты.

Approved 15-04-2024
Ekaterina Syropushchinskaya
RA Specialist
Belarus

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Интраназально.
Детям с 1 года и взрослым по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза.

Перед первым использованием необходимо снять защитную крышку и выполнить 2-3 холостых нажатия для удаления воздуха из распылительного устройства.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Чувство дискомфорта в носовой полости в начале приема.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Повышенная чувствительность к компонентам АКВА МАРИС СТРОНГ.

ПЕРЕДОЗИРОВКА:

Случаи передозировки не отмечены.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.
В целях соблюдения гигиены каждый флакон АКВА МАРИС СТРОНГ следует использовать только одним человеком.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года с момента изготовления.
Не использовать после истечения срока годности.
Использовать в течение 6 месяцев после вскрытия флакона.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК:

Без рецепта врача.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:


АО "Ядран-Галенски Лабораторий",
Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.

**ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АО «JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ D.D.»
(РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**
220062, г. Минск, пр. Победителей, д. 104, пом. 6
Тел: + 375 29 166 71 25

www.aquamaris.ru



**ПРОДУКЦИЯ АКВА МАРИС
СЕРТИФИЦИРОВАНА НА
ОТСУТСТВИЕ МИКРОПЛАСТИКА.**

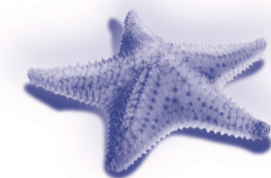

jgl

130002129/04

CARTON LEAFLET LABEL ALUMINIUM TUBE
AM STRONG S NOS 30 ML_BY



SAP CODE **130002129**
REVISION 04
DIMENSION 150 X 300
FARMACODE 184; 185
ORIENTATION NF
FOLDING TYPE -
FONT / SIZE FuturaBook / 10,5 pt
EAN CODE -
SPECIFICATION NUMBER SpecPacGen000978
PREPRESS Adobe Illustrator CC
CREATED BY Lorena
MATERIAL Sora Medico 50 g/m²
Prolight 50 g/m²
Sora Medico 40 g/m²
Master print 60 g/m²

COLOUR (number of colours): 1/1
Pantone 2756

Non printing colours

CAD

SIGNATURE PRODUCTION

<input checked="" type="checkbox"/> 1. draft Date: 16.01.2024.	<input type="checkbox"/> 7. draft Date:
<input checked="" type="checkbox"/> 2. draft Date: 22.01.2024.	<input type="checkbox"/> 8. draft Date:
<input checked="" type="checkbox"/> 3. draft Date: 23.01.2024.	<input type="checkbox"/> 9. draft Date:
<input type="checkbox"/> 4. draft Date:	<input type="checkbox"/> 10. draft Date:
<input type="checkbox"/> 5. draft Date:	<input type="checkbox"/> 11. draft Date:
<input type="checkbox"/> 6. draft Date:	<input type="checkbox"/> 12. draft Date:

SIGNATURE MARKET



184



185