


# АКВА МАРИС®

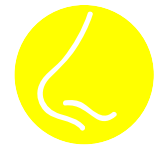

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению

Устройство оториноларингологическое для промывания слизистой носа индивидуальное «Аква Марис® Лейка» в наборе со средствами для промывания «Аква Марис®»

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: №ФСЗ 2010/07753 от 03.08.2016 г.

#### ОПИСАНИЕ:

Устройство Аква Марис® Лейка представляет собой пластиковую емкость объемом 330 мл для приготовления раствора для промывания носа в наборе со средством для промывания Аква Марис® в виде 30 пакетов-саше с солью Адриатического моря. 1 пакет-саше содержит 2,97 г морской соли.

Устройство оториноларингологическое Аква Марис® Лейка позволяет удобно и безопасно промывать нос по всей длине носовых ходов. Жидкость для промывания подается в полость носа «самотеком», т.е. без дополнительного давления, что позволяет избежать такого осложнения, как воспаление среднего уха (отит). **Процедура проста и безопасна даже для детей, беременных и кормящих женщин.**

При промывании полости носа с помощью устройства Аква Марис® Лейка с поверхности слизистой носа удаляется патологическое содержимое вместе с вирусами, бактериями, аллергенами и пылью, уменьшается отек и воспаление, повышается тонус капилляров.

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Устройство Аква Марис® Лейка рекомендовано для индивидуального использования и применяется в целях лечения и профилактики различных воспалительных заболеваний носоглотки.

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Устройство для промывания носа Аква Марис® Лейка обеспечивает действенное и бережное освобождение носоглотки от слизи и инородных частиц и рекомендуется к применению:

- при остром и хроническом рините
- при ОРВИ
- при аллергическом рините
- при остром и хроническом гайморите, фронтите, этмоидите
- при аденоидите
- при повышенной сухости слизистой оболочки носа и образовании корок
- часто болеющим пациентам
- после хирургического вмешательства на полости носа (по рекомендации врача).

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Разрежьте пакетик и высыпьте морскую соль в устройство.



3 Займите удобное положение перед раковиной. Голову наклоните вперед и слегка поверните в сторону.



2 Заполните устройство кипяченой водой температуры тела до метки и перемешивайте до полного растворения соли.

(продолжение см. на обороте) ▶



4 Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Приложите кончик устройства к вышерасположенной ноздре таким образом, чтобы он был плотно прижат к ней.



7 Затем высморкайтесь в прямом положении.




5 Наклоните устройство таким образом, чтобы раствор начал поступать из кончика устройства в носовой ход. Раствор будет вытекать из противоположной ноздри.



8 Повторите процедуру с другой ноздрей.



6 Для удаления остатков раствора из носа высморкайтесь, не меняя положения головы.

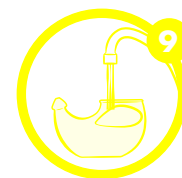

9 После использования промойте устройство прохладной водой и хорошо его высушите.

Раствор морской соли рекомендуется использовать ежедневно.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Острый отит и обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания, частые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, полная непроходимость носовых ходов, детский возраст до 3-х лет.

#### ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Не выявлены.

#### ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ:

Возможно применение при беременности и в период лактации.

#### СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

Эксплуатация, хранение, транспортирование осуществляются при температуре окружающей среды не выше 25°C.

Медицинское изделие должно храниться в сухом, недоступном для детей месте.

#### УТИЛИЗАЦИЯ:


Устройство оториноларингологическое для промывания слизистой носа индивидуальное Аква Марис® Лейка в наборе со средствами для промывания Аква Марис® не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, поэтому специальные меры для утилизации устройства не требуются.

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. (ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ а.о.), Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia (Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия).

#### ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ООО «ЯДРАН»:


119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, офис 20, тел. (495) 970-18-82/ (495) 970-18-83.

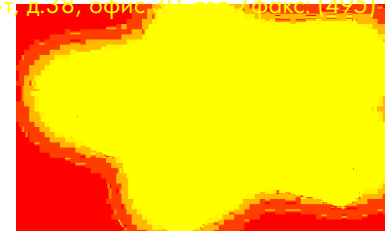

jgl

www.aquamaris.ru

RU ASUB1292/V1

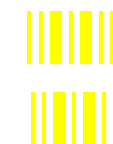

FREE SPACE

CARTON LEAFLET LABEL ALUMINIUM TUBE AQUA MARIS LEYKA sustav		Colours PANTONE 2592 PANTONE 2756
	CODE ASUB1292 VERSION 1 DATE DIMENSIONS 150 x 300 mm PHARMACODE 147; 148 EAN CODE FONT PREPRESS Adobe Illustrator CS6	
		Non printing colours 