

Инструкция-вкладыш по применению для пациентов

Наименование:

изделие медицинского назначения для защиты слизистой оболочки кишечника



Состав изделия медицинского назначения: 1 саше содержит желатина таннат 250 мг.

Описание: изделия медицинского назначения (ИМН) для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® предназначено для защиты слизистой оболочки кишечника от проникновения бактерий и токсинов.

Функциональное назначение ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® обладает способностью к механическому воздействию, защищая плотные межклеточные соединения эпителиальных клеток в тех случаях, когда они проявляют несостоятельность или разрушены, тем самым предотвращая массовое поступление в слизистую оболочку кишечника бактерий и токсинов из просвета кишечника. Этот эффект достигается исключительно механическим путём при применении ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН®.

Назначение: защита слизистой оболочки кишечника от проникновения бактерий и токсинов.

Показания к применению: рекомендован для защиты слизистой оболочки кишечника при диарее для детей и взрослых.

Способ применения: содержимое пакетика высыпать в столовую ложку, смешать с небольшим количеством воды и в таком виде употребить. Или растворить содержимое пакетика в 50-100 мл кипячёной воды, охлаждённой до комнатной температуры, и полученную суспензию употребить вместе с образовавшимся осадком.

Рекомендации по применению для разных категорий пациентов:			
Возраст	С 3 месяцев до 3 лет*	от 3 до 14 лет	старше 14 лет
Количество, необходимое для одного применения	1 пакетик	от 1 до 2 пакетиков**	2 пакетика**
Интервал применения	от 4 до 6 часов	от 4 до 6 часов	от 4 до 6 часов
Время прекращения применения	восстановление физиологической функции стенки кишечника		
*после консультации с врачом			
** в зависимости от физиологического состояния стенки кишечника			

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов медицинского изделия. Другие известные противопоказания отсутствуют.

CARTON LEAFLET LABEL ALUMINIUM TUBE ADIARIN SAŠETA, BYELORUSIJA		Colours Black	<input checked="" type="checkbox"/> 1st draft Date: 15.07.2019.	<input type="checkbox"/> 7st draft Date:
	CODE	930000531	<input type="checkbox"/> 2st draft Date:	<input type="checkbox"/> 8st draft Date:
	VERSION	01	<input type="checkbox"/> 3st draft Date:	<input type="checkbox"/> 9st draft Date:
	DATE	2019	<input type="checkbox"/> 4st draft Date:	<input type="checkbox"/> 10st draft Date:
	DIMENSIONS	150 x 210	<input type="checkbox"/> 5st draft Date:	<input type="checkbox"/> 11st draft Date:
	PHARMACODE		<input type="checkbox"/> 6st draft Date:	<input type="checkbox"/> 12st draft Date:
	VIZUALCODE			
	EANCODE			
FONT		Non printing colours Profile		
PREPRESS	Adobe Illustrator CC			

Меры предосторожности: перед применением ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® необходимо также принимать во внимание:

Консультации с врачом перед применением ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® не требуется. Необходимость такой консультации требуется в случае тяжелых или устойчивых симптомов, в основном у детей младше 3 лет и пожилых.

В случае диареи у детей младше 3 лет, главным образом, при наличии других симптомов рекомендуется обратиться в лечебное учреждение за консультацией к врачу.

Рекомендуется обильное питье и обычная диета, применяемая при диарее.

Хотя известные побочные эффекты отсутствуют, рекомендуется не применять ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® во время беременности или в первые месяцы грудного вскармливания. В любом случае всегда предварительно консультируйтесь с врачом. Не используйте ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® после истечения срока, указанного на упаковке ИМН.

Не используйте ИМН для защиты слизистой оболочки кишечника АДИАРИН® с поврежденной упаковкой.

Срок годности: 5 лет. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре от 4 до 40 °С.

Упаковка: по 8 пакетиков-саше помещают в картонную пачку вместе с инструкцией-вкладышем по применению.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения:

По истечении срока годности изделие должно утилизироваться в соответствии с местными законами и нормативными положениями. По истечении срока годности медицинское изделие требуется утилизировать в качестве бытовых отходов.

Производитель:

НОВЕНТУРЕ СЛ, Авенида Диагональ, 549, 5ый этаж, 08029 - Барселона, Испания (NOVENTURE SL, Avda. Diagonal, 549, 5a planta, 08029 - Barcelone, Spain).

Место производства:

ЛАБОМАР СПА, Виа Н.Сауро 35/1, ИТ-31036 Истрана (ТВ), Италия (LABOMAR SPA, Via N.Sauro 35/1, IT-31036 Istrana (TV), Italia)


ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АО «JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.» (РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:

220125, г. Минск, пр. Независимости, д. 185, п. 7, тел.: +375 17 337 77 13

адрес электронной почты: jadrان@jgl.ru

www.adiarin.ru

BY 930000531/01

CARTON LEAFLET LABEL ALUMINIUM TUBE ADIARIN SAŠETA, BYELORUSIJA		Colours Black	<input checked="" type="checkbox"/> 1st draft Date: 15.07.2019.	<input type="checkbox"/> 7st draft Date:
 Kao kap vode na dlanu	CODE VERSION DATE DIMENSIONS PHARMACODE VIZUALCODE EANCODE FONT PREPRESS	Non printing colours Profile	<input type="checkbox"/> 2st draft Date:	<input type="checkbox"/> 8st draft Date:
	930000531 01 2019 150 x 210 Adobe Illustrator CC		<input type="checkbox"/> 3st draft Date:	<input type="checkbox"/> 9st draft Date:
			<input type="checkbox"/> 4st draft Date:	<input type="checkbox"/> 10st draft Date:
			<input type="checkbox"/> 5st draft Date:	<input type="checkbox"/> 11st draft Date:
			<input type="checkbox"/> 6st draft Date:	<input type="checkbox"/> 12st draft Date: