	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Veljača 2023.
	AQUA MARIS® 4Allergy sprej za nos, 20 ml	str.: 1/2

AQUA MARIS® 4Allergy
100% prirodan sprej za nos

Antialergijski sprej za nos s prirodnim sastojkom ektoinom namijenjen je za prevenciju i ublažavanje simptoma alergijskog rinitisa. Izvrsnog sigurnosnog profila i klinički dokazane učinkovitosti, prikladan je za djecu od najranije dobi i odrasle.

Sastav

Ectoin® 2%, morska sol, pročišćena voda.

Bez konzervansa.

Pakiranje

20 ml tekućine u inovativnom, patentiranom i mikrobiološki zaštićenom sustavu koji ne dozvoljava ulazak zraka u bočicu.

Namjena

Ektoin je 100% prirodan sastojak koji se dobiva iz ekstremofila. Ekstremofili su mikroorganizmi koji mogu preživjeti u ekstremno nepovoljnim uvjetima okoline, primjerice iznimno visoka i niska temperatura, tlak, visoka koncentracija soli, područja visokog UV-zračenja. Kako bi se zaštitili od tih štetnih vanjskih učinaka, ekstremofili sintetiziraju ektoin. Ektoin na jednak način može zaštititi ljudske stanice od nepovoljnih vanjskih utjecaja, poput alergena i iritansa.

Ektoin na nosnoj sluznici stvara zaštitni film Ectoin®-Hydro-Complex koji sprječava doticaj alergena i iritansa sa stanicama i time ublažava alergijsku reakciju. Alergeni i iritansi ne mogu se približiti nosnoj sluznici te se lakše odstranjuju ispuhivanjem nosa. Blago hipertonična otopina djeluje na način da odčepkuje nos na prirodan način, a soli iz mora obnavljaju sluznicu.

Kada i kako koristiti Aqua Maris® 4Allergy sprej za nos?


Aqua Maris® 4Allergy sprej za nos koristi se za:

- ublažavanje simptoma alergijskog rinitisa poput svrbeža u nosu, curenja iz nosa, kihanja i začepljenja nosa,
- njegu i zaštitu epitela nosne sluznice uslijed povećane izloženosti organizma raznim alergenima poput peludi ili kućne prašine te
- preventivnu uporabu, tijekom cijele godine.

Aqua Maris® 4Allergy dozirni sprej za nos raspršiti 1 – 2 puta u svaku nosnicu nekoliko puta na dan. Budući da Aqua Maris® 4Allergy sprej za nos podržava fiziološko stanje sluznice i nema sistemskih učinaka, prikladan je za djecu od najranije dobi i odrasle. Djeca mlađa od 10 godina trebaju pomoć roditelja prilikom korištenja proizvoda.

S obzirom na jačinu simptoma može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s drugim antialergijskim proizvodima.

Uobičajen period primjene je tijekom sezone alergija, ali i prije i poslije izloženosti organizma alergenima izvan sezone.

 Kao kap vode na dlanu	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Veljača 2023.
	AQUA MARIS® 4Allergy sprej za nos, 20 ml	str.: 2/2

Prije prvog korištenja uklonite čep i pritisnite pumpicu 2 – 3 puta kako bi se oslobodio zrak. Zbog higijenskih razloga svaki bi proizvod trebala koristiti samo jedna osoba.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi od 2°C do 25°C u dobro zatvorenoj bočici. Čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.

Proizvođač


JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska




Datum revizije upute

Veljača 2023.

Objašnjenje simbola na proizvodu


 2°C – 25°C Čuvati na temperaturi od 2°C do 25°C


 Pogledati upute za uporabu


 Proizvođač


 Broj serije


 Rok valjanosti


 CE oznaka



Proizvodi Aqua Maris dokazano ne sadrže mikroplastiku.