	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Lipanj, 2022.
	AQUA MARIS® Baby sprej za nos 50 i 150 ml	str: 1/2

AQUA MARIS® Baby
100% prirodan sprej za nos

Izotonična morska voda iz Jadrana, bogata solima i oligoelementima, ispire bakterije, viruse i nečistoće iz bebinog nosa.

Sastav

Otopina sadrži morsku vodu iz Jadrana bogatu solima i oligoelementima. Oligoelementi prisutni u otopini imaju važnu ulogu u održavanju normalne funkcije sluznice nosa što omogućava prohodnost gornjih dišnih putova.

Bez konzervansa.

Pakiranje

50 ml otopine u bočici s mikroraspršivačem posebno prilagođenim bebinom nosiću.

150 ml otopine u bočici s mikroraspršivačem posebno prilagođenim bebinom nosiću.

Namjena

Disanje kroz nos jedini je ispravan način disanja, što je važno za rast i razvoj djeteta, stoga na higijenu nosa treba paziti od rođenja. Suh nos, nakupljena nečistoća, sekret ili otečena sluznica smanjit će prohodnost nosa i u djeteta izazvati nemir, plačljivost i razdražljivost te omesti miran san i hranjenje. Začepljen nos tijekom prehlade ili alergije može se odraziti i na zdravlje ukupnog dišnog sustava.

Morska voda bogata solima i oligoelementima blagotvorno djeluje na sluznicu nosa, potpomažući prirodne mehanizme njezina čišćenja.

Kada i kako koristiti Aqua Maris® Baby sprej za nos?

Aqua Maris® Baby s aplikatorom posebno prilagođenim nosnici novorođenčadi, olakšava uklanjanje nakupljenog sekreta, eliminira infektivne čestice, prašinu, alergene i nečistoću. Time se odčepljuje nosić uz istodobno ovlaživanje i obnavljanje sluznice nosa.


Aqua Maris® Baby sprej za nos preporučuje se:

- za svakodnevnu higijenu nosa,
- prije dojenja ili hranjenja na bočicu,
- tijekom prehlade i alergije,
- kao pomoć kod upale uha, uz ostalu terapiju preporučenu od liječnika,
- kod suhoće nosa uslijed boravka u klimatiziranim ili jako zagrijanim prostorijama te prije uporabe lijekova (kapi ili sprejeva) za nos.

Raspršiti Aqua Maris® Baby sprej za nos u svaku nosnicu 2-6 puta dnevno, prema potrebi i češće.

Nakon primjene, isprati aplikator i osušiti ga.

Za omekšavanje i odstranjenje većih količina nečistoće i sekreta iz nosne šupljine, Aqua Maris® Baby sprej za nos treba obilnije raspršiti u svaku nosnicu. Postupak se može ponavljati dok sadržaj dovoljno ne omekša tako da se može lako ukloniti iz nosa.

	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Lipanj, 2022.
	AQUA MARIS® Baby sprej za nos 50 i 150 ml	str: 2/2

Budući da Aqua Maris® Baby podržava fiziološko stanje sluznice i nema sistemskih učinaka, prikladan je od najranije dobi. Pogodan je za svakodnevnu uporabu. Zbog higijenskih razloga svaki bi proizvod trebala koristiti samo jedna osoba.

Upozorenje

Vanjski spremnik napunjen je inertnim potisnim plinom (dušikom) koji ne dolazi u dodir s morskom vodom. Spremnik je pod pritiskom: može puknuti pod djelovanjem topline. Ne bušiti ni paliti čak niti nakon uporabe. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskre, otvorenog plamena ili bilo kojeg drugog izvora plamena. Ne pušiti. Zaštititi ga od sunčevog svjetla i ne izlagati temperaturama višim od 50°C/122°F.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.

Proizvođač

JGL d.d, Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska



Datum revizije upute

Lipanj 2022.

Objašnjenje simbola na proizvodu



Pogledati upute za uporabu



Proizvođač



Broj serije



Rok valjanosti



CE oznaka



Proizvodi Aqua Maris dokazano ne sadrže mikroplastiku