	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Veljača 2023.
	AQUA MARIS® Bebe kapi za nos, 10 ml	str.: 1/2

AQUA MARIS® Bebe
100% prirodne kapi za nos

Izotonična morska voda iz Jadrana za dnevnu njegu i higijenu nosića. Aqua Maris® Bebe kapi za nos održavaju prohodnost gornjih dišnih putova već od prvog dana života.

Sastav

Otopina sadrži morsku vodu iz Jadrana bogatu solima i oligoelementima. Oligoelementi prisutni u otopini imaju važnu ulogu u održavanju normalne funkcije sluznice nosa što omogućava prohodnost gornjih dišnih putova.

Bez konzervansa.

Pakiranje

10 ml izotonične otopine bez konzervansa u bočici s kapaljkom.

Namjena

Disanje kroz nos jedini je ispravan način disanja, što je važno za rast i razvoj djeteta, stoga na higijenu nosa treba paziti od rođenja. Suh nos, nakupljena nečistoća, sekret ili otečena sluznica spriječiti će prolaz zraka kroz nos i u djeteta izazvati nemir, plačljivost i razdražljivost te omesti miran san i hranjenje. Začepljen nos tijekom prehlade ili alergije može se odraziti i na zdravlje ostalih dišnih putova i uha.

Morska voda blagotvorno djeluje na sluznicu nosa, potpomažući prirodne mehanizme njezina čišćenja.

Kada i kako koristiti Aqua Maris® Bebe kapi za nos?

Aqua Maris® Bebe kapi za nos čiste i ovlažuju nosić uz istodobno obnavljanje sluznice nosa.


Aqua Maris® Bebe preporučuje se:

- za svakodnevnu higijenu nosa,
- prije dojenja ili hranjenja na bočicu,
- tijekom prehlade i alergije,
- kao pomoć kod upale uha, uz ostalu terapiju preporučenu od liječnika,
- kod suhoće nosa uslijed boravka u klimatiziranim ili jako zagrijanim prostorijama te
- prije uporabe lijekova (kapi ili sprejeva) za nos.

U ležećem položaju ukapati jednu kap u svaku nosnicu. Postupak se može ponavljati više puta dnevno i tijekom dužeg perioda.

Za omekšavanje i odstranjenje većih količina nečistoće i sekreta iz nosne šupljine, Aqua Maris® Bebe kapi za nos treba obilno ukapati u svaku nosnicu. Postupak se može ponavljati dok sadržaj dovoljno ne omekša tako da se može lako ukloniti iz nosa.

Budući da Aqua Maris® Bebe kapi za nos podržavaju fiziološko stanje sluznice i nemaju sistemskih učinaka, prikladne su za svakodnevnu uporabu već od prvog dana života. Zbog higijenskih razloga svaki bi proizvod trebala koristiti samo jedna osoba.

	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Veljača 2023.
	AQUA MARIS® Bebe kapi za nos, 10 ml	str.: 2/2

Napomena

Proizvod čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakiranju.
Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Rok valjanosti

Naveden na pakiranju. Sadržaj bočice iskoristite unutar 3 dana nakon prvog otvaranja.

Proizvođač

JGL d.d, Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska



Datum revizije upute

Veljača, 2023.

Objašnjenje simbola na proizvodu



25°C Čuvati na temperaturi do 25°C



Proizvođač



Rok valjanosti



Pogledati upute za uporabu



Broj serije



CE oznaka



Proizvodi Aqua Maris dokazano ne sadrže mikroplastiku.