	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Lipanj, 2022.
	AQUA MARIS® Clean sprej za nos 50 ml, 125 ml i 150 ml	str: 1/2

AQUA MARIS® Clean

100% prirodan sprej za nos

Izotonična morska voda iz Jadrana ispire bakterije, viruse i nečistoće iz nosa te omogućava prohodnost gornjih dišnih putova.

Sastav

Otopina sadrži morsku vodu iz Jadrana bogatu solima i oligoelementima. Oligoelementi prisutni u otopini imaju važnu ulogu u održavanju normalne funkcije sluznice nosa što omogućava prohodnost gornjih dišnih putova.

Bez konzervansa.

Pakiranje

50 ml otopine u bočici s mikroraspršivačem.

125 ml otopine u bočici s mikroraspršivačem.

150 ml otopine u bočici s mikroraspršivačem.

Namjena

Normalno disanje ovisi o stanju sluznice nosa. Nakupljanje čestica prašine, alergena, bakterija i virusa na nosnoj sluznici onemogućuje njenu prirodnu funkciju. Prehlada, alergija, gripa te niz drugih stanja izazivaju pojačanu sekreciju, otečenost sluznice nosa i nakupljanje sekreta u nosu što dodatno otežava disanje. Morska voda zbog sadržaja mineralnih soli ima blagotvoran učinak na sluznicu dišnih putova.

Kada i kako koristiti Aqua Maris® Clean sprej za nos?

Aqua Maris® Clean s posebno oblikovanim aplikatorom ispire sekret, čestice prašine, bakterije, viruse i alergene iz nosa. Preporučuje se osobama s prehladama i alergijama te osobama izloženim česticama prašine i ostalim nečistoćama.

Raspršiti Aqua Maris® Clean u svaku nosnicu 1-2 puta, nekoliko puta na dan (2-6 puta), prema potrebi i češće.

Nakon primjene, isprati aplikator i osušiti ga.

Zbog svoje nježnosti pogodan je i za svakodnevnu uporabu kao pomoć u održavanju prohodnosti nosa.


Budući da Aqua Maris® Clean podržava fiziološko stanje sluznice i nema sistemskih učinaka, prikladan je za djecu, trudnice i dojilje.

Zbog higijenskih razloga svaki bi proizvod trebala koristiti samo jedna osoba.

Upozorenje

Vanjski spremnik napunjen je inertnim potisnim plinom (dušikom) koji ne dolazi u dodir s morskom vodom. Spremnik je pod pritiskom: može puknuti pod djelovanjem topline. Ne bušiti ni paliti čak niti nakon uporabe. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskre, otvorenog plamena ili bilo kojeg drugog izvora plamena. Ne pušiti. Zaštititi ga od sunčevog svjetla i ne izlagati temperaturama višim od 50°C/122°F.

Proizvod čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Lipanj, 2022.
	AQUA MARIS® Clean sprej za nos 50 ml, 125 ml i 150 ml	str: 2/2

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.

Proizvođač

JGL d.d, Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska



Datum revizije upute

Lipanj, 2022.

Objašnjenje simbola na proizvodu



Pogledati upute za uporabu



Proizvođač



Broj serije



Rok valjanosti



CE oznaka



Proizvodi Aqua Maris dokazano ne sadrže mikroplastiku