	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Lipanj 2022.
	AQUA MARIS® Hypertonic sprej za nos, 50 ml, 125ml i 150 ml	str.: 1/2

AQUA MARIS® Hypertonic

100% prirodan sprej za nos

Aqua Maris® Hypertonic **na prirodan način odčepљуje nos** kod prehlade, gripe ili alergije. Prikladan je za odrasle i djecu stariju od 1 godine. Siguran za primjenu kod trudnica.

Sastav

Morska voda iz Jadrana, pročišćena voda.

Morska voda iz Jadrana bogata je solima i oligoelementima. Oligoelementi prisutni u otopini imaju važnu ulogu u održavanju normalne funkcije sluznice nosa što omogućava prohodnost gornjih dišnih putova.

Bez konzervansa.

Pakiranje

50 ml otopine u bočici s mikroraspršivačem.

125 ml otopine u bočici s mikroraspršivačem.

150 ml otopine u bočici s mikroraspršivačem.

Namjena

Normalno disanje ovisi o stanju sluznice nosa. Prehlada, alergija, gripa te niz drugih stanja izazivaju pojačanu sekreciju i otečenost sluznice nosa što otežava normalno disanje kod djece i odraslih.

Kada i kako koristiti Aqua Maris® Hypertonic sprej za nos?

Aqua Maris® Hypertonic djeluje kao prirodni dekongestiv (odčepљуje nos). Zbog visoke koncentracije soli hipertonična otopina uklanja višak tekućine iz nosne sluznice po principu osmotskog gradijenta, smanjuje njeno oticanje i olakšava disanje kroz nos.

Preporučuje se osobama sa začepljenim nosom i otežanim disanjem uslijed prehlade, gripe i alergija. Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa standardnom terapijom.

Raspršiti 1-2 puta u svaku nosnicu, nekoliko puta na dan, a po potrebi i više.

Koristiti dok traje začepljenost nosa, te nakon, za održavanje higijene, nastaviti s Aqua Maris® Classic ili Aqua Maris® Baby sprejem za nos (izotonična morska voda).


Nakon primjene, isprati i osušiti aplikator.

Kome je proizvod namijenjen?

Budući da Aqua Maris® Hypertonic sprej za nos podržava fiziološko stanje sluznice i nema sistemskih učinaka, prikladan je za odrasle i djecu stariju od 1 godine.

Zbog svoje prirodnosti i blagosti, Aqua Maris® Hypertonic rješenje je za začepljen nos tijekom trudnoće i dojenja kada drugi lijekovi za prehladu nisu prikladni.

Zbog higijenskih razloga svaki bi proizvod trebala koristiti samo jedna osoba.

	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Lipanj 2022.
	AQUA MARIS® Hypertonic sprej za nos, 50 ml, 125ml i 150 ml	str.: 2/2

Upozorenje

Vanjski spremnik napunjen je inertnim potisnim plinom (dušikom) koji ne dolazi u dodir s otopinom. Spremnik je pod pritiskom: može puknuti pod djelovanjem topline. Ne bušiti ni paliti čak niti nakon uporabe. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskre, otvorenog plamena ili bilo kojeg drugog izvora plamena. Ne pušiti. Zaštititi ga od sunčevog svjetla i ne izlagati temperaturama višim od 50°C/122°F.

Proizvod čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.

Proizvođač

JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska



Datum revizije upute

Lipanj 2022.

Objašnjenje simbola na proizvodu



Pogledati upute za uporabu



Proizvođač



Broj serije



Rok valjanosti



CE oznaka



Proizvodi Aqua Maris dokazano ne sadrže mikroplastiku