	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Lipanj 2022.
	AQUA MARIS® Plus sprej za nos, 30 ml	str.: 1/2

AQUA MARIS® Plus

sprej za nos

Blagotvorna morska voda iz Jadrana bogata solima i oligoelementima u kombinaciji s d-pantenolom **za regeneraciju i ovlaživanje oštećene i suhe sluznice nosa**. Oligoelementi prisutni u otopini imaju važnu ulogu u održavanju normalne funkcije sluznice nosa što omogućava prohodnost gornjih dišnih putova.

Bez konzervansa.

Sastav

morska voda iz Jadrana, d-pantenol, pročišćena voda, natrijev hidrogenfosfat dodekahidrat, kalijev dihidrogenfosfat.

Pakiranje

30 ml otopine (200 doza) u bočici s dozirnom pumpicom.

Namjena

Morska voda zbog sadržaja mineralnih soli ima blagotvoran učinak na sluznicu gornjih dišnih putova. Ulaskom u stanice d-pantenol se pretvara u pantotensku kiselinu koja ulazi u sastav koenzima A te tako dovodi do bržeg obnavljanja kože i sluznice. Morska voda u kombinaciji s d-pantenolom regenerira oštećenu sluznicu nosa, opskrbljuje je važnim oligoelementima te sprječava njezino isušivanje.

Kada i kako koristiti Aqua Maris® Plus sprej za nos?

Aqua Maris® Plus sprej za nos preporučuje se u osoba:

- s oštećenom i/ili suhom sluznicom nosa,
- koje žive i rade u klimatiziranim i grijanim prostorima,
- koje puno putuju i provode vrijeme u zatvorenim prijevoznim sredstvima (avion, vlak, autobus, automobil)
- koje su izložene prekomjernom isušivanju sluznice gornjih dišnih putova (dugotrajno korištenje nazalnih kortikosteroida, pušači, pjevači, profesionalni vozači).


Pušačima i osobama koje su odlučile prestati pušiti preporučujemo Aqua Maris®Plus za regeneraciju oštećene sluznice.

Raspršiti Aqua Maris® Plus sprej za nos 1-2 puta u svaku nosnicu, više puta dnevno.

Prije prvog korištenja uklonite čep i pritisnite pumpicu 2 – 3 puta kako bi se oslobodio zrak. Zbog higijenskih razloga svaki bi proizvod trebala koristiti samo jedna osoba.

Budući da Aqua Maris® Plus sprej za nos podržava fiziološko stanje sluznice i nema sistemskih učinaka, prikladan je za djecu i odrasle. Također, mogu ga koristiti trudnice, dojilje i stariji ljudi.

Osobe koje su alergične na d-pantenol ne bi trebale koristiti ovaj proizvod.

	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Lipanj 2022.
	AQUA MARIS® Plus sprej za nos, 30 ml	str.: 2/2

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25°C u dobro zatvorenoj bočici.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Rok valjanosti

Otisnut je na pakiranju. Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.

Proizvođač

JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska



Datum revizije upute

Lipanj 2022.

Objašnjenje simbola na proizvodu



25 °C Čuvati na temperaturi do 25°C



Proizvođač



Rok valjanosti



Pogledati upute za uporabu



Broj serije



CE oznaka



Sterilno, aseptična tehnika obrade



Proizvodi Aqua Maris dokazano ne sadrže mikroplastiku