

Vizol S INTENSIVE

Augentropfen

Gebrauchsanweisung - bitte sorgfältig durchlesen

Vizol S INTENSIVE Augentropfen dienen der Befeuchtung, Beruhigung und dem Schutz trockener und gereizter Augen.

ZUSAMMENSETZUNG

Natriumhyaluronat 0,15 %, Dexpanthenol 2 %, Natriumchlorid, Natriumcitrat-Dihydrat, Zitronensäure Monohydrat, gereinigtes Wasser.

OHNE KONSERVIERUNGSTOFFE.

OHNE PHOSPHAT.

ZWECK

Vizol S INTENSIVE Augentropfen lindern die Symptome einer leichten bis mäßigen Augentrockenheit. Sie stabilisieren den Tränenfilm sowie befeuchten und beruhigen die Augenoberfläche.

Die Anwendung der Augentropfen bietet intensive Pflege und Schutz bei:

- **Trockenheit und mechanischer Reizung des Auges durch äußere Einflüsse:** Wind, trockene Luft, Klimaanlage, Luftverschmutzung, Staub, Tragen von Kontaktlinsen, diagnostische und chirurgische Eingriffe an den Augen.
- **Überanstrengung und Reizung der Augen durch vermindertes Blinzeln** während längerer fokussierter Bildschirmarbeit, beim Autofahren oder bei präzisen Arbeiten.

Vizol S INTENSIVE hat eine zweifache Wirkung: Es enthält **Natriumhyaluronat** für eine effektive Befeuchtung des Auges und Stabilisierung des Tränenfilms sowie **Dexpanthenol (Provitamin B5)** für eine zusätzliche Bindung von Wasser und die Beruhigung und den Schutz der Augenoberfläche.

Die Anwendung der Tropfen ermöglicht eine schnelle Linderung unangenehmer Symptome am Auge.

Symptome der Augentrockenheit können gelindert und somit Komplikationen verhindert werden.

Zu **den Risikofaktoren für trockene Augen** bzw. eine Störung des Tränenfilms, die entweder auf einen Mangel an Tränenflüssigkeit oder auf deren verstärkte Verdunstung zurückzuführen ist, zählen:

- Alterung
- Geschlecht (hormonelle Veränderungen bei Frauen während der Schwangerschaft, Stillzeit oder Menopause)

- Moderner Lebensstil (lang andauernde Computerarbeit, Aufenthalt, Arbeit und Reisen in klimatisierten Räumen)
- Umweltbedingungen (Wind, trockene Luft, Staub, Rauch, Luftverschmutzung, Klimaanlage, Neonlicht)
- Diagnostische und chirurgische Eingriffe am Auge
- Fremdkörper im Auge
- Tragen von Kontaktlinsen
- Anwendung von Augentropfen mit abschwellender Wirkung
- Medikamente (zur Behandlung von Depression, Bluthochdruck oder zur Schwangerschaftsverhütung)
- Krankheiten (rheumatoide Arthritis, Diabetes, Asthma, Schilddrüsenerkrankungen, Glaukom)

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Verwenden Sie Vizol S INTENSIVE Augentropfen nicht:

- bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Natriumhyaluronat, Dexpanthenol oder einen anderen Inhaltsstoff von Vizol S INTENSIVE Augentropfen.

Im Falle einer allergischen Reaktion sollten Sie das Produkt sofort absetzen und sich an einen Arzt wenden.

Weitere Warnungen:

- Sollten Sie feststellen, dass das Vizol S INTENSIVE-Fläschchen oder der Applikator beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt bitte nicht.
- Um eine sichere Anwendung und Hygiene zu gewährleisten, sollte jede Produktflasche nur von einer Person verwendet werden.
- Es sind keine Wechselwirkungen zwischen Vizol S INTENSIVE und Kontaktlinsenlösungen sowie anderen Augentropfen oder Augensalben bekannt. Falls Sie ein weiteres Augenprodukt benutzen, warten Sie zwischen den Anwendungen mindestens 15 Minuten.

Hinweis:

Unmittelbar nach der Anwendung der Tropfen könnte Ihre Sicht kurzzeitig verschwommen sein. In diesem Fall wird empfohlen, von Autofahrten oder der Bedienung von Maschinen abzusehen, bis Sie wieder scharf sehen können.

PRODUKTSICHERHEIT

Vizol S INTENSIVE Augentropfen enthalten **keine Konservierungsstoffe und kein Phosphat**, was die Möglichkeit einer Reizung und Schädigung der Augenoberfläche verringert.

Die Applikatortechnologie des Fläschchens enthält einen Filter, der das Produkt sicher für den Gebrauch macht, da er eine Verunreinigung der Lösung verhindert und **die Sterilität des Inhalts ganze 6 Monate nach dem Öffnen bewahrt.**

Das Produkt ist im Allgemeinen gut verträglich. Sollten Sie dennoch Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Benutzen Sie Vizol S INTENSIVE immer gemäß dieser Gebrauchsanweisung.

Beraten Sie sich vor der Anwendung mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie unsicher sind.

Falls nicht anders verschrieben, träufeln Sie je nach Bedarf mehrmals täglich 1 – 2 Tropfen in die Augen ein. Blinzeln Sie mehrmals, um die Lösung gleichmäßig auf der Augenoberfläche zu verteilen.

Vizol S INTENSIVE Augentropfen sind für die langfristige Anwendung geeignet.

Vermeiden Sie den Kontakt der Tropferspitze mit der Augenoberfläche oder anderen Oberflächen.





Vor der ersten Anwendung muss das Fläschchen aktiviert werden. Nehmen Sie dazu den Deckel von der Pumpe ab, drehen Sie das Fläschchen kopfüber und **drücken Sie den Applikator einige Male, bis der erste Tropfen erscheint.**

Informationen für Kontaktlinsenträger

Das Produkt kann während des Tragens von Kontaktlinsen verwendet werden.

Gebrauchsanweisung:

1. Waschen Sie sich gründlich die Hände.
2. Entfernen Sie den Deckel von der Pumpe (Abb. 1).
3. Halten Sie die Pumpe mit der Hand wie auf Abb. 2 zu sehen.
4. Drehen Sie das Fläschchen kopfüber und drücken Sie den Applikator, bis der erste Tropfen erscheint (Abb. 3).
5. Neigen Sie den Kopf nach hinten und träufeln Sie vorsichtig 1 Tropfen in Ihr Auge (Abb. 4).
6. Setzen Sie den Deckel wieder auf die Pumpe.

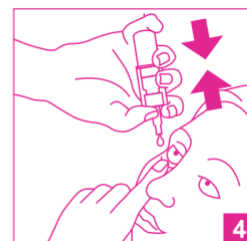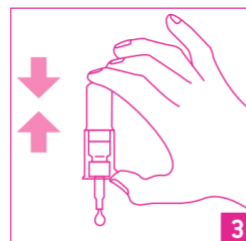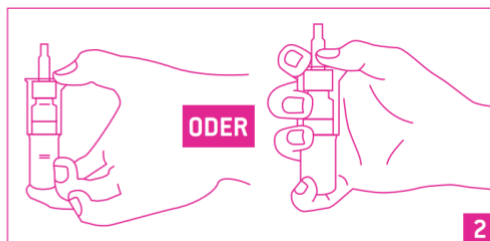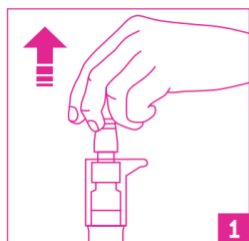

1. Entfernen Sie den Stopfen von der Pumpe.
2. Fassen Sie die Pumpe mit der Hand auf eine der in Abbildung 2 gezeigten Arten an.
3. Drehen Sie die Flasche auf den Kopf und aktivieren Sie die Pumpe durch Drücken, bis der erste Tropfen erscheint.
4. Halten Sie die Flasche kopfüber und träufeln Sie durch Drücken der Pumpe die vorgeschriebene Anzahl Tropfen in das Auge.

HERSTELLER

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Kroatien

VERFALLSDATUM

Auf der Verpackung aufgedruckt.

Die Haltbarkeit nach dem Öffnen beträgt 6 Monate.

Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.

LAGERUNG

Für die Lagerung dieses Medizinprodukts sind keine besonderen Bedingungen erforderlich.

Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

PACKUNG

10 ml



REVISIONSDATUM

August, 2024

ERKLÄRUNG DER AUF DEM PRODUKT ZU SEHENDEN SYMBOLE

SYMBOL	ERKLÄRUNG
	Siehe Gebrauchsanweisung
	Medizinprodukt
	Hersteller
	Verfallsdatum
	Seriennummer
	Sterile, aseptische Verarbeitungstechnik
	Ein Patient, vielfältige Verwendung
	Beschädigtes oder durchstochenes Produkt nicht anwenden
	Warnung, siehe Gebrauchsanweisung (für wichtige Warnungen/Vorsichtsmaßnahmen)
	CE-Kennzeichnung

Zusätzliche Symbole auf der Schachtel:

SYMBOL	ERKLÄRUNG
	Hydratation und intensive Pflege bei mechanischer Reizung und Überanstrengung der Augen
	Zweifache Wirkung: Befeuchtung und Schutz bei leichter bis mäßiger Augentrockenheit
	Linderung von Beschwerden und Augenreizungen beim Tragen von Kontaktlinsen
	Die Haltbarkeit nach dem Öffnen beträgt