

AQUA MARIS® ISOdose HA

20 ampula od 5 ml e
BEZ KONZERVANSA
SPREMNO ZA UPORABU

Primjereno za dojenčad, djecu i odrasle

Izotonična otopina na bazi morske vode i natrijeva hijaluronata. Olakšava uklanjanje sekreta kod prehlade, rinitisa i sinusitisa.

Za ispiranje nosa i primjenu putem aerosola.

Čišćenje nosnih šupljina predstavlja temeljni dio terapijskog postupka kod sino-nazalnih i nazofaringealnih oboljenja, osobito u djece, kod koje mnogi upalni procesi, bilo infektivni ili alergijski, započinju upravo u tim dijelovima, zbog njihove specifične anatomske funkcionalne građe koja otežava oslobađanje nakupljene sluzi i sekreta.

AQUA MARIS® ISODOSE HA prirodan je proizvod na bazi morske vode i natrijeva hijaluronata, koristan za zaštitu i obnovu normalnog fiziološkog stanja sluznica dišnog sustava kod djece, odraslih i starijih osoba. Idealan je za redovito čišćenje nosa, za aerosolnu terapiju te kao pomoćna terapija uz lijekove.

AQUA MARIS® ISODOSE HA djeluje zahvaljujući sinergijskom djelovanju svojih sastojaka: morska voda, tvar prisutna u prirodi koja ne izaziva ovisnost, ne oštećuje sluznicu, oslobađa nos od viška sluzi, olakšavajući njezino uklanjanje i poboljšava disanje; natrijev hijaluronat, koji ima zaštitno djelovanje na epitel stvarajući fiziološki film, pruža olakšanje nadraženoj sluznici i potiče obnavljanje sluznice nosne šupljine, poboljšavajući njihovu strukturu i funkcionalnost.

NAMJENA: Aqua Maris® ISOdose HA se koristi kao potporna terapija u liječenju prehlade, rinitisa i sinusitisa, jer pomaže

u hidrataciji sluznice, razrjeđivanju viška sluzi te olakšava njezino uklanjanje i drenažu sekreta, čime doprinosi čišćenju nosnih putova.

Ne zamjenjuje terapiju lijekovima, ali se koristi za suportivno liječenje.

UPUTE ZA UPORABU:

Za čišćenje i ispiranje nosne šupljine: Odvojite ampulu i pažljivo je otvorite okretanjem čepa dok se ne odvoji. Nagnite glavu u stranu, nježno umetnite vrh ampule u nosnicu i lagano pritisnite. Nakon nekoliko sekundi ispuhnite nos ili, ako je potrebno, upotrijebite aspirator za nos kako biste uklonili višak sekreta. Ponovite postupak za drugu nosnicu nakon što nagnete glavu na suprotnu stranu.

Za aerosolnu terapiju (inhalator):

Odvojite ampulu i pažljivo je otvorite okretanjem čepa dok se ne odvoji. Ulijte sadržaj u odgovarajuću posudicu raspršivača, pažljivo slijedeći upute proizvođača raspršivača (inhalatora) koji ćete koristiti.

Provedite aerosolnu terapiju pomoću dodatka za nos.

UPUTE ZA PONOVNU UPORABU:

U slučaju djelomične uporabe ampule, ponovno je zatvorite pomoću odgovarajućeg čepa (okrenutog naopako) i čuvajte u hladnjaku. Preostali sadržaj upotrijebite unutar 24 sata od prvog otvaranja.

UČESTALOST I TRAJANJE UPORABE:

Za pravilnu uporabu preporučuje se:

Dojenčad: ukapati nekoliko kapi u svaku nosnicu više puta tijekom dana.

Djeca od 1 godine nadalje: provesti potpuno ispiranje nosa ili aerosolnu terapiju s 1 ampulom jednom dnevno.

Odrasli: provesti potpuno ispiranje nosa ili aerosolnu terapiju s 1 ampulom dvaput dnevno.

Trajanje uporabe ovisi o razvoju simptoma, a po potrebi se može koristiti kroz dulje razdoblje prema savjetu liječnika. Nemojte koristiti medicinski proizvod dulje od 30 uzastopnih dana.

Uporaba kod dojenčadi i djece mora se provoditi prema savjetu liječnika i uvijek u prisutnosti odrasle osobe.

SASTAV: Voda, morska voda, natrijev hijaluronat, kalijev fosfat monobazni i kalijev fosfat dibazni.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA: Čuvati proizvod izvan pogleda i dohvata djece. Ne koristiti u druge svrhe osim navedenih. Ne gutati. Ne primjenjivati u slučaju poznate preosjetljivosti na bilo koji sastojak proizvoda. Primjena svih proizvoda za lokalnu uporabu, osobito ako je dugotrajna, može dovesti do pojave senzibilizacije.

NUSPOJAVE: Do sada nisu poznate nuspojave povezane s primjenom proizvoda. U slučaju pojave bilo kakvih neuobičajenih reakcija, prekinite

 **BIODUE S.p.A.** - Via A. Lorenzetti, 3/A
Loc. Sambuca V.P.
Barberino Tavarnelle (FI) - Italija

Distributer:

JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka

 1370
Medical Device



uporabu proizvoda, obratite se liječniku i obavijestite proizvođača. Budući da nisu poznate nuspojave pri upotrebi pojedinih sastojaka, nema posebnih kontraindikacija za primjenu tijekom trudnoće i dojenja. Ipak, radi veće sigurnosti preporučuje se savjetovati se s liječnikom. Uporaba kod dojenčadi i djece mora se provoditi prema savjetu liječnika i uvijek u prisutnosti odrasle osobe.

PRIJAVLJENA TOKSIČNOST:

Nisu zabilježeni slučajevi prijavljene toksičnosti.

ODRŽAVANJE, SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE PROIZVODOM:

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom pakiranju i otišnutog na svakoj ampuli. Ne koristiti u slučaju oštećenog pakiranja. Čuvati na hladnom i suhom mjestu.

NAČIN ODLAGANJA: Ambalažu nikada ne odlagati u okoliš. Neiskorišteni proizvod i otpad koji nastane njegovom uporabom moraju se zbrinuti u skladu s važećim lokalnim propisima.

PAKIRANJE: 20 ampula od 5ml e

Datum revizije upute: rujan 2019.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU



Pogledati upute za uporabu



Proizvođač



Rok valjanosti



CE oznaka



Broj serije



Pažnja: prije uporabe pažljivo pročitajte upozorenja u unutarnjoj uputi



Ne koristiti u slučaju oštećenog ili otvorenog pakiranja prije uporabe; pogledajte uputu za uporabu