



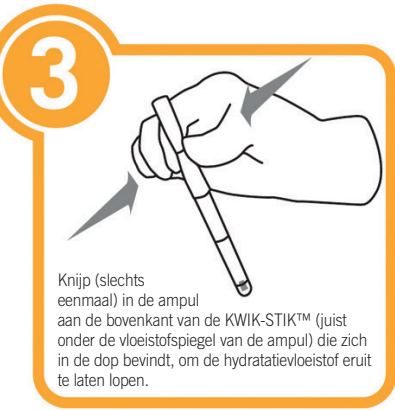
GEÏLLUSTREERDE INSTRUCTIES

- 


1

Laat het ongeopende zakje met KWIK-STIK™ op kamertemperatuur komen. Scheur het zakje open bij de inkeping en verwijder de KWIK-STIK™.
- 


2

Trek het afscheurbare deel van het etiket af en breng dit aan op de primaire kweekplaat of het kwaliteitcontroledossier. Neem het hulpmiddel niet uit elkaar tijdens het hydrateren.
- 


3

Knijp (slechts eenmaal) in de ampul aan de bovenkant van de KWIK-STIK™ (juist onder de vloeistofspiegel van de ampul) die zich in de dop bevindt, om de hydratatievloeistof eruit te laten lopen.
- 


4

Houd het hulpmiddel verticaal en tik op een hard oppervlak om de vloeistof gemakkelijker door de schacht in de onderkant van het hulpmiddel met daarin de pellet te laten stromen. Laat de hydratatievloeistof door de schacht van het wattenstaafje in het onderste deel van het hulpmiddel met daarin de pellet stromen.
- 


5

Knijp in het onderste deel van het hulpmiddel om de pellet in de vloeistof te verpulveren tot een homogene pelletsuspensie is verkregen.
- 

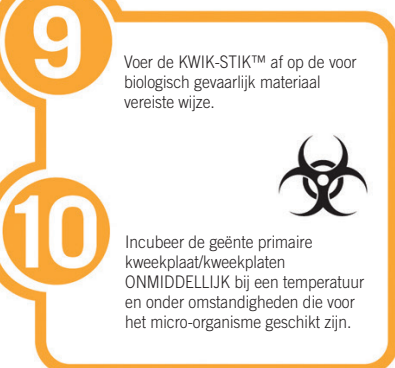
6

Verzadig het wattenstaafje volledig en **ONMIDDELLIJK** met het gehydrateerde materiaal en breng het over naar het agarmedium.
- 

7


Ent de primaire kweekplaat/kweekplaten door het wattenstaafje voorzichtig over een derde van de plaat te rollen.
- 

8

Breng met een steriel entooq strepen aan om de kolonies beter te kunnen isoleren.
- 

9

Voer de KWIK-STIK™ af op de voor biologisch gevaarlijk materiaal vereiste wijze.



10

Incubeer de geënte primaire kweekplaat/kweekplaten **ONMIDDELLIJK** bij een temperatuur en onder omstandigheden die voor het micro-organisme geschikt zijn.