

GEBRUIKSAANWIJZINGEN



■ Parasite Suspensions in formaline

BEDOELD GEBRUIK

Parasite Suspensions van Microbiologics ondersteunen kwaliteitsgarantieprogramma's doordat ze dienen als vergelijkingsmonsters voor kwaliteitscontrole die specifieke parasietenpopulaties met bekende eigenschappen bevatten. Deze monsters ondersteunen formele kwaliteitsgarantieprogramma's doordat ze dienen als vergelijkingsmonsters voor kwaliteitscontroles die tot doel hebben de bekwaamheid van het personeel te documenteren bij het uitvoeren van procedures, en de uitslagen van microscopische tests correct te interpreteren. Parasite Suspensions van Microbiologics kunnen ook worden gebruikt voor opleidingsdoeleinden in een onderwijsomgeving.

SAMENVATTING EN UITLEG

Deze types monsters worden gewoonlijk gebruikt voor opleidingsdoeleinden, of voor het testen van de bekwaamheid van personeel bij het identificeren en testen van bepaalde organismen.

PRINCIPES

Dit product is bedoeld om te worden gebruikt met één of meer van de volgende technieken, afhankelijk van de kenmerken van het organisme:

- Immunoassay voor de detectie van antigenen
- Natte mount-microscopie om de morfologische eigenschappen van het organisme te observeren
- Zuurvaste kleuring om de kleuring en morfologische eigenschappen van het organisme te observeren

SAMENSTELLING

- Parasieten (zie de catalogus of de website: www.microbiologics.com voor specifieke bijzonderheden over elke parasiet)
- Fecaal materiaal
- Formalineoplossing, neutraal gebufferd, 10%



WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

GEVAAR. Giftig bij opname door de mond. Giftig bij inademing. Kan kanker veroorzaken.

- Alleen voor in vitro diagnostisch gebruik.
- Alleen voor professioneel gebruik.
- Zie het Veiligheidsinformatieblad op de website van Microbiologics www.microbiologics.com, voor alle voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies.
- Niet hanteren voordat u alle veiligheidsmaatregelen gelezen en begrepen heeft.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals nodig is. Draag veiligheidshandschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming.
- INDIEN INGESLIKT: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts/medicus bellen. De mond spoelen.
- Indien blootgesteld of betrokken: arts waarschuwen.
- Irriterend voor de huid. Na hantering grondig uw handen wassen.
- Kan een allergische reactie van de huid veroorzaken.
- Kan organen beschadigen.
- Verontreinigde werkkleding mag de werplek niet verlaten.
- Zeer irriterend voor de ogen. INDIEN HET IN DE OGEN KOMT: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen als dit mogelijk is. Blijven spoelen. Bij aanhoudende irritatie van de ogen: arts waarschuwen.
- Kan irriterend zijn voor de luchtwegen. Voorkom inademen van stof/rook/gas/mist/damp/spuitnevel. Alleen gebruiken in de open lucht of in een goed geventileerde ruimte.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- Hoewel deze suspensies gefixeerde, niet-levensvatbare organismen bevatten, moeten ze voor de veiligheid van al het personeel worden gehanteerd alsof ze biologisch gevaarlijk materiaal zijn.
- Het laboratorium moet uitgerust zijn, en de faciliteiten hebben, om biologisch gevaarlijk materiaal te ontvangen, verwerken, handhaven, op te slaan en af te voeren als afval.
- Alle producten en verpakkingen van Microbiologics zijn latexvrij.

INSTRUCTIES VOOR HET MENGEN

Het monster moet worden gemengd door het krachtig met de hand te schudden, of door het te laten wervelen.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

De Parasite Suspensions moeten worden bewaard op kamertemperatuur, maar worden niet aangetast door gekoelde opslag. Als de parasietsuspensies gekoeld zijn, moeten ze voor het gebruik op kamertemperatuur komen.

Opslaan op een goed geventileerde plaats. Houder goed gesloten houden. Afgesloten bewaren.

De houdbaarheid van deze producten bedraagt twee jaar vanaf de productiedatum.

De Parasite Suspensions mogen niet worden gebruikt als:

- Ze niet naar behoren zijn opgeslagen.
- De houdbaarheidsdatum verstreken is.

Neem de nationale en lokale voorschriften voor de afvoer van dit product als afval in acht.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN _____

Deze monsters kunnen worden gebruikt voor natte mounts, antigenedetectie en zuurvaste kleuring.

Voor alle procedures:

1. Meng de suspensie grondig door hem krachtig te schudden of te laten wervelen.
2. Laat de suspensie 5-10 minuten bezinken alvorens hem in een testprocedure te gebruiken.
3. Steek voorzichtig een pipet in de bodem van de ampul en verwijder één druppel voor het testen.
4. Raadpleeg de laboratorium-SOP's, de kleuringinstructies of de instructies van de fabrikant van de kit voor de testprocedures.

VEREIST, MAAR NIET MEEGELEVERD MATERIAAL EN INSTRUMENTEN _____

- Timer
- Transferpipetten
- Alle andere materialen die gespecificeerd worden door de SOP of kit die gebruikt wordt

KWALITEITSCONTROLE _____

Raadpleeg de laboratorium-SOP of de instructies van de fabrikant voor vereisten inzake kwaliteitscontroles.


BEPERKINGEN _____

Dit product is mogelijk niet geschikt voor gebruik met alle kits en procedures. Zie de instructies van de fabrikant van de kit voor bijzonderheden over de monsters. Alleen voor professioneel gebruik.

MICROBIOLOGISCHE TOESTAND _____

Dit monster bevat gefixeerde, niet-levensvatbare organismen.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

	Batchcode (Lot)
	Gevaar voor de gezondheid
	Referentiecatalogus
	Let op, zie de gebruiksaanwijzing
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	In vitro diagnostisch medisch hulpmiddel
	Fabrikant
	Temperatuurbegrenzing
	Gebruiken vóór
	Acute toxiciteit
	CE-merkteken
	Erkend vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap

PRODUCTGARANTIE

Gegarandeerd wordt dat deze producten voldoen aan de specificaties en prestaties die afgedrukt en geïllustreerd zijn in bijsluiters, instructies en ondersteunende literatuur. De garantie wordt, uitdrukkelijk of impliciet, beperkt als:

1. De procedures die zijn toegepast in het laboratorium strijdig zijn met de gedrukte en geïllustreerde richtlijnen en instructies.
2. De producten gebruikt zijn voor andere toepassingen dan het bedoelde gebruik dat geciteerd wordt in bijsluiters, instructies en ondersteunende literatuur.

REFERENTIES

1. Ash, L.R., and Orihel, T.C. Atlas of Human Parasitology- 2nd Ed. (American Society of Clinical Pathologists, 1984)
2. Garcia, L.S. A Practical Guide to Diagnostic Parasitology (ASM Press, 2009)

WEBSITE

Bezoek onze website voor actuele technische informatie en beschikbaarheid van producten.

www.microbiologics.com

VERANTWOORDINGEN



Microbiologics, Inc.
200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 USA



MediMark® Europe
11, rue Emile Zola B.P. 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France
Tel. +33 (0)4 76 86 43 22
Fax 33 (0)4 76 17 19 82
Email. info@medimark-europe.com

Klantenservice

Tel. 320-253-1640
Gratis nummer. 800-599-BUGS (2847)
E-mail info@microbiologics.com

Technische ondersteuning


Tel. 320-229-7045
Gratis nummer VS. 866-286-6691
E-mail techsupport@microbiologics.com
www.microbiologics.com

PARASITE SUSPENSIONS

GEÏLLUSTREERDE INSTRUCTIES


1

Meng de suspensie grondig door hem krachtig te schudden of te laten wervelen.

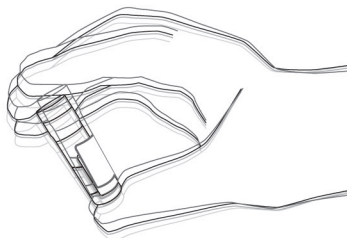

2


Laat de suspensie 5-10 minuten bezinken alvorens hem in een testprocedure te gebruiken.

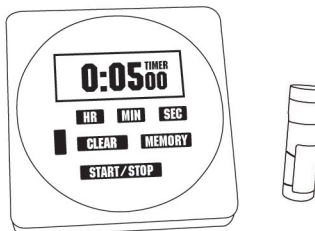

3

Steek voorzichtig een pipet in de bodem van de ampul en verwijder één druppel voor het testen.

Raadpleeg de laboratorium-SOP's, de kleuringsinstructies of de instructies van de fabrikant van de kit voor de testprocedures.

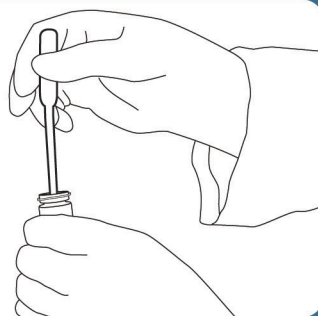

 **Microbiologics®**

A safer, healthier world.