

COMPRINET® PRO

ANTITROMBOSESTRØMPE

Langs- og tverrelastisk trombosestrømpe i myk tekstil med gradert kompresjon. Avansert strikketeknikk gjør at strømpen beholder sin graderte kompresjon og passform. Hele strømpen er i ett stykke og helt sømløs.

- For tromboseprofilakse i forbindelse med kirurgiske inngrep og immobilisering
- Kan brukes i opptil 4 uker før man går over til en kompresjonsstrømpe klasse 1
- Åpen tå, for inspeksjon
- Kompresjon rundt ankel er ca 18 mmHg
- Lateksfri
- Kan vaskes i maskin på 90 grader opptil 10 ganger uten at kompresjonsgraden påvirkes
- Inneholder polyamid og elastan. Silikonkanten på lårstrømpen inneholder neopren

Kontraindikasjoner: Ubehandlet arteriell insuffisiens, akutt hudinflammasjon, hudinfeksjoner, immobilisering



KNESTRØMPE

Ref nr	Størrelse	Farge	Omkrets, ankel	Omkrets, legg	Lengde, legg	Antall/pk	Antall/krt
77026-00	1 Small	Hvit	16-19 cm	23-30 cm	-43 cm	10 par	40 par
77027-00	2 Medium	Hvit	16-19 cm	30-38 cm	-43 cm	10 par	40 par
77028-00	3 Large	Hvit	24,5-29 cm	38-46 cm	-43 cm	10 par	40 par
77124-00	4 X-Large	Hvit	29-32 cm	46-53 cm	-43 cm	10 par	40 par
77133-00	5 XX-Large	Hvit	29-32 cm	53-66 cm	-43 cm	10 par	40 par

LÅRSTRØMPE

Ref nr	Størrelse	Farge	Omkrets, ankel	Omkrets, legg	Omkrets lår	Lengde lår til gluteal	Antall/pk	Antall/krt
46335-00	1 Small/Normal	Hvit	16-19 cm	23-30 cm	39-74 cm	64-80 cm	10 par	40 par
46336-00	2 Small/Lang	Hvit	16-19 cm	23-30 cm	39-74 cm	80-97 cm	10 par	40 par
46337-00	3 Medium/Normal	Hvit	19-24,5 cm	30-38 cm	45-80 cm	64-80 cm	10 par	40 par
46338-00	4 Medium/Lang	Hvit	19-24,5 cm	30-38 cm	45-80 cm	80-97 cm	10 par	40 par
46388-00	5 Large/Normal	Hvit	24,5-29 cm	38-46 cm	50-86 cm	64-80 cm	10 par	40 par
46389-00	6 Large/Lang	Hvit	24,5-29 cm	38-46 cm	50-86 cm	80-97 cm	10 par	40 par
77125-00	7 X-Large/Normal	Hvit	29-32 cm	46-53 cm	55-90 cm	64-80 cm	10 par	40 par
77128-00	8 X-Large/Lang	Hvit	29-32 cm	46-53 cm	55-90 cm	80-97 cm	10 par	40 par
77130-00	9 XX-Large/Normal	Hvit	29-32 cm	53-66 cm	55-90 cm	64-80 cm	10 par	40 par
77131-00	10 XX-Large/Lång	Hvit	29-32 cm	53-66 cm	55-90 cm	80-97 cm	10 par	40 par

HOFTESTRØMPE/LÅRSTRØMPE

Ref nr	Størrelse	Farge	Omkrets, ankel	Omkrets, legg	Omkrets lår	Lengde lår til gluteal	Antall/pk	Antall/krt
79611-02	1 Small/Normal	Hvit	16-19 cm	23-30 cm	41-81 cm	74-84 cm	10 par	40 par
79612-02	2 Small/Lang	Hvit	16-19 cm	23-30 cm	41-81 cm	84-97 cm	10 par	40 par
79613-02	3 Medium/Normal	Hvit	19-24,5 cm	30-38 cm	41-81 cm	74-84 cm	10 par	40 par
79614-02	4 Medium/Lang	Hvit	19-24,5 cm	30-38 cm	41-81 cm	84-97 cm	10 par	40 par
79615-02	5 Large/Normal	Hvit	24,5-29 cm	38-46 cm	41-81 cm	74-84 cm	10 par	40 par
79616-02	6 Large/Lang	Hvit	24,5-29 cm	38-46 cm	41-81 cm	84-97 cm	10 par	40 par

COMPRINET® PRO

ANTITROMBOSESTRØMPE



1 Før hånden inn i strømpen å ta tak i helen.



2 Vreng så strømpen ned til helen.



3 Sett strømpen på forfot frem til helen. Inspeksjonsåpningen skal være på oversiden av foten.



4 Dra strømpen forsiktig opp på leggen slik man gjør på en vanlig strømpe.



5 Før overlappen over helen.



6 Brett strømpen nedover, dra deretter oppover uten makt.




7 Kontroller at strømpen sitter riktig og er uten folder.




8 Kontroller at inspeksjonsåpningen sitter riktig og at den er helt åpen.



9 Dra opp strømpen. Ved bruk av lårstrømpe: Dra strømpen over hele låret.

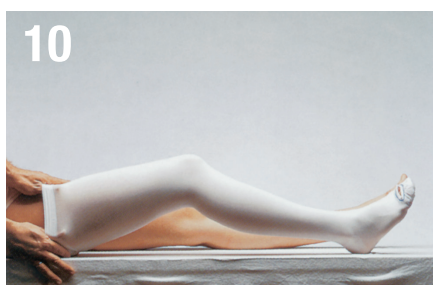

10 Inspiser at lårbåndet sitter riktig og er uten folder.

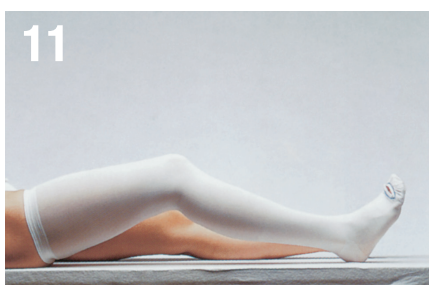

11

BSN medical AB

Uggledalsvägen 15 · SE-427 40 Billdal
Tlf: 22 98 04 00 Faks: 22 98 04 01

kundeservice.norge@bsnmedical.com
www.bsnmedical.no

BSNmedical