

Clinell Sporidical Wipes

Engangsservietter for rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr.

Produkttype

Tørre, pereddiksyregenererende engangsservietter som aktiveres med vann før bruk. Pereddiksyre er bredspektret og oksiderende med raske virketider på sopp/gjør, virus, bakterier og sporer.

Clinell Sporidical Wipes er definert som medisinsk utstyr klasse IIA og er CE-merket for bruk på medisinsk utstyr.

Kun til profesjonelt bruk.

Bruksområde:

For rask, trygg og effektiv rengjøring og desinfeksjons av overflater på ikke-invasivt medisinsk utstyr. God materialkompatibilitet. Brukes forebyggende og ved kjent smitte.

Bruk på forsvarlig vis. Les alltid merkeetiketten og produktopplysninger før bruk.

Bruksanvisning:

Produktet fuktes før bruk.




1 Ta på hansker (og evt. annet anbefalt verneutstyr). Ta ut en Sporidical serviett fra pakken.



2 Hold under kaldt vann 2-3 sek. slik at hele servietten er våt og klem ut overflødig væske så den ikke lenger er dryppende våt.



3 Rengjør området i en S-formet bevegelse eller på annen systematisk måte så overflatene blir godt dekket.

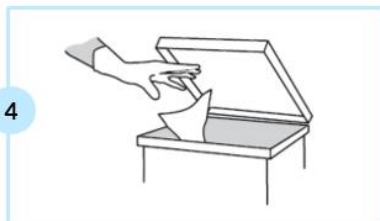

4 Kast servietten etter interne retningslinjer og la lufttørke.

Mikrobiologisk informasjon:

Clinell Sporicidal Wipes har blant annet bestått følgende tester: EN 14476, EN 13704, EN 17126, EN 14561, EN13727, EN 14562, EN 17126, EN 14348, EN 13624, EN16615, Full oversikt finnes i siste punkt i dokumentet, «Effektivitetstester».

Dosering:

Ferdig dosert, fuktes i vann før bruk.

Egenskaper

pH: ca. 9 (etter tilsetting av vann).

HMS

Se sikkerhetsdatablad for informasjon om HMS og sikker bruk av produktet.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Lagres tørt og beskyttet mot varme/sollys. Etter åpning skal emballasjen lukkes ordentlig for å beskyttes mot fuktighet. Holdbar 2 år etter produksjonsdato. Holdbar 1 mnd. Etter åpning.



08.2020

Effektivitetstester

Side 3 av 3

Effektivitetstabell for desinfeksjonsmiddel:		Clinell Sporicidal Wipes		
Aktiv substans/biocid:		Pereddiksyre, hydrogenperoksid		
EN-test	Mikroorganismer	Dosering	Tid	Resultat
EN 14476	<i>Mers-Cov</i>	Skitten	1 min	> log 4
EN 14476	<i>Adenovirus</i>	Skitten	1 min	> log 4
EN 14476	<i>Norovirus</i>	Skitten	1 min	> log 4
EN 14476	<i>Poliovirus</i>	Skitten	1 min	> log 5
ASTM E1053	<i>Herpes simplex virus</i>	Skitten	1 min	> log 4
EN 13704	<i>Clostridium difficile</i>	Skitten	2 min	> log 6
EN 13704	<i>Bacillus subtilis</i>	Skitten	5 min	> log 4
EN 17126	<i>Clostridium difficile</i>	Skitten	2 min	> log 4
EN 17126	<i>Bacillus subtilis</i>	Skitten	5 min	> log 4
EN 14561	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Skitten	30 sek	> log 5
EN 14561	<i>Staphylococcus aureus</i>	Skitten	30 sek	> log 5
EN 14561	<i>Enterococcus hirae</i>	Skitten	30 sek	> log 5
EN 14561	<i>Salmonella typhimurium</i>	Skitten	30 sek	> log 5
EN 13727	<i>Enterococcus faecium</i> (vre)	Skitten	10 sek	> log 5
EN 13727	<i>Enterococcus faecalis</i>	Skitten	10 sek	> log 4
EN 13727	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Skitten	10 sek	> log 5
EN 13727	<i>Acinetobacter baumannii</i>	Skitten	10 sek	> log 5
EN 13727	<i>Escherichia coli</i>	Skitten	1 min	> log 5
EN 14562	<i>Candida albicans</i>	Skitten	1 min	> log 4
EN 17126	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	Skitten	5 min	> log 4
EN 13624	<i>Candida auris</i>	Skitten	10 sek	> log 4
EN 14348	<i>Mycobacteria avium</i>	Skitten	2 min	> log 4
EN 14348	<i>Mycobacteria terrae</i>	Skitten	2 min	> log 6
EN 14348	<i>Mycobacteria bovis</i>	Skitten	2 min	> log 4
EN 16615	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	Ren	5 min	> log 5
EN 16615	<i>Candida albicans</i>	Ren	5 min	> log 4

Om koronavirus:

<https://gamahealthcare.com/latest/clinell-efficacy-against-wuhan-coronavirus-wn-cov>
<https://gamahealthcare.com/latest/clinell-antimicrobial-hand-wipes-effective-against-wuhan-novel-coronavirus>