


Attends® Adjustable



Brukerveiledning

Attends Adjustable gjør det mulig å fiksere produktet på best mulig måte for en optimal individuell passform. Følgende tre fikseringsmåter kan også brukes dersom brukeren sitter eller ligger.


Forberedelse

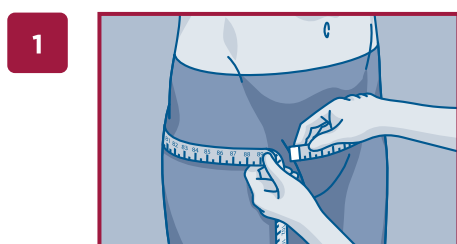

1 Mål hofte og livvidde, og velg det største målet for å finne riktig produktstørrelse.




2 Brett produktet helt ut, og plasser baksiden med belte/tape mot ryggen. Pass på at sidebåndene er helt brettet ut, og at den myke, tekstillignende baksiden er vendt utover, samt at den myke hvite overflaten er vendt inn mot huden.

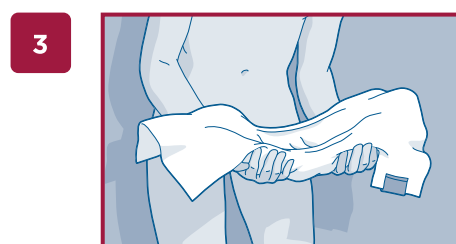

3 Brett og skålform produktet før fiksering.


Brukerveiledning A

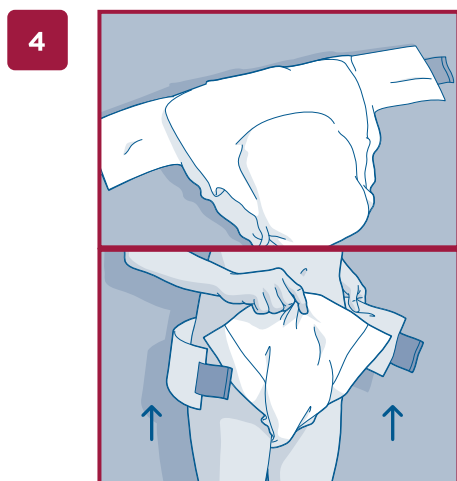

4 La fikseringstapene på begge sidene være åpne.

Plasser bleien mellom bena slik at den sitter tett og komfortabelt i skrittet. Bruk våtindikatoren på baksiden av bleien som hjelp for å justere og sentrere bleien.


Brukerveiledning B

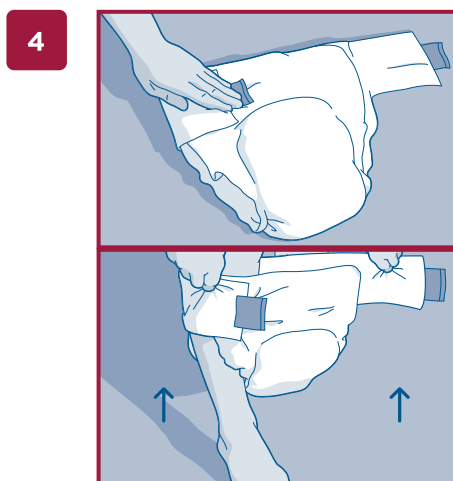

4 Fest fikseringstapen på den ene siden før bleien tilpasses.

Stig inn i produktet med et ben, dra bleien godt opp i skrittet og juster sånn at bleien sitter tett og komfortabelt. Bruk våtindikatoren på baksiden av bleien som hjelp for å justere og sentrere bleien. Alternativt kan du fikserer produktet rundt benet, og følge samme instruksjoner som over.

Brukerveiledning C

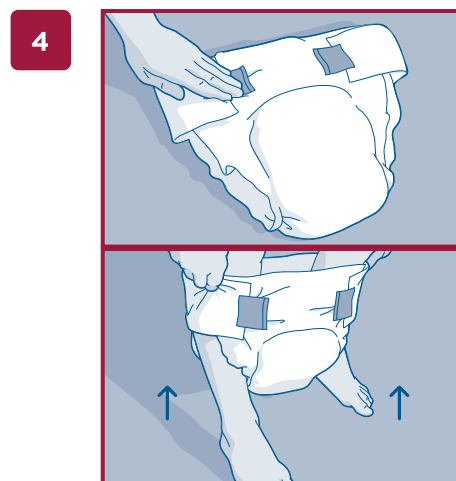


4 Fest fikseringstapen løst på begge sider før bleien tilpasses.

Ta på produktet som om det er en bukse og dra den godt opp i skrittet sånn at den sitter tett og komfortabelt. Bruk våtindikatoren på baksiden av bleien som hjelp for å justere og sentrere bleien.


Fortsettelse av brukerveiledning...

5

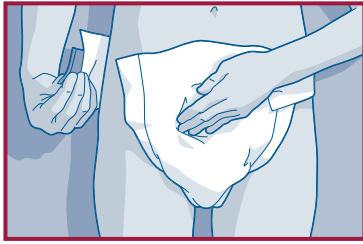


Dra forsiktig sidebåndene mot bleiens forside. Fikseringstapen kan festes hvor som helst på bleiens forside. Fest tapen ordentlig for en sikker fiksering av bleien.

6

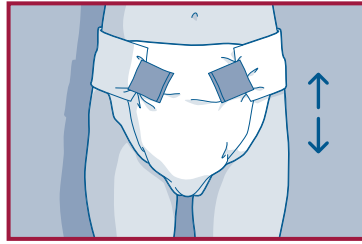

Fikseringstapen kan justeres ved behov slik at brukeren får bleien tilpasset individuelt. Tapen kan åpnes, tilpasses og lukkes flere ganger.

7

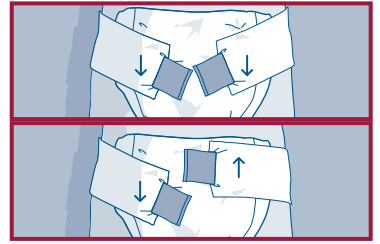

Fikseringstapene kan festes på forskjellige steder på bleien for å få best mulig tilpasning til kroppen.

Tips og råd

Utvalg

- Velg korrekt størrelse på produktet ut fra hofte- og livviddemål. Bruk det største målet.

Lekkasje

- Sjekk at du har riktig størrelse.
- Sjekk at bleien er fiksert riktig.

Avfall

- Rull sammen bleien og kast den i henhold til gjeldende avfallsregler.
- Kast ikke bleien i toalettet.

Fiksering

- Brett bleien forsiktig sammen i lengderetningen og skålform den.
- Sørg for at kanten på de fleksible lekkasjesperrene ligger på utsiden av bleien.
- Pass på at fikseringstapen ligger mot ryggen når bleien fikseres - da vet du at den settes på riktig vei.
- Bruk våtindikatoren for å sentrere bleien på kroppen.
- Fikseringstapen kan festes hvor som helst på bleiens forside. Fest tapen ordentlig for en sikker fiksering av bleien.
- Fikseringstapen kan justeres ved behov slik at brukeren får bleien tilpasset individuelt. Tapen kan åpnes, tilpasses og lukkes flere ganger.

Skifte

- Sjekk våtindikatoren. Hvis våtindikatoren har blitt utydelig på mer enn halvparten av bleiens lengde (60 %), eller hvis bleien inneholder avføring, bør man bytte. Hvis ikke kan produktet brukes lenger.
- Bruk bleien videre hvis den er ren og tørr ved toalettbesøk.
- Ikke fest tapen mot huden.
- Hvis mulig, fjern brukte bleier bakfra.
- Rengjør huden i henhold til lokale forskrifter. Rengjør forfra og bakover.
- Hvis mulig, unngå oljebaserte kremer. Pudder bør heller ikke brukes, da dette kan påvirke bleiens absorpsjonsevne og hindre at væsken blir absorbert. Huden kan da bli påvirket.

Attends® Adjustable



Attends Adjustable er testet og godkjent for hudvennlighet av proDERM, Institutt for dermatologisk forskning.

For mer informasjon, besøk www.attends.no