




PULL-ONS


Attends Pull-Ons er myke og diskrete bleiebukser som føles som vanlig undertøy. Bleiebuksene for engangs bruk kan enkelt trekkes opp og ned, og er utviklet for både lett, moderat og tung inkontinens.




Bruksanvisning

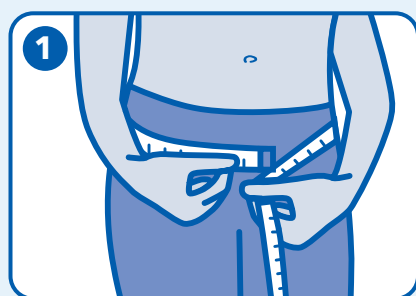


1 Mål hofte- og livvidde og velg det største målet for å finne riktig størrelse.

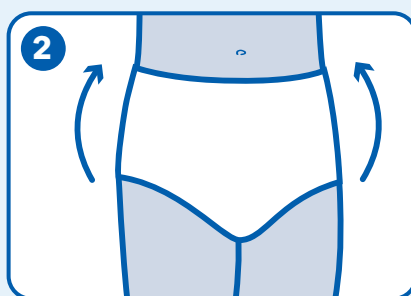


2 Du kan enkelt dra bleiebuksen opp og ned flere ganger som vanlig undertøy.

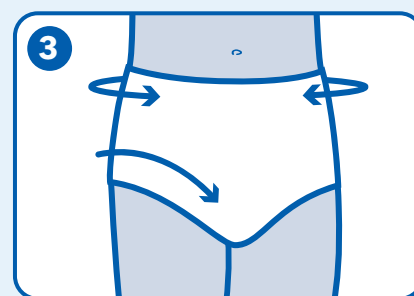

3 Elastisiteten i bleiebuksen gir en god og komfortabel passform.

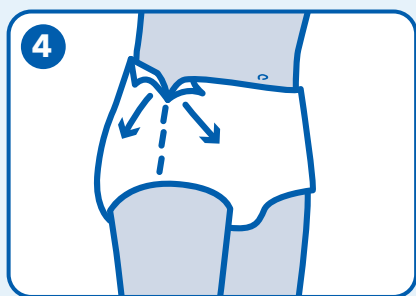

4 For å ta av og skifte bleiebuksen, kan du enkelt dra den ned eller rive den opp i sømmen på sidene.

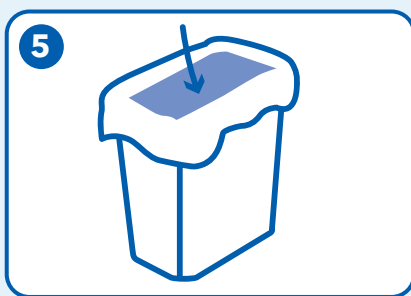

5 Rull bleiebuksen sammen og kast i restavfallet.

PULL-ONS

Tips og råd

Hvordan velge riktig produkt

- Velg riktig størrelse på Pull-Ons ved å måle hofte-og livvidde. Velg det største målet for riktig størrelse.
- Velg absorpsjonsnivå ut fra mengden urin. Start med et lavt nummer på absorpsjonsskalaen, før du bytter til et produkt med høyere absorpsjonsnivå.
- Pull-Ons er et godt alternativ for brukere som drar av seg bind og kroppsformede bleier.

Fiksering

- Farget elastikk viser hva som er bak på produktet. (Unntatt Pull-Ons 6XS som har farget elastikk foran på produktet.)
- Før du drar opp bleiebuksen, rull ned materialet rundt midjen og trekk bleiebuksen forsiktig opp over magen og baken.

Skifte

- Sjekk våtindikatoren. Hvis våtindikatoren har blitt utydelig på mer enn halvparten av bleiens lengde (60%), eller hvis bleien inneholder avføring, bør du bytte. Ellers kan produktet brukes lenger.

Avfallshåndtering

- Rull bleiebuksen sammen og kast i restavfallet.
- Ikke kast produktet i toalettet.



Attends Pull-Ons er testet og godkjent for hudvennlighet av proderm, institutt for dermatologisk forskning.