




Brukerveiledning


Forberedelse

1

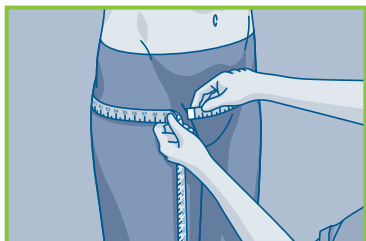


Mål hofte og livvidde, og velg det største målet for å finne riktig produktstørrelse.

2

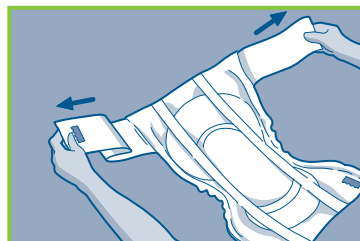

Åpne bleien helt, brett ut begge beltene separat. Plasser delen med midjebeltet mot ryggen og pass på at beltene er brettet helt ut før bleien fikses. Pass på at baksiden av bleien er på utsiden og den hvite, myke delen av bleien vender inn mot huden.

3

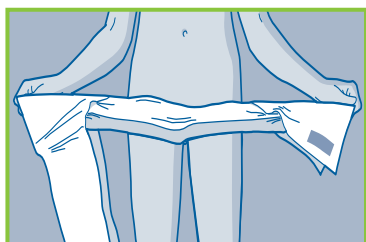

Brett og skålform bleien forsiktig i lengderetningen for å sikre at lekkasjesperrene står opp.

Fiksering

4



Fest beltet høyt rundt midjen med den blå borrelåsen for å holde bleien på plass. Trykk borrelåsen godt til beltet.

5




Dra forsiktig bleien fra bak til front, sørg for at lekkasjesperrene vender oppover. Dra bleien høyt opp mellom beina og tett inntil skrittet så du får en tettsittende passform.

6



Glatt ut bleien og dra den rett opp, fest den så med den blå borrelåsen mot midjebeltet.

7

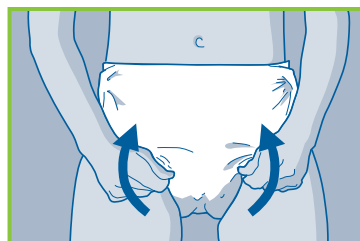

Hvis nødvendig, juster bleien for å få en sikker og komfortabel passform.

Tips og råd

Utvalg

- Velg riktig størrelse på Attends Flex ut fra hofte- og livviddemålet - velg det største målet.
- Velg absorpsjonsnivå ut fra mengden urin. Attends Flex er tilgjengelig i tre ulike absorpsjonskapasiteter: 8-9-10. Alle produktene har samme diskrete og komfortable passform.

Skifte

- Sjekk våtindikatoren. Hvis våtindikatoren har blitt utydelig på mer enn halvparten av bleiens lengde (60 %), eller hvis bleien inneholder avføring, bør man bytte. Hvis ikke kan produktet brukes lenger.
- Rene og tørre bleier kan brukes videre etter toalettbesøk.
- Ta av brukte bleier bakfra, hvis mulig.
- Rengjør huden i henhold til lokale rutiner. Rengjør forfra og bakover.
- Unngå oljebaserte kremer hvis mulig. Pudder bør heller ikke brukes, da dette kan påvirke bleiens absorpsjonssevne, og hindre at væsken blir absorbert. Huden kan da bli påvirket.

Fiksering

- Brett ut bleien forsiktig i lengderetningen. Husk å dra bleien rett opp før du fester borrelåsen til beltet. Rejuster bleien hvis nødvendig.
- Hold midjebeltet mot ryggen når bleien fikses, da vet du at den er korrekt plassert.
- Bruk våtindikatoren for å sentrere bleien.
- For å feste bleien, press borrelåsen godt til beltet.
- Hvis bleien fikses når brukeren ligger, følg samme prosedyre som for stående fiksering.

Lekkasje

- Sjekk at fiksering og vurdering av væskemengde er gjort riktig.
- Sjekk at du bruker riktig størrelse.
- Skift til høyere absorpsjon på bleien kun når du er sikker på at det ikke er problemer med fikseringen / størrelsen som fører til lekkasje.

Avfallshåndtering

- Rull sammen bleien og kast i henhold til lokal avfallshåndtering.
- Ikke kast bleien i toalettet.

Attends® Flex



Attends Flex er testet og godkjent for hudvennlighet av proDERM, Institutt for dermatologisk forskning.

For mer informasjon, besøk www.attends.no