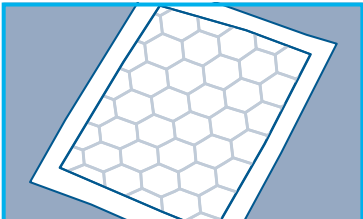


Attends® Cover-Dri

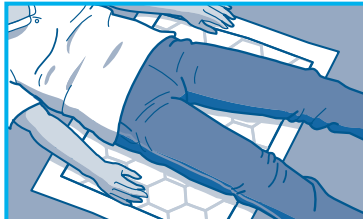


Brukerveiledning

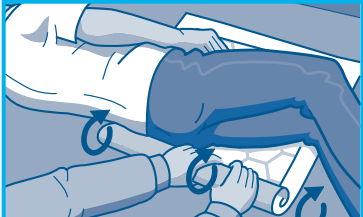
Forberedelser


1  Brett produktet helt ut og plasser den vanntette baksiden ned mot sengen, og de hvite absorberende putene vender opp mot huden.

Tilpasning

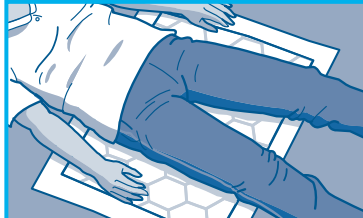
2  Plasser underlaget under brukeren.

Skifte

3  Legg brukeren på siden og rull sammen det brukte underlaget inn mot brukers ryggen.

4  Rull ut det nye underlaget og plasser det mot brukers ryggen.

5  Vend brukeren tilbake på underlaget, og pass på at beskyttelsen ligger flatt på sengen. Fjern den brukte beskyttelsen.

6  Legg brukeren i sin vanlige stilling.

Tips og råd

Utvalg

- Velg riktig produktstørrelse og absorpsjon ut fra en individuell klinisk vurdering.

Lekkasje

- Sjekk at du bruker riktig størrelse og riktig absorpsjonsnivå på underlaget for den spesifikke situasjonen.

Avfallshåndtering

- Rull sammen produktet og kast i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i toalettet.



Attends Cover-Dri er testet og godkjent for hudvennlighet av proDERM, Institutt for dermatologisk forskning.

For mer informasjon, besøk www.attends.no