

Caresono HD-2 Blærescanner

1. Trykk og hold Power/ startknappen (rød knapp) for å starte scanneren.

2. Forberedelser

- Pasienten bør ligge flat på sengen
- Be pasienten slappe av i mageregionen
- Påfør ultralyd gel på abdomen, ca. 3 – 5 cm ovenfor skambenet.



3. Pek mot blæren

- Stå på pasientens høyre side
- Sett probe mot gel på pasientens mage
- sett proben i litt skråstilling mot pasientens hode, opptil 30 grader. Bruk trykk mot mageregionen.



4. Skanning av blæren

- Trykk på skanne knappen for å starte preskanning og for å finne blæra
- Sørg for å fremstille blæra så stor som mulig og sentrer deg i midten for riktig resultat.
- Når blæra er fremstilt riktig trykker man en gang til på skanne knappen.
- Kalkuleringen er nå ferdig, og resultatet kommer opp i displayet.



5. Avlutt undersøkelse

- Når undersøkelsen er ferdig, skruv du av apparatet ved å holde inne start/Power knappen.
- Rengjør proben med alkoholfri desinfiserende serviett eller liknende.
- Tørk vekk gel fra pasienten.

