

Effektivt ødemreduksjon - enkle å legge



JOBST® Compri 2 og Compri 2 Lite 2-lags bandasjesystem til behandling av venøse og lymfatiske tilstander

For å lykkes med behandlingen av venøse leggsår i klassene C3-C6, er det viktig med riktig kompresjon. Undersøkelser har vist at det ved bruk av kompresjonsbandasje ofte gis for mye eller for lite kompresjon. Dette medfører en økt risiko for uønskede skader eller at kompresjonsbehandlingen ikke blir så effektiv som den burde være. Dette kan videre føre til forringelse av sårhelingen eller at tilhelingen blir betydelig forsinket.

Å stille riktig sårdiagnose er en forutsetning for å kunne gi riktig kompresjonsbehandling basert på om det er en venøs svikt eller om det i tillegg er en arteriell komponent. Blandingssår skal behandles med moderat kompresjon, mens rene venøse sår skal behandles med full kompresjon. Er det en ren arteriell defekt er kompresjon kontraindisert.



Compri 2 og Compri 2 Lite

Tilvalgmuligheter for å oppnå ønsket kompresjon.

Sykdoms- type	ABPI (ankel/arm indeks)	Kompresjons- nivå	
Venøs	>0.8	40 mmHg	JOBST Compri2
Venøs/ arteriell	0,5-0,8	20-30 mmHg	JOBST Compri2 lite
Arteriell	<0.5	Ingen kompresjon	-

CEAP-klassifisering av kronisk venøs sykdom (CVD)


CO	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Ingen synlige eller følbare tegn på venøs sykdom	Telangiectasier eller retikulære vener	Varicøse vener åreknuter	Ødem	a. Pigmentering og/eller eksem b. Lipodermatosklerose og/eller blank atrofi	Tilhelet venøst sår	Aktivt venøst sår
			← Ødemreduksjon →			

Enkel bandasjering



Foring/polstringsvatt med polyuretan skum

- Påføres med skumsiden inn mot huden
- Skummet er med på å transportere fukt slik at huden holdes tørr
- Lett å rive i, noe som gjør at en enkelt kan få lagt ekstra polstring der det er behov
- Lar seg strekkes i både lengde og bredden noe som gjør foringen enkel å legge
- **Lateksfri**

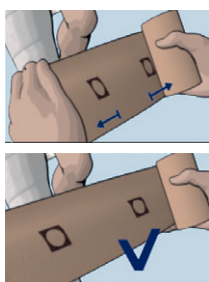

Selvheftende kortelastisk kompresjonsbandasje

- Strekkindikatorne på bindet gjør det trygt å legge
- Når du strekker bindet blir ovalen til en rund sirkel. Slik vet du at du har rett strekk som sikrer riktig kompresjon, mellom 30-40 mmHg
- 2 forskjellige kompresjonsklasser, se tabell
- Bindet kan justeres under påføring
- Kompresjonssystemet kan ligge på inntil 7 dager
- **Lateksfri**



Produktoversikt

JOBST Compri 2 - Normal kompresjon (ABPI >0,8)

Varenr	Ankelomkrets	Trykk	Pakning
308129	18-25 cm	40 mmHg	1 set
308130	25-32 cm	40 mmHg	1 set

JOBST Compri 2 Lite - Lett kompresjon (ABPI 0,5-0,8)

Varenr	Ankelomkrets	Trykk	Pakning
308171	18-25 cm	20-30mmHg	1 set
308172	25-32 cm	20-30mmHg	1 set

