


Kort beskrivelse av testprosedyren



1 Fjern folien fra kyvetten. Ikke berør den klare flate delen nederst på kyvetten.



2 Hold Sample Collector nesten horisontalt like under overflaten av prøvematerialet. Fyll kapillærdelen av Sample Collector helt.

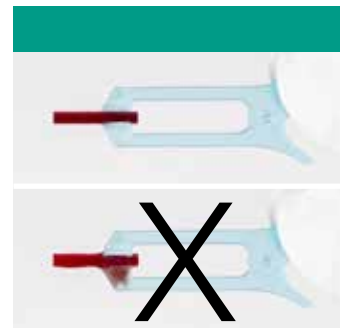

Viktig! Kontroller at kapillærdelen er fullstendig fylt. **Ikke tørk av Sample Collector!** Hvis det er prøvemateriale på utsiden, må Sample Collector kastes.



3 Sample Collector må settes i kyvetten innen 2 minutter. Lukk kyvetten med reagenskorken, ikke trykk ned den indre turkise delen av korken. Prøven må analyseres innen 2 timer.



4 Velg *Analyse* på skjermen på QuikRead go-instrumentet. Sett kyvetten ned i analysebrønnen med strekkoden vendt mot deg.



5 Når analysen er fullført vises resultatet på skjermen og kyvetten skyves automatisk opp fra analysebrønnen.

Les pakningsvedlegget før du utfører testen.



Oppbevaring av reagenser



Uåpnet kit

Oppbevart i 2–25°C:
til utløpsdato på kittet



Sample Collector kit

Oppbevart i 2–25°C:
til utløpsdato på kittet



Uåpnede kyvetter i åpnet aluminiumsfolie

Oppbevart i 2–8°C:
6 måneder

Oppbevart i 18–25°C:
3 måneder



Boksen med reagenskorker

Uåpnet i 2–25°C:
til utløpsdato på kittet

Etter første åpning ved
2–25°C: 6 måneder



Åpnet kyvette

Prøven er stabil i buffer
i to timer. Testen må utføres
innen to timer etter åpning
av kyvetten.



easy CRP kontroller (se tabellen nedenfor)

Uåpnet flaske i 2–8°C:
til utløpsdato på flasken

Åpnet flaske i 2–8°C:
inntil 2 måneder



Orion Diagnostica Oy/Norge
Fredrik Selmers vei 6, 0663 Oslo
www.oriondiagnostica.no, www.quikread.com, www.tackleamr.com

8100-02NO, 04/2019.

Produkt	Varenr.
QuikRead go easy CRP, 50 tester » med 10 µl Sample Collector	153287
Ultrasensitive CRP kontroll	132698
QuikRead go wrCRP kontroll	153038
QuikRead go wrCRP kontroll høy	153039
QuikRead go CRP kontroll lav	153765
QuikRead go CRP kontroll	153764
QuikRead go CRP kontroll høy	153763
QuikRead go Instrument	135867

Se mer informasjon på: www.quikread.com