

# Cutimed® Sorbion®

Closing wounds. Together.

**Perfekt  
samarbeid**

Cutimed® Sorbion®  
– for effektiv  
sårbehandling



**THERAPIES. HAND IN HAND.**

**BSN** medical

an Essity company

# INNHOOLD

side 4	Hydration Response Technology
side 6	Performance properties in detail
side 8	Competences become advantages
side 9	<b>Cutimed® Sorbion® Sachet S</b> Absorberer og beholder
side 9	<b>Cutimed® Sorbion® Sachet Extra</b> Forberedelse av sårsengen – Vår sterkeste primærbandasje
side 10	<b>Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star</b> Forberedelse av sårsengen i sin mest fleksible form
side 10	<b>Cutimed® Sorbion® Sachet XL</b> Sårbandasje til behandling av omfattende sår
side 11	<b>Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage</b> For katetere og dreneringsslanger
side 12	<b>Cutimed® Sorbion® Sana</b> Atraumatisk sårbandasje – beskytter og absorberer
side 13	<b>Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star</b> Fleksibel atraumatisk sårbandasje
side 14	Produktoversikt

# CUTIMED® SORBION®

## YTELSE UTEN KOMPROMISSER


**Cutimed® Sorbion® Sachet** og **Cutimed® Sorbion® Sana** er effektive sårbandasjer som egner seg til nesten alle moderat til kraftig væskende sår. Sårbandasjen benytter Hydration Response Technology, som på en fordelaktig og kostnadseffektiv måte møter utfordringene i moderne sårbehandling. I kombinasjon med målrettet medisinsk behandling, bidrar **Cutimed® Sorbion®** til å lindre symptomene og øke livskvaliteten for pasienter med akutte og kroniske sår.



# HYDRATION RESPONSE TECHNOLOGY

## DET PERFEKTE SAMSPILLET MELLOM PRODUKTMATERIALER

**Cutimed® Sorbion®**-teknologien skiller seg ut med det ideelle samspillet mellom ulike ytelsesfaktorer. Takket være perfekt harmoniserte produktkomponenter – den unike fibermatriksen, de geldannende polymerene og det ultrasonisk forseglede ytre laget, garanterer produktet en sikker behandling av sterkt væskende sår. **Cutimed® Sorbion®**-bandasjene kapsler sårvæsken inn i kjernen av bandasjen, og sikrer dermed et optimalt fuktig sårmiljø med ideelle betingelser for heling.

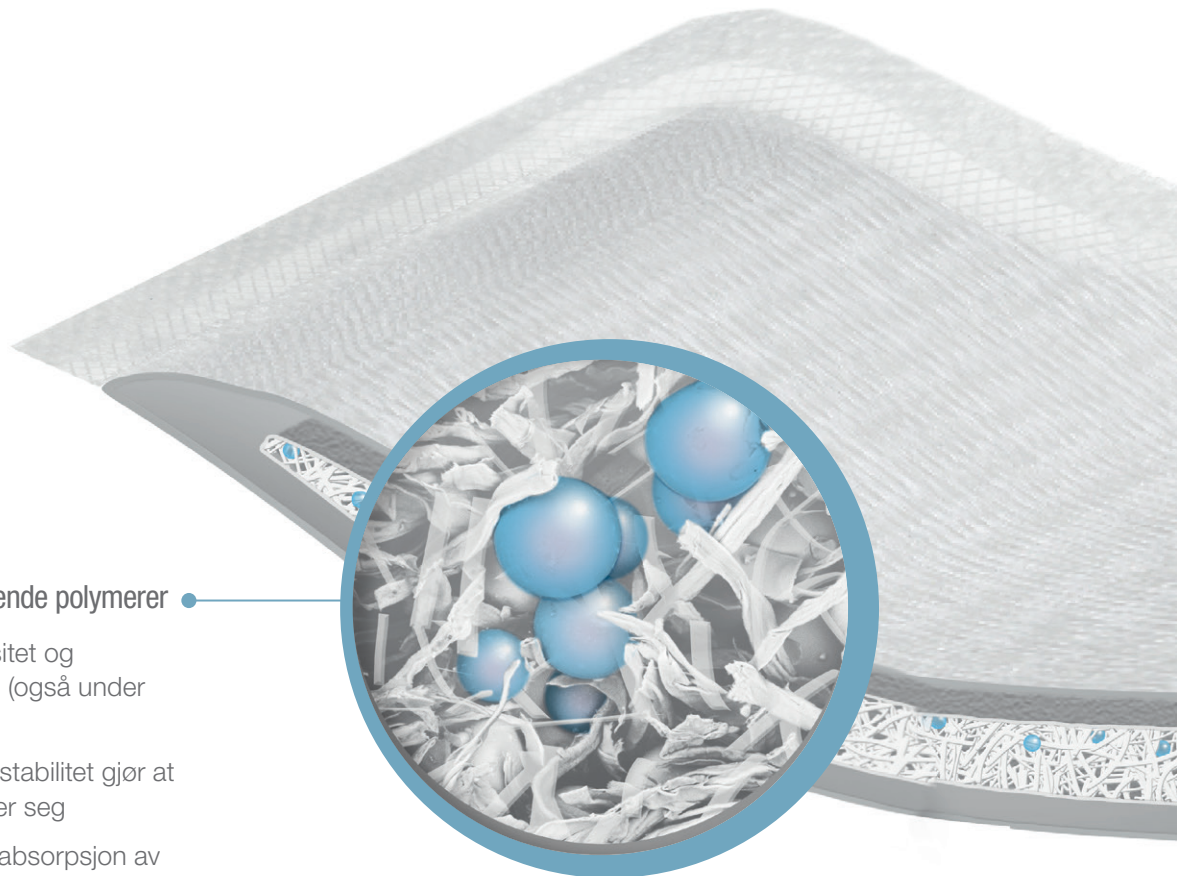


### Fibermatriks og geldannende polymerer

- Høy oppsugingskapasitet og retensjon av sårvæske (også under kompresjon)
- Overlegen dimensjonsstabilitet gjør at bandasjen ikke klumper seg
- Ideell balanse mellom absorpsjon av sårvæske og bevaring av optimal fuktighet i sårsengen


Ekspansjonskant og ultrasonisk forsegling

- Uten klebe- og bindemidler
- Høy rivestyrke, selv ved full kapasitet
- Flat ekspansjon av bandasjen, selv når bandasjen er helt mettet

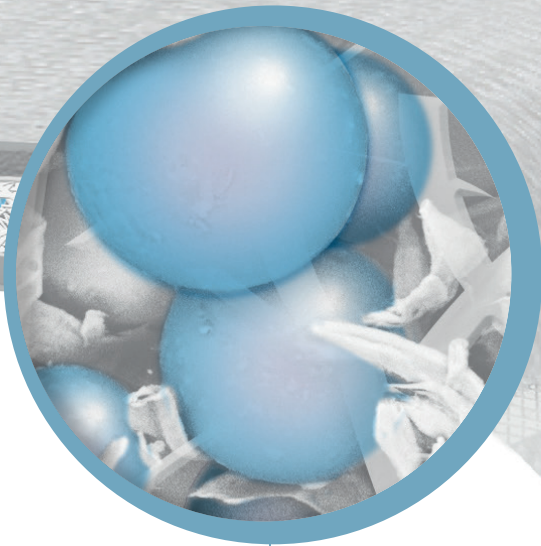

• Polymerene ekspanderer mot såret

- Sikrer maksimal kontakt med sårsengen

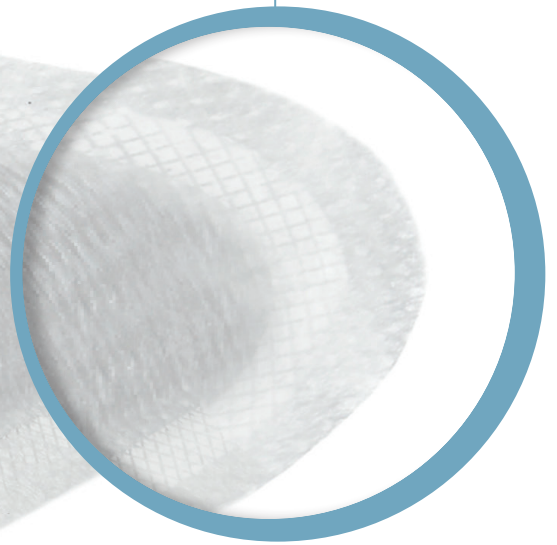


# CUTIMED® SORBION®


## EGENSKAPER I DETALJ

Det som gjør **Cutimed® Sorbion®**-bandasjene enestående, er ikke bare valget av spesialmaterialer, men også samspillet mellom viktige ytelsesparametre. Spesielt er det de ulike produktdetaljene som utvikler sin virkning på såret, og gjør at **Cutimed® Sorbion®**-bandasjene skiller seg ut i mengden av behandlingsløsninger som finnes på markedet.

### INTERN MATRIKS

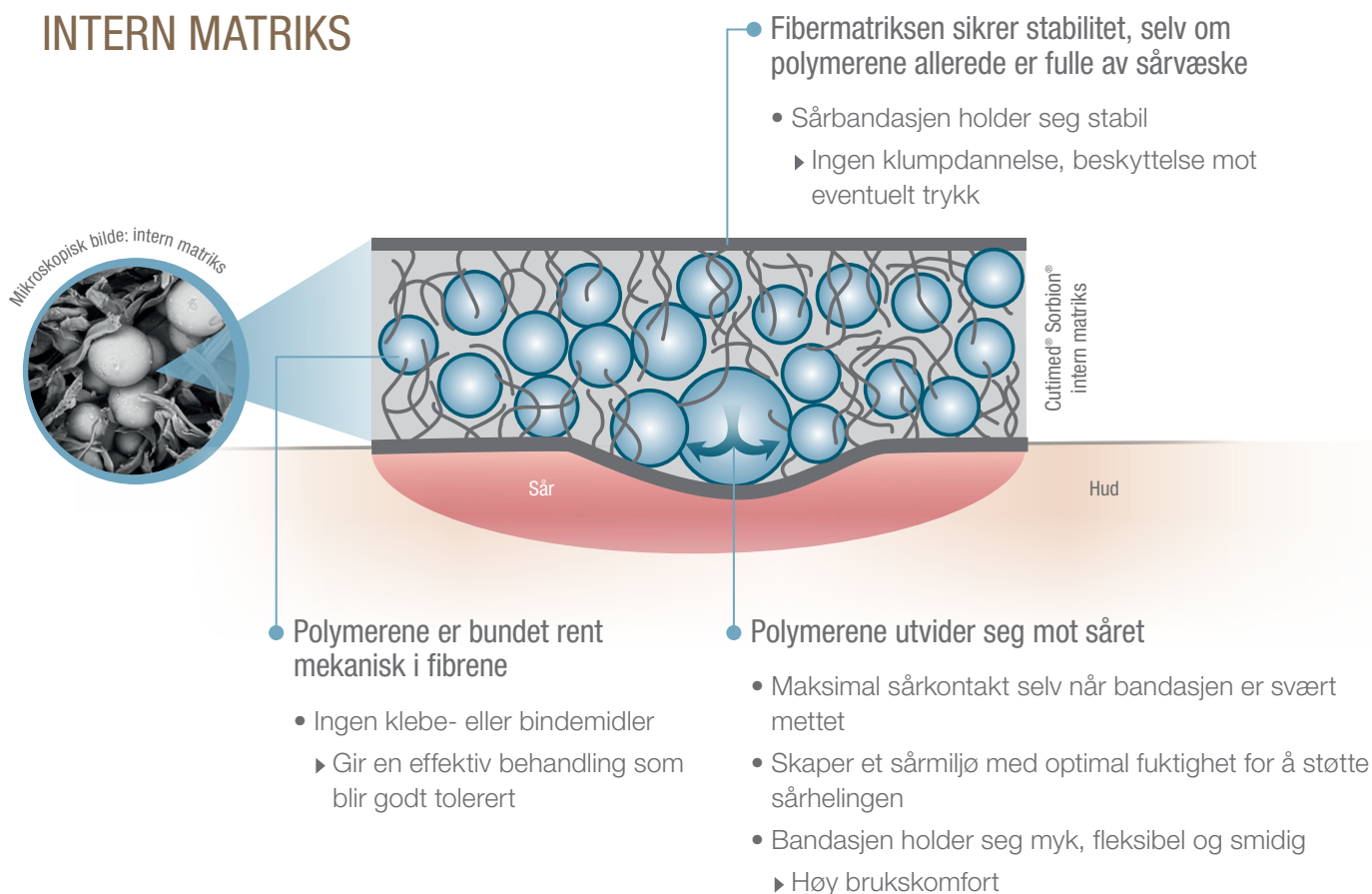


### EKSPANSJONSKANT

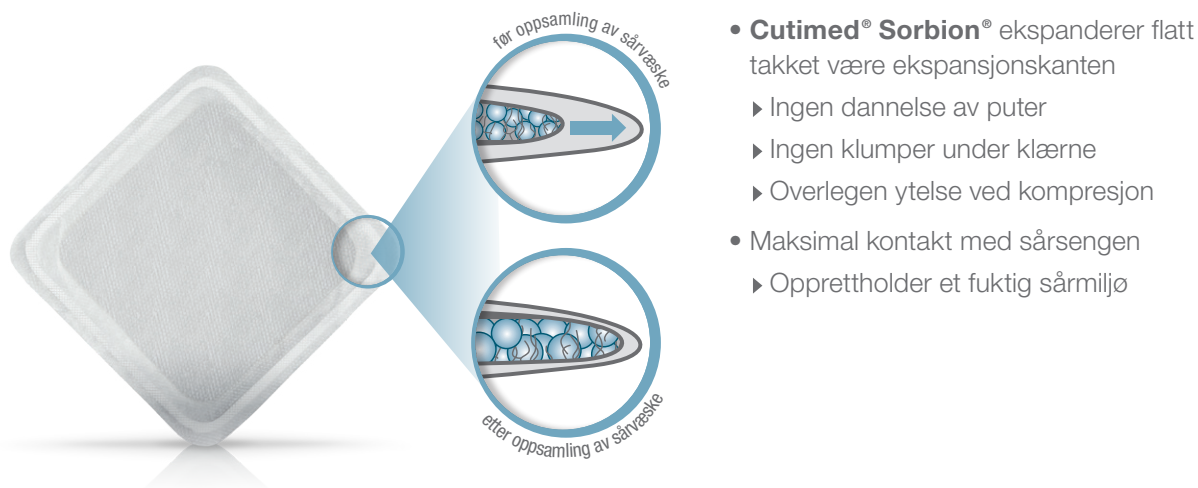

## EKSUDATBEHANDLING

**Cutimed® Sorbion® Sachet** og **Cutimed® Sorbion® Sana** har en ypperlig evne til rask absorpsjon av store mengder sårveske, for så å kapsle den inn i kjernen av bandasjen – selv under kompresjon. På den måten reduserer bruken av **Cutimed® Sorbion®** hyppigheten av bandasjeskift, og også de samlede utgiftene til materialer gjennom hele behandlingsperioden.

### Cutimed® Sorbion® – glimrende absorpsjon

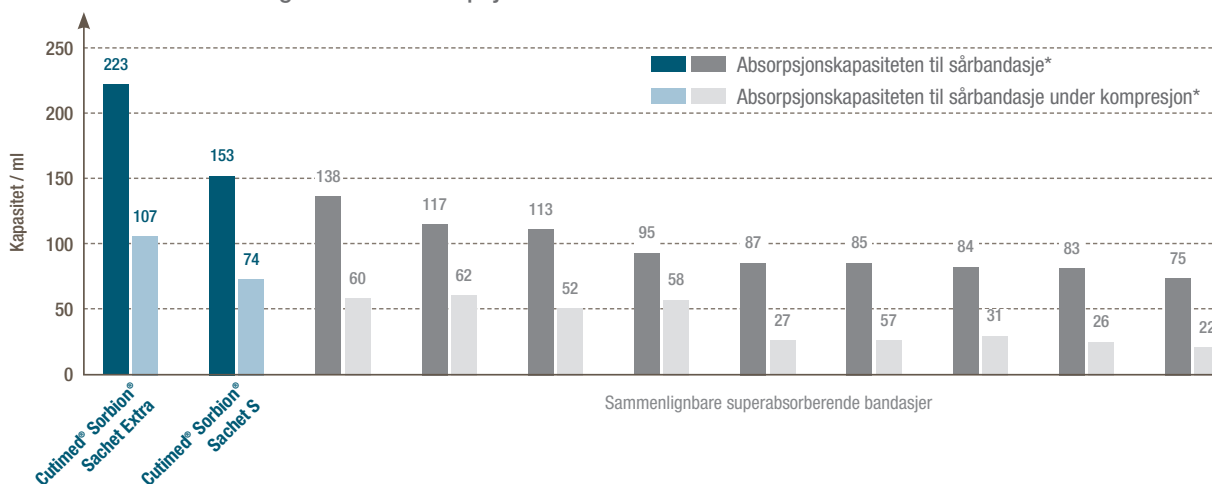

Resultater for ml per 10x10cm bandasje. Evalueringen er basert på EN 13726-1:2002 av et uavhengig laboratorium: SAS hagemann GmbH, Weberstraße 3, 72160 Horb am Neckar, Tyskland (Servicelaboratorium for vitenskapelig analyse); testresultatene er avrundet.

\* BSN medical GmbH, arkivdata

### Cutimed® Sorbion® – Forberedelse av sårsengen

**Cutimed® Sorbion®**-bandasjer har potensial til å fjerne faktorer som fører til kroniske sår, og på den måten støtte sårhelingen.

#### Gir skånsom debridering


- **Cutimed® Sorbion® Sachet:**  
Dødt vev og toksiner fjernes varsomt ved bandasjeskift (myk debridering)
- **Cutimed® Sorbion® Sana:**  
Støtter autolytisk debridering

#### Reduserer konsentrasjonen av og aktiviteten til MMP

- Beskytter vevet mot skadelige virkninger av et overskudd av sårproteaser

#### Immobiliserer mikroorganismer


Reduserer risikoen for krysskontaminering ved å kapsle inn bakterier som transporteres i sårvesken

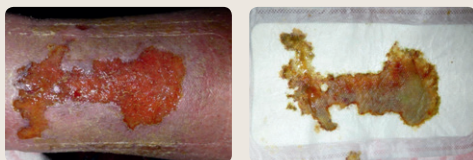

Myk debridering og vertikal absorpsjon med **Cutimed® Sorbion® Sachet**

# EGENSKAPER BLIR TIL FORDELER

Produkteegenskapene begynner bare å reflektere kompetansen når de fører til omfattende fordeler for alle involverte. Helheten av disse fordelene støtter ikke bare helbredelsesprosessen aktivt, men bidrar på en avgjørende måte til pasientens livskvalitet og forenkler arbeidet til brukerne.

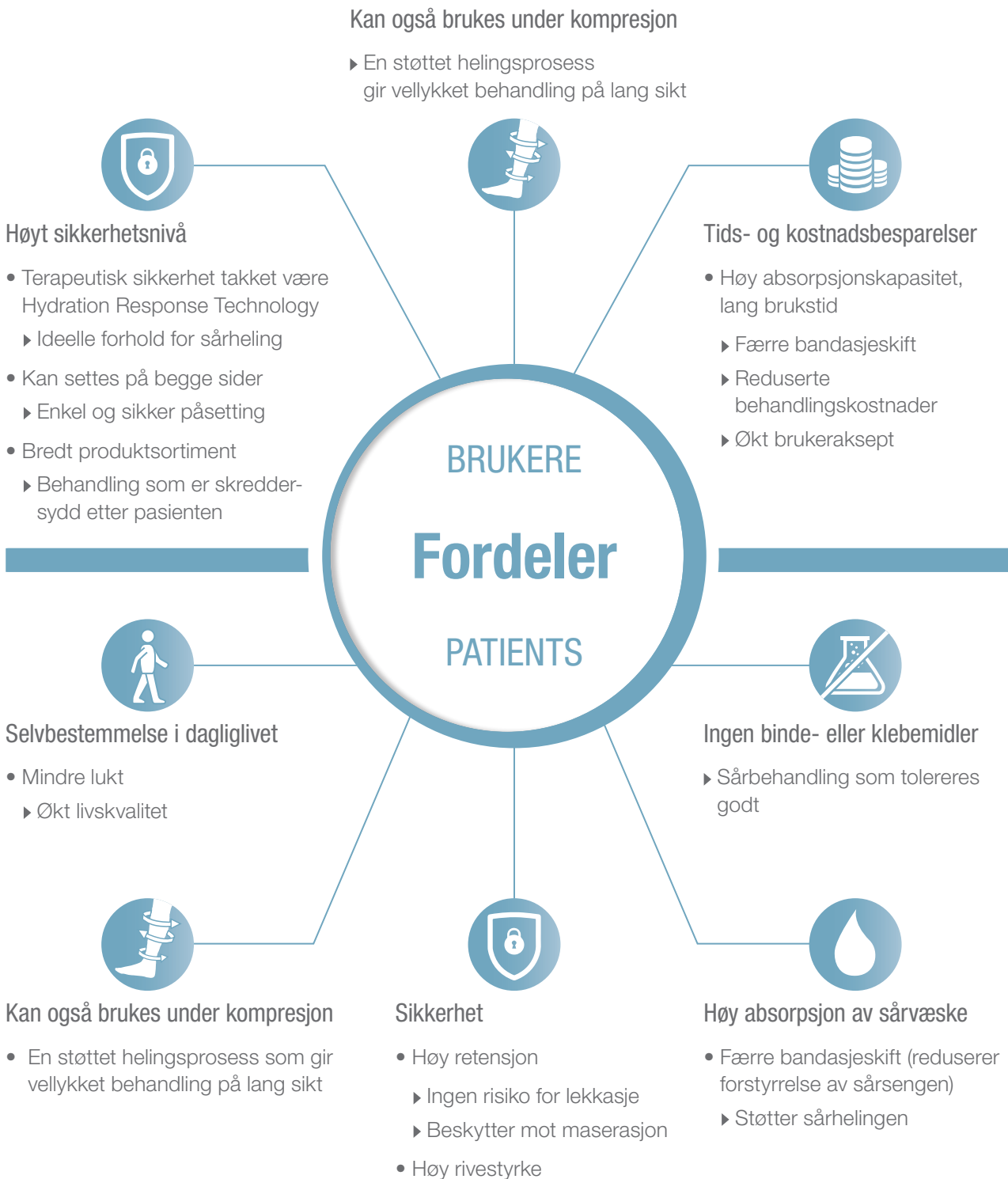

# CUTIMED® SORBION® SACHET

Enten det er behov for særlig høy absorpsjonskapasitet, imponerende tilpasning til kroppskonturer eller spesialutviklede former: det omfattende **Cutimed® Sorbion® Sachet** -sortimentet har det ideelle produktet uansett sårtype. Med den enkle påføringen og den unike Hydration Response Technology, er **Cutimed® Sorbion®**-bandasjer det rette valget for behandling av sterkt væskende sår.

## CUTIMED® SORBION® SACHET S

### Superabsorberende bandasjer

Den klassiske varianten, tilpasset til mange forskjellige sårtyper.

- Utmerket kapasitet for såreksudat
- Høy retensjon av absorberte væsker
- Skaper et fuktig sårmiljø ved geldannelse
- Fjerner dødt vev i såret



## CUTIMED® SORBION® SACHET EXTRA

Superabsorberende bandasjer for ekstremt høye nivåer av sårveske

**Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA** har enda høyere absorpsjonsevne, retensjonsgrad og evne til å binde patogener i såret enn Sorbion Sachet S.

- Eksepsjonelt høy absorpsjonsevne
- Spesielt høy retensjonsgrad
- Skaper et fuktig sårmiljø ved geldannelse
- Kan også brukes under kompresjon

### Indikasjoner

#### **Cutimed Sorbion Sachet S/Extra:**


- Venøse bensår/sår med blandet etiologi
- Diabetiske fotsår
- Trykksår
- Sekundærhelende sår, væskende sår etter laparotomi
- Maligne sår og andre liknende typer kraftig væskende sår

## CUTIMED® SORBION® SACHET MULTI STAR

Superabsorberende bandasje med fleksibel form

Takket være den spesielle formen, kan **Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star** brukes på områder der det kreves en mer fleksibel løsning, som til tær, hæler, føtter, sacrum, bryst, armhuler, albuer eller ved dype sår.

- Fleksibel form for allsidig påsetting
- Høy absorpsjonsevne
- Høy retensjonsgrad
- Tilpasser seg etter kroppens konturer

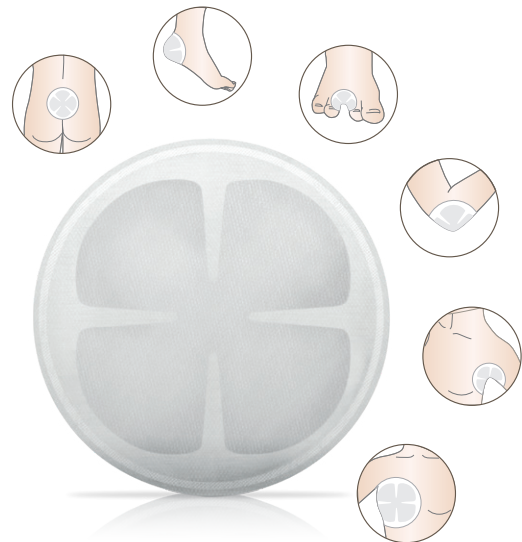

### Indikasjoner

#### Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star

- Diabetiske fotsår
- Væskende maligne sår
- Trykksår
- Venøse bensår

## CUTIMED® SORBION® SACHET XL

Superabsorberende bandasjer for store sår

Formen og størrelsen på **Cutimed® Sorbion® Sachet XL** er spesielt utviklet for behandling av moderat til sterkt væskende sår på steder der det er krevende å sette på en bandasje, slik som: Legg, sacrum, thorax, lår, nedre del av magen.

- Økt sikkerhet ved at det bare er én bandasje
- Forenkler behandlingen av store sår
- Kan også brukes under kompresjon



### Indikasjoner

#### Cutimed® Sorbion® Sachet XL

- Venøse bensår/sår med blandet etiologi
- Diabetiske fotsår
- Trykksår
- Sekundærhelende sår, væskende sår etter laparotomi
- Maligne sår og andre liknende typer kraftig væskende sår

## CUTIMED® SORBION® SACHET S DRAINAGE

### Superabsorberende bandasje med splitt

Spesielt utviklet med tanke på kateter og drenering osv. Den spaltede utformingen sikrer en spesielt god passform ved åpninger for slanger osv.

- Rask og sikker absorpsjonsevne for væske
- Høy retensjonsgrad
- Former seg bra rundt ulike åpninger



### Indikasjoner

#### Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage


- Til bruk ved tuber/katetre
- Til bruk ved drenering

# CUTIMED® SORBION® SANA

## FORDELER MED DEN TREDIMENSJONALE LOMMEN:

Produktserien **Cutimed® Sorbion® Sana** kombinerer fordelene til **Cutimed® Sorbion® Sachet** med den ekstra fordel ved atraumatiske bandasjeskift.

Takket være den spesielle tredimensjonale strukturen på lommen, blir kontaktområdet med sårbunnen minimert. Derfor er **Cutimed® Sorbion® Sana** spesielt velegnet til behandling av sår når atraumatiske og smertefrie bandasjeskift er det aller viktigste. **Cutimed® Sorbion® Sana** er også ideell til sår med en ujevn helingsprosess (**øyer med epitelisering / tørrere sårområder**), i palliativ omsorg og for smertesensitive pasienter.

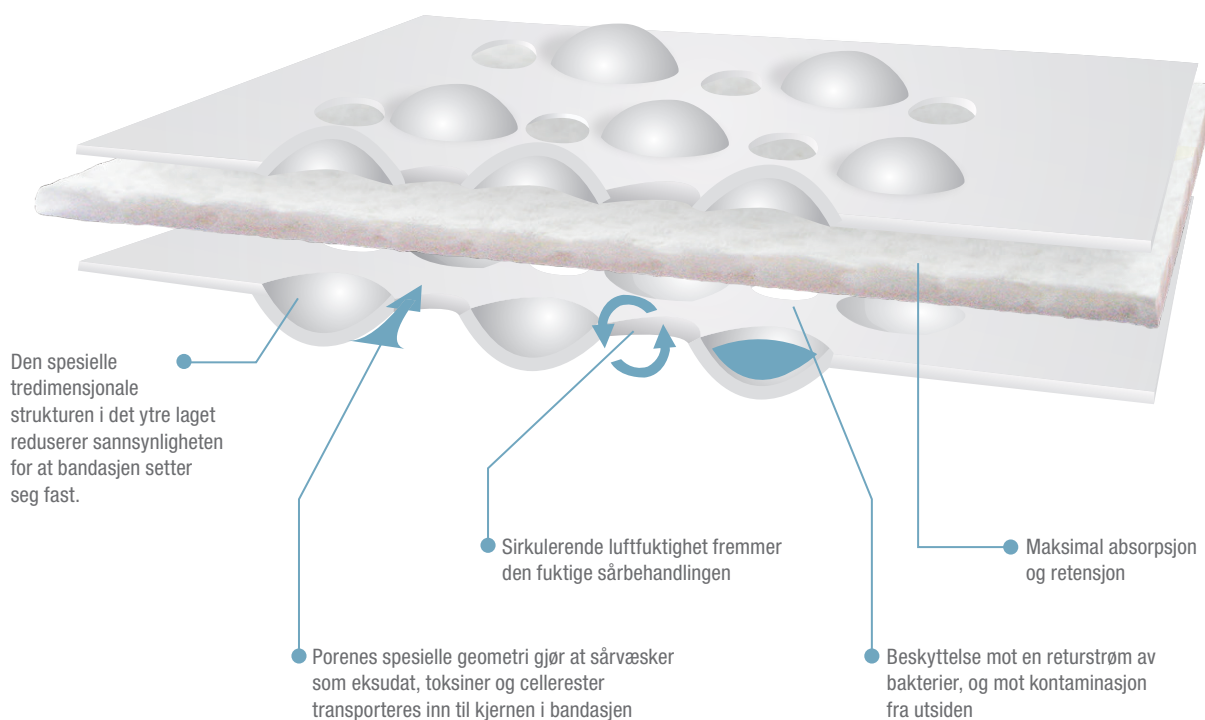

### Indikasjoner


Alle **Cutimed® Sorbion® Sana** er atraumatiske superabsorberende bandasjer som egner seg til bruk på moderat til kraftig væskende sår.

- Trykksår
- Venøse bensår
- Diabetiske fotsår
- Traumatiske sår
- Brannskader
- Epidermolysis bullosa

## CUTIMED® SORBION® SANA

Superabsorberende, atraumatisk bandasje

Den klassiske varianten av **Cutimed® Sorbion® Sana**, tilpasset til mange forskjellige sårtyper. Enkel å sette på og har høy brukerkomfort.

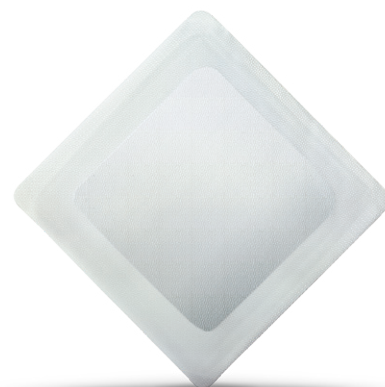


---

## CUTIMED® SORBION® SANA MULTI STAR



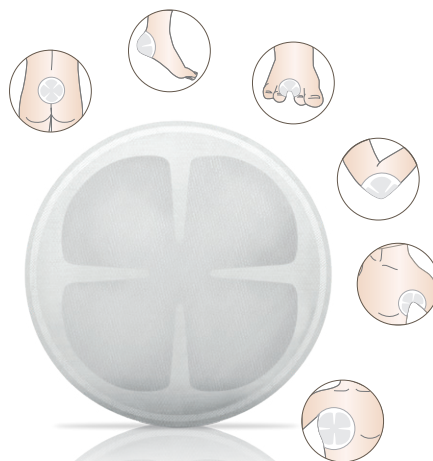

Superabsorberende, atraumatisk bandasje med fleksibel form

Takket være den spesielle formen, kan **Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star** brukes til områder der det kreves en mer fleksibel løsning, f.eks. tær, hæler, føtter, sacrum, bryst, armhuler, albuer eller ved dype sår.






# PRODUKTOVERSIKT

## Bestillingsinformasjon – Cutimed® Sorbion®

Cutimed® Sorbion® Sachet S 	Art.Nr.	Art. per enhet
<b>Cutimed® Sorbion® Sachet S</b> 7.5 x 7.5 cm   3 x 3 inch	7323200	10
	7323201	25
	7323202	50
<b>Cutimed® Sorbion® Sachet S</b> 12 x 5 cm	7323203	10
	7323204	25
	7323205	50
<b>Cutimed® Sorbion® Sachet S</b> 10 x 10 cm	7323206	10
	7323207	25
	7323208	50
<b>Cutimed® Sorbion® Sachet S</b> 20 x 10 cm	7323209	10
	7323210	25
	7323211	50
<b>Cutimed® Sorbion® Sachet S</b> 15 x 15 cm	7323212	10
	7323213	25
	7323214	50
<b>Cutimed® Sorbion® Sachet S</b> 20 x 20 cm	7323215	10
	7323216	25
	7323217	50
<b>Cutimed® Sorbion® Sachet S</b> 30 x 20 cm	7323218	10
	7323219	25
	7323220	50
<b>Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA </b>		
<b>Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA</b> 5 x 5 cm  <b>Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA</b> 7.5 x 7.5 cm  <b>Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA</b> 10 x 10 cm  <b>Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA</b> 20 x 10 cm  <b>Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA</b> 20 x 20 cm  <b>Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA</b> 30 x 20 cm	7323400	5
	7323401	5
	7323402	5
	7323403	5
	7323404	5
	7323405	5
<b>Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star </b>		
<b>Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star</b> ø 8 cm  <b>Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star</b> ø 14 cm	7323700	5
	7323701	10
	7323702	5
	7323703	10
<b>Cutimed® Sorbion® Sachet XL </b>		
<b>Cutimed® Sorbion® Sachet XL</b> 45 x 25 cm	7324000	10





### Sår dybde

-  Overfladisk
-  Dypt
-  Overfladisk + dypt




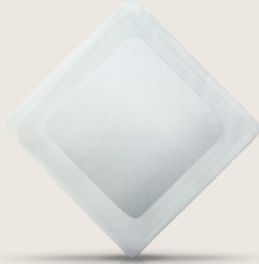


### Sår fase

-  Nekrotisk
-  Infisert
-  Fuktig nekrose
-  Granulasjon
-  Epitelisering

### Ekssudatnivå

-  Tørt til lavt
-  Lavt til moderat
-  Moderat til sterkt
-  Sterkt til meget sterkt

## Bestillingsinformasjon – Cutimed® Sorbion®

Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage 		Art.Nr.	Art. per enhet	
Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage 		7324100	10	
		7324101	25	
		7324102	50	
Cutimed® Sorbion® Sana 		Art.Nr.	Art. per enhet	
Cutimed® Sorbion® Sana 	8.5 x 8.5 cm	7323300	10	
		7323301	25	
	Cutimed® Sorbion® Sana	7323303	10	
	12 x 12 cm	7323304	25	
	Cutimed® Sorbion® Sana	7323306	10	
	22 x 12 cm	7323307	25	
	Cutimed® Sorbion® Sana	7323309	10	
	22 x 22 cm	7323310	25	
	Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star 		Art.Nr.	Art. per enhet
	Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star 	Ø 11 cm	7323800	5
		7323801	10	
Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star		7323802	5	
Ø 17 cm		7323803	10	

Produktsortiment er forskjellig fra land til land.

# INTEGRERTE BEHANDLINGSLØSNINGER

BSN medical kombinerer et bredt produktsortiment innenfor lymfologi, ortopedi og sårpleie/kompresjonsbehandling med en sterk teknisk kompetanse som tilfredsstiller markedets krav til redusert kompleksitet og mer effektive behandlinger. Gjennom å stadig videreutvikle **våre heldekkende integrerte behandlingstilbud**, tilbyr BSN medical produkter for en **sammenhengende behandlingsskjede**.

## SÅRPLEIE/KOMPRESJON

LYMFØDEM

KRONISK VENØS SYKDOM

POSTOPERATIV SÅRBEHANDLING

## ORTOPEDI

ANKELFORSTUING

FOT- OG HÅNLEDDSRUDD

### BSN medical AB

c/o Essity Norway AS · Fredrik Selmers vei 6 · NO-0663 Oslo  
Tlf: 22 98 04 00 · Faks: 22 98 04 01 · info.bsn.no@essity.com

[www.bsnmedical.no](http://www.bsnmedical.no)



an Essity company