

3M™ Tegaderm™ Roll

Filmbandasje på rull




Filmbandasjen på rull gir deg full fleksibilitet

- Meget enkelt å bruke – selv med hansker på!
- Hindrer gjennomtrenging av vann og bakterier.
- Materialet lar huden puste som normalt.
- Kan enkelt kuttes opp i passende størrelser -hjørner kan tilpasses og avrundes ved behov
- Krøller seg ikke, og kleber seg ikke fast til seg selv
- Usteril

Bruksområder:

- Forebygging av hudskader forårsaket av friksjon eller kroppsvæske.
- Vanntett feste av primærbandasjer som kompresser, alginatbandasjer eller skumbandasjer.
- Feste av medisinsk utstyr, katetre, slanger.

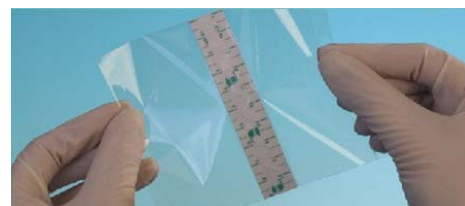

3M™ Tegaderm™ Roll

Filmbandasje på rull

Flikene på begge sider av rullen gjør det enkelt å plassere bandasjen, samtidig som du har full oversikt over hudområdet

Brukerveiledning:



1. Rull ut et stykke bandasje fra rullen i esken og bruk saks for å klippe av ønsket lengde. Fjern beskyttelsespapiret (merket med 1).



2. Hold i flikene på begge sider av filmbandasjen og plasser den over hudområdet/primærbandasjen.



3. Fjern begge flikene (merket med 2). Stryk forsiktig over filmbandasjen fra midten og ut til kantene. Hudvarme får bandasjen til å feste seg bedre.



Ta tak i ett av hjørnene og dra bandasjen forsiktig til siden samtidig som du holder på huden med den andre hånden. Ved å strekke bandasjen vil materialet utvide seg til bandasjen til slutt løsner fra huden.

Forholdsregler

Tegaderm Roll er et **usterilt** produkt. Brukes ikke direkte over skadet hud, åpne sår eller IV-kanyler.

Bestillingsinformasjon

3M Produktnr.	NAF-Varenr.	Produktbeskrivelse	Størrelse	Antall/eske
16002	902676	3M Tegaderm Roll	5 cm x 10 m	1
16004	902696	3M Tegaderm Roll	10 cm x 10 m	1
16006		3M Tegaderm Roll	15 cm x 10 m	1
16004S	899261	3M Tegaderm Roll (kort)	10 cm x 2 m	1

Nyhet!
Tegaderm
rull – kort



3M Norge A/S
Avd. Helseprodukter
Postboks 100, 2026 Skjetten
Tel: 0 63 84
Faks: 63 84 17 88
www.3m.no/helse

