

Renser sår. Støtter sårhelingen.¹



Granudacyn®


Mölnlycke®

Én løsning. Mange sår.

Granudacyn® er en sårskyllevæske, trygt konserverert med HOCl/NaOCl. Det brukes til å rense og fukte kroniske, akutte, kirurgiske og kontaminerte sår samt for første- og annengradsforbrenninger.

Løsningen kan også brukes på sensitivt vev som brusk, sener, leddbånd og bein², eller i øret, munnen, operasjonssår (intraoperative og postoperative) og i fistler. Dette gjør Granudacyn til et godt egnet produkt i de fleste sårbehandlingssammenhenger.

✓ Effektiv på ulike typer sår

Granudacyn® kan brukes på alle kroniske sår, inkludert diabetiske fotsår, alle former for leggsår og trykksår. I tillegg kan det brukes på akutte og kontaminerte sår samt overfladiske brannskader og delhudsbrannskader.

✓ Biokompatibel

Granudacyn® er bevist biokompatibel, noe som betyr at den har et positivt nytte/risikoforhold.³

Produktets mikrobielle renhet vises ved å følge retningslinjene i RDS 005⁴, som refererer til biobyrdetesten i samsvar med standard EN ISO 11737.

✓ Reduserer odør

Rensing reduserer odør fra såret⁵, ofte forbundet med nekrotisk vev eller bakteriell kolonisering.

✓ Bedre behandling, bedre livskvalitet

Reduserer infeksjoner gjennom mekanisk rensing som støtter sårets naturlige helingsprosess.

✓ Lang holdbarhet. Lett tilgjengelig.


Granudacyn® kan lagres i romtemperatur for flergangsbruk i opptil 90 dager (gel) eller 60 dager (skyllevæske).



Støtter naturlig heling gjennom mekanisk rensing og fukting

Slik fungerer det

Påfør Granudacyn i sårsengen før såret rengjøres. Løsningen krever ikke å nøytraliseres eller å fjernes, og kan brukes for å fukte bandasjen eller selve såret.

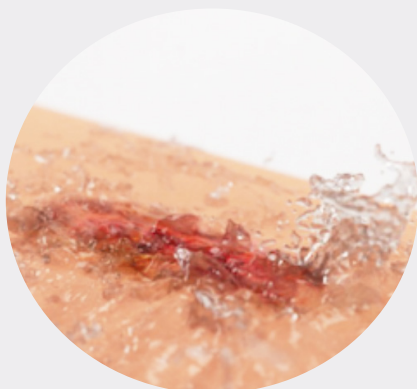

Granudacyn legger til rette for mekanisk fjerning av mikroorganismer og celleavfall.

HOCl/NaOCl i Granudacyn fungerer som et konserveringsmiddel og sikrer produktets trygghet og renhet.

Biobyrdetestene, utført i henhold til retningslinjene RDS 005⁴, bekrefter den mikrobielle renheten i produktet.

Forbereder kroppens helingsprosess

Granudacyn er ikke-cytotoksisk og forårsaker ikke irritasjon.³


Biokompatibel

Granudacyn er bevist biokompatibel, noe som betyr at det har et positivt nytte-/risikoforhold.³




Påføring


Sårskylling og spray: For rensing med presis dosering og påføring

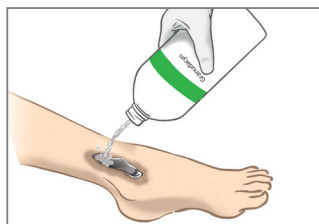


1. Skånsom sårrensing med Granudacyn skyllevæske.

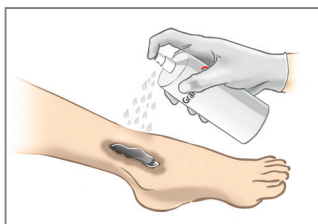

2A. Sprayer på rensset sår fra omlag 15-30 cm avstand.

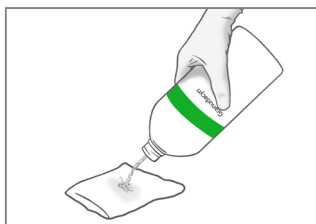


2B. Rens såret, eller fukt med en kompress og legg det i såret.

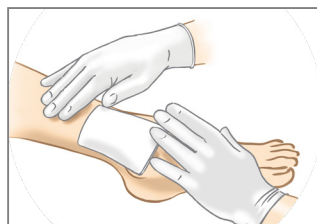


3. Kan brukes i kombinasjon med standardbandasjer.

Granudacyn kan bli brukt som løsning til installasjon med NPWT (undertrykksbehandling).

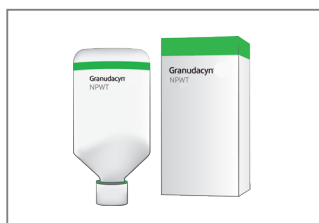

1. Ta NPWT-flasken ut av esken.

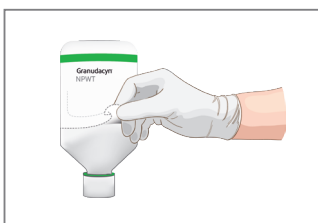

2. Åpne bærehanken fra etiketten og stikk hull på flasken.



3. Heng flasken i hanken på stativet.

Sortiment

	Mengde	Art. nr.	Holdbarhet	Ant. pr. trp
Granudacyn® sårskyllevæske	50 ml spray	360150	30 måneder	20
	250 ml spray	360100		15
	500 ml	360101		12
	1000 ml	360102		6
	500 ml NPWT	360103		12
	1000 ml NPWT	360104		6
Granudacyn® sårgel	50 g	360107	24 måneder	12
	100 g spray	360108		12
	250 g spray	360106		15



Referanser:

1. Edwards-Jones V, Flanagan M, and Wolcott R. Technological advancements in the fight against antimicrobial resistance. Wounds Int 2015;6(2):47-51. 2. Granudacyn®-Journal of Wound Care Volume 29 No 10 (Suppl 2) October 2020. 3. Severing AL, Rembe JD, Koester V, Stuermer EK. Safety and efficacy profiles of different commercial sodium hypochlorite/hypochlorous acid solutions (NaClO/HClO): antimicrobial efficacy, cytotoxic impact and physicochemical parameters in vitro Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Volume 74, Issue 2, February 2019, Pages 365-372. 4. RDS 005-0414, ZLG, Anleitung für die Festlegung von Mindestkriterien zur mikrobiologischen Reinheit von Medizinprodukten. 5. Efficacy and safety of neutralpH superoxidised solution in severe diabetic footinfections-Fermín R Martí'nez-De Jesu's, Antonio Ramos-De la Medina, Jose' Mari'aRemes-Troche, David G Armstrong, Stephanie C Wu, Jose Luis Lazaro Martinez, Juan V Beneit-Montesinos-International Wound Journal. 6. Dissemond, J, et al. M.O.I.S.T. - a concept for the topical treatment of chronic wounds. Journal of the German Society of Dermatology. 2017. 7. RD Wolcott, J Fletcher, Role of wound cleansing in the management of wounds, Wounds Middle East, Vol. (1) 2014.

Les mer på www.molnlycke.no

Molnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Telefon 22706370.
The Molnlycke and Granudacyn trademarks names and logos are registered globally to one or more of the Molnlycke Health Care Group of Companies. ©2023 Molnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC3942401