


## Debriderer såret i dybden.

For sårflater som er vanskelig å komme til.

Med sin innovative og unike konstruksjon gir **Debrisoft® Lolly** deg en mulighet til å rense opp i dypere kaviteter og sårlommer.



fibre technology  
**ACTITOP**

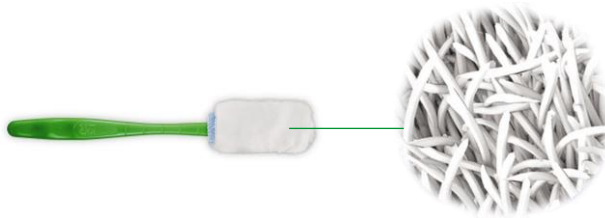

## Den eneste på markedet!

Hodet på **Debrisoft® Lolly** består av monofilamente polyesterfibrer med en unik Actitop-teknologi. Hodet er fastsydd med doble sømmer på et gripevennlig skaft av polypropylen og har en kantsøm med blå røntgensynlig tråd.

### Raskt resultat



- Sparer tid og derfor penger
- Gjør såret rent på 2-4 minutter
- Effektiv mot biofilm

### Enkel å bruke



- Lolly er praktisk og brukervennlig.
- 95% vurderer den som veldig bra eller utmerket!

### Nesten smertefritt




- Bedre etterlevelse
- 97.4% opplever ingen smerte eller annet ubehag




### Indikasjoner (A)

- Trykksår
  - Kirurgiske sår
  - Sår som er vanskelig å komme til.
- Kan brukes til både dype og overfladiske sår.

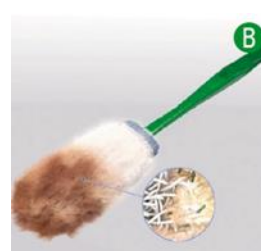

### Funksjon (B)

De patenterte fibertrådene binder til seg fibrin, eksudat og bakterier slik at det blir en skånsom og effektiv opprensing av såret.

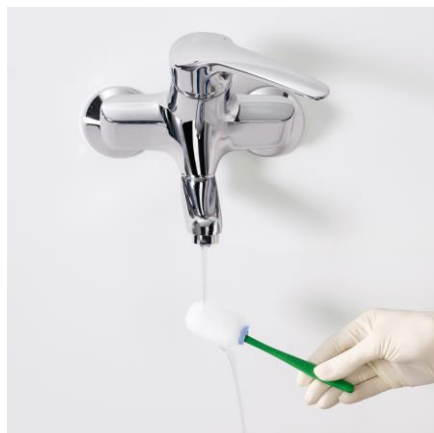

### Bruksanvisning:

- Fukt fiberhodet med vanlig springvann eller NaCl 0,9 % i samsvar med gjeldene lokale retningslinjer, ca 5-15 ml.
- Gjør sår og sårlommer rene med fiberhodet.
- Ved behov kan en debrideringspad brukes for å rengjøre huden rundt såret.
- Etter debrideringen kan såret behandles etter gjeldende prosedyre.

### Forsiktighetsregler:

- La ikke Debrisoft® Lolly bli liggende igjen i såret.
- Den skal ikke føres inn i sår som har en åpning som er mindre enn fiberhodet.
- Fiberhodet på Debrisoft Lolly må ikke klippes til eller løsnes fra skaftet.
- Unngå kraftig trykk da det kan føre til smerter og/eller skade på vevet.
- Vær ekstra oppmerksom når produktet brukes ved fistler som har uklare forbindelser (f.eks. abdomen).



### Debrisoft® Lolly finnes i en størrelse:

Lev.art.nr	Størrelse	Avd.fp	Trp.fp
33224LR	5 cm (hoveddel) 15,5 cm inkl. skaft	5	50



### Produktmateriale

- Hoveddelen er laget av monofilamente polyesterfibrer, innsiden av polyakrylat samt røntgentråd av polypropylen.
- Skaftet er laget av polypropylen.
- Produktet er pakket separat og er EO-sterilisert.

### Debrisoft® Lolly

- CE-merket.
- Oppbevares tørt og rent i romtemperatur.
- Holdbar i 3 år fra produksjonsdato.
- Produktemballasje av cellulose, polyester og polypropylen.
- Lageremballasje og bruksanvisning av cellulose som kan kildesorteres.
- Transportemballasje i wellpapp/bølgepapp av cellulose. Kan kildesorteres.
- Produktet behandles som brennbart avfall i henhold til lokale og nasjonale forskrifter.