


Semipermeabel film<sup>1,2</sup>

Absorberende<sup>1</sup> hydrocellulært skum med sølv sulfadiazine

Silikonheft som dekker sårkontaktlaget

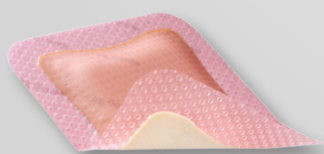

 **smith&nephew**  
**ALLEVYN<sup>®</sup>**  
Ag Gentle Border

ALLEVYN<sup>o</sup> Ag Gentle Border gir en optimalvæskehåndtering gjennom en unik triple-action teknologi som absorberer, beholder og fordampner væske.<sup>1-3</sup> Dette optimaliserer fuktbalansen i såret og fremmer sårtilhelingen<sup>3</sup>. Tilsetningen av sølv sulfadiazin i den hydrocellulære puten gir en kontinuerlig antimikrobiell effekt (dokumentert *in-vitro*)<sup>3</sup>

- Utmerket tilpassing sikrer pasient komfort<sup>5</sup>
- Et myk soft silikon heft som reduserer traume og smerter ved bandasjeskifte<sup>5</sup>
- Enkel å applikere og å fjerne - kan løftes og reposisjoneres uten å miste sine klebende egenskaper<sup>5</sup>
- Silikon sårkontaktlag - ideell for pasienter med ømsintlig og sart hud<sup>5</sup>
- Dokumentert *in-vitro* effekt mot et bredt spekter av bakterier inkludert antibiotikaresistente bakterier som *Pseudomonas*, Methicillin-Resistant *Staphylococcus Aureus* (MRSA) og Vancomycin Resistant *Enterococcus* (VRE)<sup>4</sup>
- Gir en vedvarende antimikrobiell effekt i minimum 7 dager *in-vitro*<sup>4</sup>

## Indikasjoner

ALLEVYN Gentle Border er indikert for sårbehandling på grunne granulerende sår, kroniske og akutte væskende sår, dype eller overfladiske sår som trykksår, leggsår, diabetiske fotsår, infiserte sår, maligne sår, kirurgiske sår, første- og annengrads forbrenninger, donorsteder, hudavskrapninger og ulcererende sår.

## Applikering

Rengjør såret etter normale prosedyrer. Velg egnet bandasjestørrelse. ALLEVYN Ag Gentle Border kan klippes til for å passe til sår på hæler, albuer og andre vanskelige områder. Bruk alltid en antiseptisk teknikk ved tilklipping av bandasjen.

Klargjør og rengjør huden rundt sårområdet og fjern overflødig væske. Overflødig hårvekst klippes bort for å sikre at bandasjen sitter tett mot huden.

Fjern en av beskyttelsesfilmene og fest bandasjens klebekant til huden.

Fjern resten av beskyttelsesfilmen og fest bandasjen over såret uten å strekke, slik at bandasjen applikeres uten skrukker. Sørg for at skumputen dekker hele såret. Bandasjen kan løftes og reposisjoneres uten å miste klebeevnen.

Sørg for at eventuelle eksponerte skumområder dekkes med en egnet filmbandasje uten å dekke over hele bandasjen, dersom bandasjen er klippet til.

## Bandasjeskift

I den innledende fasen av behandlingen bør alle ALLEVYN Ag Gentle Border bandasjene inspiseres i henhold til lokal klinisk protokoll. Dersom produktet brukes på infiserte sår, bør infeksjonen inspiseres og behandles etter lokal klinisk protokoll.

Bandasjen kan sitte på såret i opp til syv dager med unntak av sacralområdet, der bandasjen kan sitte på i opp til fem dager, avhengig av tilstanden til såret og huden omkring. Avhengig av hva som skjer først, bør bandasjen byttes når sårveske er synlig og nærmer seg 0,5cm fra kanten av bandasjen, eller når tilstanden til såret og huden omkring tilsier bandasjeskift. Ta hensyn til lokal praksis.

## Bestillingsinformasjon

artikkel	beskrivelse	antall pr. salgsenhet
66800436	7.5cm x 7.5cm	10
66800437	10cm x 10cm	10
66800438	12.5cm x 12.5cm	10
66800439	17.5cm x 17.5cm	10

## ALLEVYN - Proud to put people first

For patients. For budgets. For today.°

Wound Management  
Smith & Nephew AS  
Nye Vakås vei 64  
1395 Hvalstad  
Norge

www.smith-nephew.com

°Trademark of Smith & Nephew  
© Smith & Nephew mai 2015  
15-01493-NO



T +47 66 84 20 20  
F +47 66 84 20 90

## Fjerning


ALLEVYN Ag Gentle Border bandasjen fjernes ved å løfte et hjørne og trekke forsiktig tilbake til bandasjen er helt fjernet fra såret.

## Kontraindikasjoner

- Bandasjen skal ikke brukes på pasienter med en kjent sensibilitet mot SSD eller sulfonamider
- Fordi sulfonamider kan forårsake kernicterus, bør ALLEVYN Ag Gentle Border ikke brukes på kvinner som er i siste trimester, eller som ammer, eller på for tidlig fødte barn og spebarn de første månedene av livet.

## Forsiktighetsregler

- Kun til utvortes bruk.
- ALLEVYN Ag Gentle Border skal ikke brukes sammen med oksidasjonsmidler som hypoklorittoppløsninger (for eksempel EUSOL) eller hydrogenperoksid da disse kan bryte ned det absorberende polyuretanlaget i bandasjen
- ALLEVYN Ag Gentle Border kan være inkompatibel med andre antimikrobielle midler.
- Ved systemisk infeksjon erstatter ikke sølvet behovet for systemisk, eller annen adekvat behandling.
- Enkelte pasienter kan oppleve irritasjon og/eller masserasjon av huden rundt såret. Dersom det oppstår rødhet eller sensibilisering, skal behandlingen avbrytes og lege kontaktes.
- Merk deg at feilaktig bruk eller for hyppige bandasjeskift - spesielt på pasienter med ømfintlig hud, kan føre til hudskader.
- Unngå kontakt med elektroder eller ledende geleer under elektroniske måleinger som EEG og ECG.
- Dersom ALLEVYN Ag Gentle Border brukes under MRI (Magnetic Resonance Imaging), kan pasienten oppleve noe varmeutvikling.
- ALLEVYN Ag Gentle Border er ikke kompatibelt med oljebaserte produkter som petrolatum.
- ALLEVYN Ag Gentle Border er ikke egnet som eneste behandling av kaviteter, men kan brukes som en sekundærbandasje for denne diagnosen.
- ALLEVYN Ag Gentle Border har samme forsiktighetsregel som andre produkter som inneholder SSD, særlig ved behandling av større sårflater:
  - Utvis forsiktighet hos pasienter med nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon,
  - Utvis forsiktighet hos pasienter med glucose-6-phosphate dehydrogenase mangel,
  - Effekten av systemisk administrerte legemidler kan endres. Dette kan særlig gjelde for orale antidiabetika og fenytoin. Dersom pasienten bruker disse stoffene, anbefales det at blodnivåene overvåkes fordi stoffenes virkning kan forsterkes.
- ALLEVYN Ag Gentle Border er et engangsprodukt.

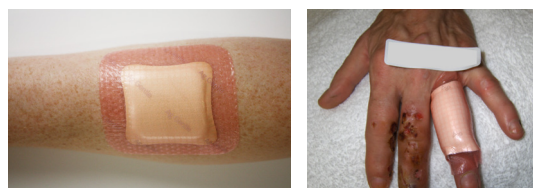

## Referanser

1. Smith & Nephew Medical Ltd. Report Ref: DS/08/098/R1b, ALLEVYN Ag gentle Border Dressings Physical Properties. Carpenter S. Nov. 2008.
2. Smith & Nephew Technical Justification AG 007
3. The clinical and physical properties of ALLEVYN Ag Gentle Border and the moist wound environment (Dave Myers) April 2009.
4. Smith & Nephew Research Centre Report Ref: RR-WMP07330-10-03. The equivalence of the antimicrobial efficacies of the ALLEVYN Ag foam variants against key wound pathogens. Driffield K., Woodmansey E. 25/03/09.
5. Smith & Nephew Medical Ltd. Report Ref: HVT050 Results from an open, prospective, randomised, within volunteer, comparison of Dakota and Mepilex Border. Palmer S & Smith G. Dec. 2008.