

NorFix - Effektiv fiksering av I.V. kanyler og I.V. sett



Trekk frem fiksering og klipp i markering mellom to tykke felt.

Behagelig og hudvennlig materiale:

2 størrelser, 5 farger

Nå også i merinoull i størrelse XL. Merinoull forhindrer nedkjøling, noe som er en stor fordel under infusjon ved f.eks. kreftbehandling, den er også godt egnet til å bruke som lue på nyfødte.

Størrelse XL – velg mellom bomull og merinoull

Artikkelnummer	Materialer/sammensetning
791100NS, 791101NS, 791102NS, 791103NS, 791104NS	96% ubleket bomull 4% lycra (elastikk) Hvit, grønn, rosa, blå, grå
791105NS	96 % merinoull 4 % lycra (elastikk) Lilla
Forpakning	
Innereske	125/100/80 (5/4 ruller) Hver rull har 25/20 klipp á 29 cm (ikke strukket)
Yttereske	750/600/480

Lag et lite hull i kanten av den tykke delen, mot det finvevde partiet, hvis fikseringen skal brukes til fiksering av I.V. kanyler eller I.V. sett. Trekk fikseringen på som en hanske, med tommelfingeren gjennom det klipte hullet.



Produseres i Norge!

Art.nr:	Produktbetegnelse:	Forpakning:
791100NS	Fikseringsstrømpe – NorFix Hvit	25/125/750
791101NS	Fikseringsstrømpe – NorFix Grønn	25/125/750
791102NS	Fikseringsstrømpe – NorFix Rosa	25/125/750
791103NS	Fikseringsstrømpe – NorFix Blå	25/125/750
791104NS	Fikseringsstrømpe – NorFix XL Grå	20/100/600
791105NS	Fikseringsstrømpe – NorFix XL Lilla – Merinoull	20/80/480