

JUSTERBAR KOMPRESJON

JOBST® FARROWWRAP® 4000


Justerbar kompresjon til ødemreduksjon og behandling av venøse leggsår

- Til ødemreduksjon og behandling av venøse leggsår og andre ødemer/hevelser i underben
- Gir 30-40 mmHG
- Kortelastisk system - kan brukes dag og natt
- Åpne sår skal dekkes med sårprodukt før påtaking
- Ett sett inneholder en Hybrid innerstrømpe og en justerbar kompresjonsbandasje
- Hybrid innerstrømpe har kompresjonsklasse 2 i forfot og opp til ankel
- For egenbehandling
- Effektivt system - sparer tid og penger
- Enkel å ta på - med integrert innertube og kun fire bånd
- Pasienten kan bruke vanlige sko
- Maskinvask (se vaskeråd)

JOBST® FARROWWRAP® 4000

MÅLTAKING

| Mål | XS | S | M | L |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Omkrets (kroppsmål, uten stramming) | | | | |
| Legg - tykkeste (C) | 25-38 cm | 32-48 cm | 37-56 cm | 43-67 cm |
| Ankel - tynneste (B) | 17-23 cm | 19-28 cm | 25-37 cm | 29-43 cm |
| Lengde | | | | |
| Normal (B-D) | 30-33 cm | 30-33 cm | 30-33 cm | 30-33 cm |
| Lang (B-D) | 34-37 cm | 34-37 cm | 34-37 cm | 34-37 cm |

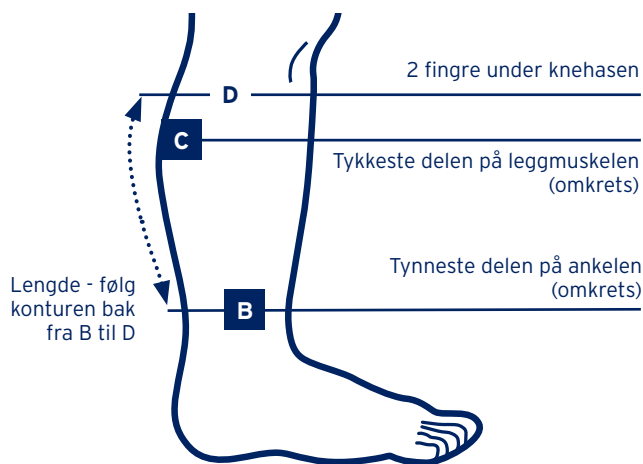

FARGER



MATERIALE

89 % Nylon, 11 % Elastan

KOMPRESJON


30-40 mmHg

TILBEHØR

Tilbehør 2 stk. innerstrømpe Farrow Hybrid med kompresjon i forfoten
Velg skostørrelse og bredde på omkrets A1

| | Small | Medium | Large | X-Large |
|--|-------|--------|-------|---------|
| Skostørrelse | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-46 |
| Normal fot: 20-27 cm omkrets på A1. Bred fot: 28-35 cm omkrets på A1 | | | | |

Hybrid innerstrømpe med kkl 2 på forfot, følger med. Den kommer alltid med bred/wide fot. Valg av lengde på Farrow 4000 produktet avgjør hvilken størrelse som automatisk følger med. Normal lengde= M str. på Hybrid innerstrømpe. Lang lengde= L str. på Hybrid innerstrømpe. Dette uavhengig av størrelsen du bestiller på FarrowWrap 4000. Ønsker du annen størrelse på Hybrid innerstrømpe MÅ du bestille den separat.

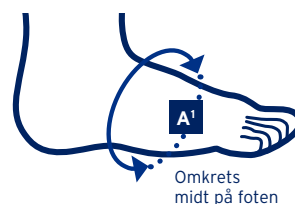

ENKEL PÅTAKING

Åpne sår skal dekkes med sårprodukt før påtaking



1 Innerstrømpen gir kompresjon på fot og ankel (men ikke på leggen). Pass på at den stopper rett under knehasen.

2 Brett borrelåsene mot produktet før du tar det på. Trekk på inner-tuben og plasser den slik at den kommer midt på underbenet. Merkelappen skal være opp.

3 Åpne opp borrelåsene. Ta tak i de to nederste båndene og trekk i båndet/borrelåsen til det stopper. Fest det nederste båndet langs kanten på produktet. Fest det motsatte båndet i en rett linje den andre veien. Fortsett med bånd 3 og 4 og fest de på samme måte.

FOTDEL



Ved mye ødem på foten, eller om hybridstrømpen ikke brukes, kan man bruke en FarrowWrap fotdel.

VED AVTAGNING

Pass på at borrelåsen er festet til produktet. Dette for å unngå slitasje på borrelåsene.

VASKERÅD

Borrelåsene må være festet til produktet ved vask og tørk for å unngå slitasje på produktet og andre klær i vasken. Bruk vaskepose. Rett ut borrelåsene etter vask.

FarrowWrap 4000

Ikke tørketrommel

FarrowWrap Hybridstrømpe



Scan QR koden for å se film som viser hvordan man tar på JOBST® FarrowWrap® 4000