

## LE MIE MISURE

Misura A

Data

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Se l'invasatura o l'allineamento della protesi sono stati modificati dal protesista, prendere una nuova misura A.



## PRO-FLEX® LP ALIGN

Cambio delle scarpe - come regolare  
Pro-Flex LP Align



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20

## STRUMENTAZIONE

- Righello
- Nastro adesivo
- Pennarello

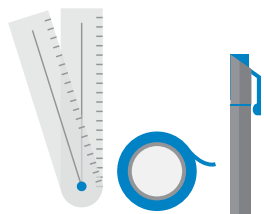


FIGURA 1


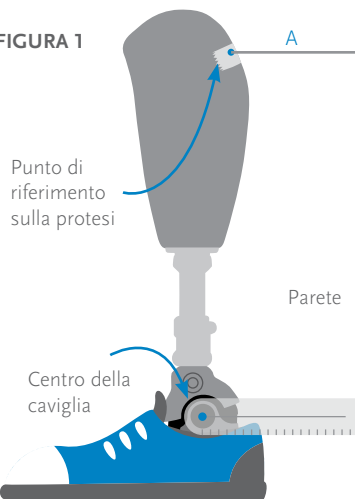


FIGURA 2

Regolare la protesi in modo che il punto di riferimento sia ad una distanza dalla parete **uguale alla misura A**.

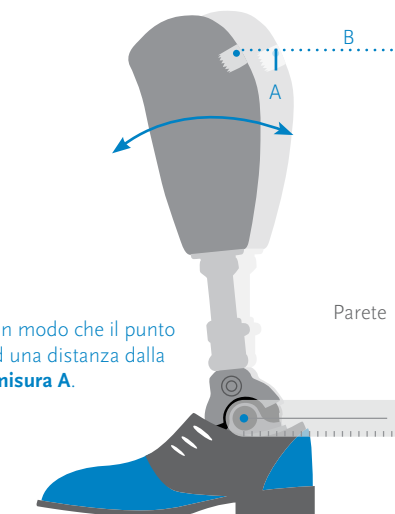

## ISTRUZIONI

**FASE 1:** Prendere un punto di riferimento sul retro dell'invasatura con il nastro adesivo o il pennarello.

**FASE 2:** Prendere il righello (in dotazione) e posizionare la cerniera/il foro sopra il centro della caviglia e l'estremità piatta contro la parete come mostrato nella Figura 1.

**FASE 3:** Misurare la distanza tra il punto di riferimento sull'invasatura e la parete e annotarla come misura A. (vedere Figura 1)

**FASE 4:** Cambiare la scarpa sulla protesi con quella che si desidera indossare.

**FASE 5:** Con il righello, allineare la protesi alla parete come spiegato nella **FASE 2**.

**FASE 6:** Misurare la nuova distanza tra la parete e il punto di riferimento sull'invasatura, indicata da B nella figura 2.

**FASE 7:** Per regolare l'angolo del piede, premere il pulsante interno per sbloccare la caviglia, tenere fermo il piede e spostare l'invasatura indietro o in avanti per ripristinare la misura A. Il punto di riferimento deve essere sempre ad una distanza uguale alla misura A.

Se la **misura A** è superiore alla misura B, **portare l'invasatura in avanti**.

Se la **misura A** è inferiore alla misura B, **portare l'invasatura verso la parete**.

**FASE 8:** IMPORTANTE: premere il pulsante esterno per bloccare la caviglia. Ora è possibile usare la protesi in sicurezza.

### NOTA:

- Al successivo cambio delle scarpe, prendere una nuova misura B.
- Se l'invasatura o l'allineamento della protesi sono stati modificati dal protesista, prendere una nuova misura A.
- Fare pratica su queste fasi con il proprio protesista.
- Queste istruzioni sono da considerarsi valide per gli amputati transtibiali, transfemorali e con disarticolazione del ginocchio.

