


DIRECT SOCKET TT

Fabbricazione di una protesi
transtibiale completa in
tempi rapidi

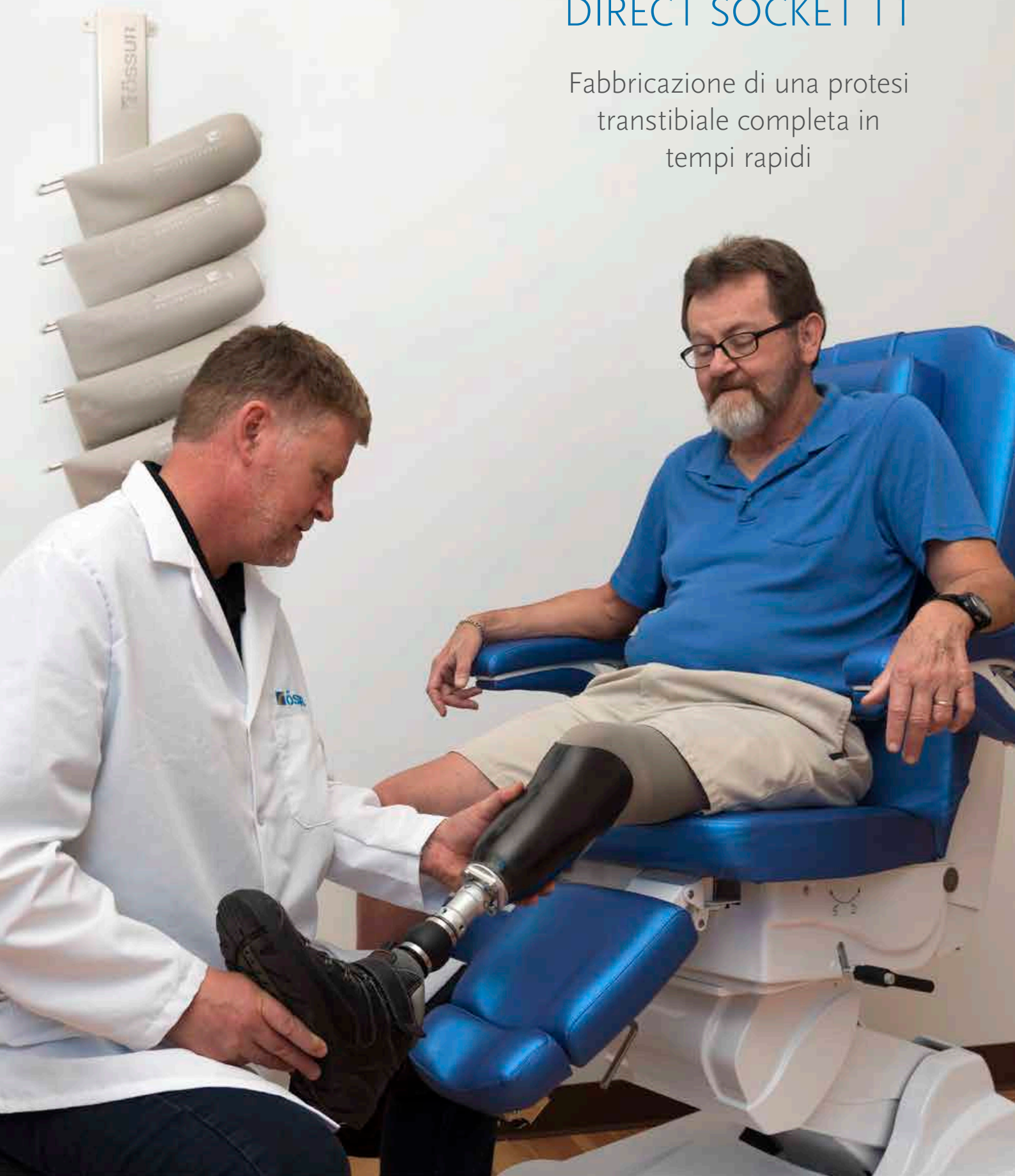

DIRECT SOCKET TT

Il sistema di invasatura ed i materiali di Direct Socket forniscono affidabilità nella produzione di invasature, offrendo una vestibilità ottimale immediata.



METODI DI APPLICAZIONE

- Laminazione diretta sul moncone
- Laminazione standard sul modello positivo

EFFICACE

- Fabbricazione completa di una protesi transtibiale e posizionamento sul paziente in un solo appuntamento
- Riduce il tempo di produzione al tecnico ortopedico

PULITO

- Applicatore di resina auto-contenitiva - non richiede attrezzature speciali di ventilazione

FLESSIBILE

- Compatibile con sistemi di sospensione con pin, suzione e vuoto attivo
- Compatibile con le cuffie in silicone Iceross® Locking, Cushion e Seal-In®
- Compatibile con i sistemi Icelock® 214 e la serie Icelock 600, valvola Icelock 551, Icelock 544 piastra espulsione e la piastra Icelock 544 Unity

AFFIDABILE

- Risultati di produzione coerenti nel corso del tempo.

STANDARDIZZATO

- Per tutti i livelli di attività e utenti fino a un peso di 166 kg
- Conforme agli standard di qualità ISO 10328 (A100 + 65% economico)

SEMPLICE

- Tutti i componenti necessari per la fabbricazione di un'invasatura sono disponibili in un kit materiale, ma si possono acquistare anche i singoli pezzi.
- Fabbricazione facile, semplice assemblaggio e sostituzione di componenti e accessori

DIRECT SOCKET

Direct Socket Tool Kit fornisce al tecnico ortopedico gli strumenti per poter realizzare un'invasatura affidabile ed anatomicamente corretta utilizzando il kit in dotazione. Tale kit include un dispositivo con camera d'aria e la pompa Icecast, un sistema di calco a pressione a camera singola progettato in modo ottimale per distribuire la pressione per modellare i tessuti molli durante la realizzazione del calco. Inoltre, dal momento che il moncone subisce un carico durante la fase di realizzazione, si riduce la necessità di ulteriori modifiche dell'invasatura. Una matrice di rinforzo rende la camera duratura e ne controlla l'allungamento.



FABBRICAZIONE STANDARDIZZATA



ATTREZZATURE



Iceross Cuffia Direct Casting

Misure

- 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34



Kit Strumenti Direct Socket

Include:

- Icecast dispositivo con camera d'aria
- Icecast pompa
- Siringa applicazione resina 200ml
- Siringa applicazione resina 400ml
- Attrezzo per l'attacco distale
- Guarnizione sigillante
- Corda lanyard
- Cuscinetti di pressione EVA
- Valigia Icecast (predisposta per trolley)

Cod. prod.	Profilo	Metodo di sospensione
I-09DCXX	2mm	Locking (pin)

Cod. prod.	Descrizione	ARTICOLI DI RICAMBIO
M-500300	Kit strumenti Direct Socket	
M-500330	Trolley per valigia Icecast	
D-040532	Accessorio per attacco distale per Direct Socket	
D-040552	Guarnizione sigillante	
1950504	Siringa applicazione resina, 400ml	
L-392018	Corda Lanyard	
M-100001	Cuscinetti di pressione Eva	

MATERIALI DI CONSUMO



Kit Materiali Direct Socket

Include:

- Pezzi in fibra di vetro (5" o 7"), pezzi in fibra di carbonio (5" o 7") o pezzi in fibra di basalto (5")
- Cartuccia resina (neutra o nera)
- Fogli isolanti in silicone 2 x 0,6 m
- Cappuccio isolante in silicone
- Nastro adesivo

* Consultare il catalogo Össur per i cuscinetti di pressione

Cod. prod.	Descrizione	ARTICOLI SUPPLEMENTARI
M-500105	Direct Socket TT, 5" Fibra di vetro, Resina neutra	
M-500107	Direct Socket TT, 7" Fibra di vetro, Resina neutra	
M-500115	Direct Socket TT, 5" Fibra di vetro, Resina nera	
M-500117	Direct Socket TT, 7" Fibra di vetro, Resina nera	
M-500205	Direct Socket TT, 5" Fibra di carbonio, Resina nera	
M-500207	Direct Socket TT, 7" Fibra di carbonio, Resina nera	
M-500315	Direct Socket TT, 5" Fibra di basalto, Resina nera	
M-400301	Fogli isolanti in silicone 2x0.6m	
M-400101	Fogli isolanti in silicone 30m	
M-400102	Cappucci isolanti in silicone (10 pezzi)	
M-400206	Sigillo inferiore per Direct Socket	

ACCESSORI



Foto	Cod. prod.	Descrizione
1	L-661000	Giunto modulare distale per Icelock Serie 600*†
2	L-621100	Icelock Kit adattamento 621
3	L-631100	Icelock Kit adattamento 631
4	L-651100	Icelock Kit adattamento 651
5	L-551002	Icelock valvola di espulsione 551*
6	L-544050	Icelock 544 Piastra adattatore Direct Socket**
7	L-544521	Piatto di espulsione Icelock 544**
	L-544511	Piatto Unity Icelock 544**
8	L-214100	Icelock Clutch 4H 214 per Sistema Direct Socket
9	A-242500	Giunto piramidale femmina a 4 fori con 20/20 offset, alluminio

†Deve essere utilizzato con la serie Icelock® 600.;

*Deve essere utilizzato con cuffie Cushion e sigillo inferiore Direct Socket

**L-544050 Piastra adattatore deve essere utilizzato con Icelock piastra L-544521 o L-544511