



WWW.OSSUR.IT



© ÖSSUR, 07.2019



# ICEROSS® POST-OP TT & TF


Istruzioni per l'uso  
clinico



È stato dimostrato che un trattamento precoce con l'uso di una cuffia Iceross Post-Op, favorisca una mobilitazione rapida e acceleri il processo di cicatrizzazione della ferita del moncone. Le seguenti istruzioni d'uso vi forniranno informazioni dettagliate sulle modalità d'uso, di manutenzione e pulizia della cuffia. Troverete inoltre consigli su come ottenere una terapia di compressione efficace indipendentemente dal tipo di amputazione.

## 1 Selezione taglia cuffia

- A TT:** Piegarlo leggermente il ginocchio, il tessuto molle deve pendere verso il basso  
**TF:** Sollevare leggermente il moncone
- B** Misurare 4 cm a partire dall'estremità distale

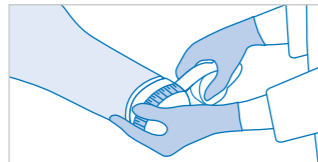

- C** Misurare la circonferenza a 4 cm di distanza dall'estremità distale




- E** Trascrivere le misure sulla scheda terapeutica




- D** Selezionare la misura della cuffia corrispondente alla propria circonferenza o la taglia successiva più piccola a disposizione


## 2 Inserimento

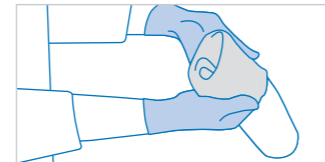


- A** Capovolgere la cuffia

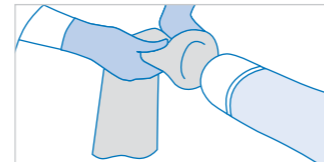

- B** Posizionare la cuffia completamente capovolta sul moncone

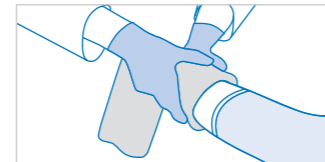

- C** Far scorrere la cuffia lungo il moncone  
**TT:** Piegarlo leggermente il ginocchio  
**TF:** Sollevare leggermente il moncone

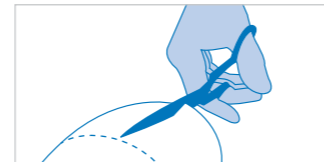


- D TF:** Se necessario, tagliare la cuffia in modo da ottenere una forma anatomica


### Attenzione

- Verificare che non vi siano presenti bolle d'aria, se presenti indossarla nuovamente
- Scrivere l'ora di applicazione della cuffia

## 3 Rimozione

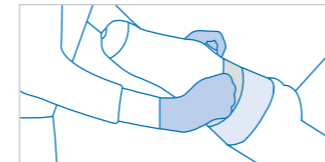


- A** Capovolgere il bordo prossimale

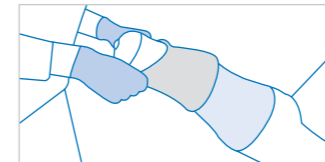


- B** Far scorrere delicatamente dalla parte prossimale verso quella distale  
 • Scrivere l'ora della rimozione


## 4 Pulizia per uso quotidiano

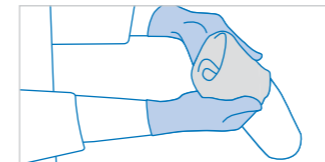


- A** Capovolgere la cuffia

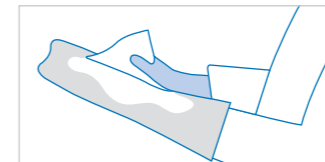

- B** Passare la superficie con salviette impregnate di alcool fino a quando quest'ultima non sarà completamente bagnata

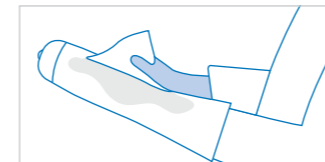

- C** Rimettere la cuffia in posizione normale e ripetere l'operazione per l'esterno

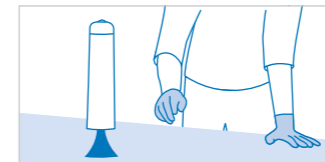


- D** Lasciare asciugare

## 5 Sterilizzazione




- A** Pulizia e disinfezione
- Disinfettore di lavaggio 90 °C / 5 min.
  - Oppure manualmente come precedentemente descritto per la pulizia quotidiana

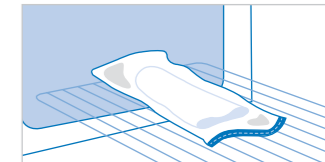


- B** Sterilizzazione
- Inserire la cuffia nel sacchetto di sterilizzazione e sigillare entrambe le estremità.
  - Sterilizzare in autoclave con pre-vuoto frazionato e calore umido a 134° / almeno per 5 min

## 6 Posizionamento del paziente

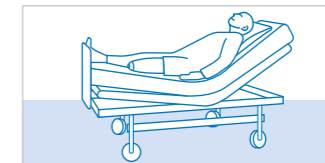

- A** In caso di problemi venosi

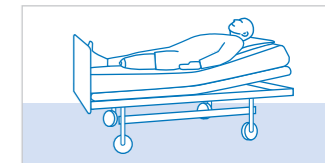

- B** In caso di problemi alle arterie



- C** Su carrozzina